



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions



VERSION
// 1.0

IntegraMouse[®] AIR Guide rapide

integramouse.com



Français (FR)



**Mise en service,
nettoyage et contrôle**

Mise en service

Montage de l'IntegraMouse AIR

1.



Insérez l'embout buccal en faisant attention à la goupille de guidage et à la fente de guidage.

2.



Appliquez une légère pression et tournez l'embout buccal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3.



Fixez l'IMAIR à votre système de montage (filetage 1/4").

4.



Amenez l'IMAIR dans la position de travail souhaitée.

Pour la mise en service initiale, nous recommandons un fonctionnement avec une connexion par câble.

5.



Branchez le câble dans la prise USB-C située à l'arrière de l'IMAIR.

6.



Branchez le câble USB à l'ordinateur (prise USB-A).

7.


Appuyez brièvement sur le bouton situé sur la lèvre droite pour allumer l'IMAIR.

8.


Toutes les LED s'allument brièvement et l'IMAIR se calibre automatiquement.

9.


La LED de gauche s'allume (connexion par câble). La LED de droite (M) est éteinte (mode souris).



**Veuillez ne pas
toucher
l'IntegraMouse
AIR pendant
l'étalonnage !**

Toutes les étapes suivantes sont exécutées automatiquement :

- La batterie interne est en charge.
- Votre ordinateur installe l'IntegraMouse AIR comme souris par défaut.

Guide rapide de mise en service en mode sans fil



(Appairage via Bluetooth)



Pour utiliser la souris IntegraMouse AIR avec Bluetooth, assurez-vous que sa batterie est suffisamment chargée. Pour ce faire, utilisez le chargeur fourni et chargez la batterie avant la première utilisation.

1.



Appuyez brièvement sur le bouton situé sur la levère droite pour allumer l'IMAIR.

2.




Toutes les LED clignotent brièvement et l'IMAIR se calibre automatiquement.

3.



La LED de gauche s'allume.

4.

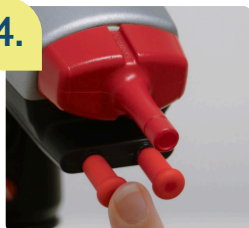

Appuyez sur le bouton de la levère gauche pendant 3 secondes.

5.



La LED 1 commence à clignoter.

6.



Sélectionnez la position souhaitée (1, 2 ou 3) en appuyant sur le bouton de la levère gauche.

7.



Attendez quelques instants que la LED sélectionnée clignote en bleu.

8.



Lancez la recherche de périphérique sur le périphérique final et sélectionnez IMAIR.

9.



Si l'appairage réussit, le clignotement cesse et la LED s'allume en orange.

Remarques générales sur le nettoyage



Utilisation d'IntegraMouse AIR dans le secteur clinique

- En milieu clinique, utiliser l'embout buccal (comprenant la membrane et le tube en silicone) et les boutons labiaux comme produits à usage unique.
- L'intervalle entre les changements de l'embout buccal (y compris la membrane et le tube en silicone) et des boutons labiaux doit être déterminé par un médecin ou un professionnel de santé spécialisé.
- En cas de suspicion de maladie infectieuse, veuillez prendre des précautions de sécurité particulières (par exemple, porter des gants lors du changement de l'embout buccal).

Désinfection par essuyage

- Utilisez uniquement des désinfectants de surface adaptés au polycarbonate LEXAN.
- Nous recommandons par Schülke & Mayr (www.schuelke.com) : Mikrozid Sensitive Liquid ou Mikrozid Sensitive Wipes ou des produits équivalents.



Ne pas utiliser la stérilisation humide ou gamma.

L'embout buccal, les boutons labiaux et les autres composants de l'IntegraMouse AIR ne doivent pas être nettoyés par stérilisation humide ou gamma.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, cela détruirait la surface des composants.

Ne pas immerger dans l'eau

N'immergez jamais l'IntegraMouse AIR et ses composants électroniques dans l'eau et n'utilisez jamais d'eau courante – vous risqueriez d'endommager l'appareil.



Nettoyage correct des composants

- Les composants de l'IntegraMouse AIR, notamment le bloc d'alimentation (câble inclus) et le système de fixation, peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.
- Nettoyez les composants une fois par semaine

NETTOYAGE DE L'EMBOUT ET REMPLACEMENT DE LA Membrane

Intervalle de nettoyage et de remplacement de l'embout buccal et des boutons labiaux

Nettoyage : La souris IntegraMouse AIR dispose d'une fonction de rappel de nettoyage et vous le rappelle après la période d'utilisation recommandée grâce à une LED clignotante (voir page 8).

- au moins une fois toutes les deux semaines
- plus souvent en cas de maladie

Disposer:

- si endommagé ou présentant des signes d'usure visibles
- en six mois

Intervalle d'élimination de la membrane

Jetez toujours la membrane, aucun nettoyage n'est recommandé.



1. Tournez d'abord l'embout buccal dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirez-le en tirant tout droit.



2. Retirez et jetez la membrane.



3. Nettoyez l'embout buccal dans un stérilisateur à vapeur.



4. Laisser l'embout buccal sécher et refroidir.

5.



Placer une nouvelle membrane sur l'embout buccal.

6.



Insérez l'embout buccal (notez la goupille de guidage et la fente de guidage) et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en exerçant une légère pression.














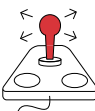

L'embout buccal peut également être bouilli dans une casserole d'eau.

- Porter l'eau à ébullition.
- Insérez l'embout buccal à l'aide d'une cuillère et assurez-vous qu'il soit complètement recouvert d'eau.
- Laisser l'embout buccal dans l'eau bouillante pendant au moins 5 minutes.
- Retirez délicatement l'embout de la casserole à l'aide d'une cuillère et laissez-le sécher et refroidir.

Fonctionnalités de l'IntegraMouse AIR

La souris IntegraMouse AIR propose trois modes de fonctionnement, le mode standard étant le mode souris.

	Souris	Clavier	Manette de jeu
Déplacer l'embout buccal : <ul style="list-style-type: none"> • en haut • vers le bas • À gauche • À droite 			
Aspirer	clic gauche 	Espace 	Bouton 1 
Souffler	clic droit 	Entrer 	Bouton 2 
Microphone	Remarque : Un microphone est situé sur la face inférieure. Il ne peut être utilisé qu'en mode filaire.		
Calibrage : Appuyez sur le bouton de la lèvre droite pendant 3 secondes	Toutes les LED clignotent simultanément.  Veuillez ne pas toucher l'embout buccal.		
Changer d'appareil : Appuyez brièvement sur le bouton situé sur la lèvre gauche	1 câble 3x Bluetooth		
Changer de mode : Appuyez brièvement sur le bouton de la lèvre droite	 Souris	 Clavier	 Manette de jeu
Rappel : changement d'embout buccal	La LED 0 clignote en orange. Appuyez simultanément sur les deux boutons situés sur les lèvres pour réinitialiser le minuteur.		
Avertissement de batterie faible	Lorsque la batterie est faible en mode sans fil, les LED 1, 2 ou 3 commencent à clignoter en orange.		
Éteindre : Appuyez sur le bouton situé à droite pendant 6 secondes	Remarque : IMAIR doit être activé (LED allumée). Appuyez jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent.		



Pour accéder à davantage d'options et de fonctions de configuration, veuillez télécharger l'application de configuration gratuite depuis le site web d'IntegraMouse à l'adresse www.integramouse.com. Vous y trouverez des informations et des configurations supplémentaires utiles.