



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UKCA FC

VERSJON
// 1.1

IntegraMouse®AIR Hurtigguide

integramouse.com



Norsk (NO)



**Oppstart,
Bruk og Rengjøring**

Oppstart

Montering av IntegraMouse® AIR

1.



Sett inn munnstykket, og vær oppmerksom på ledestiftet og føringssporet.

2.



Trykk lett og vri munnstykket mot klokken til det klikker på plass.

3.



Fest IMAIR til monteringsystemet ditt (1/4" gjenger).

4.



Sett IMAIR i ønsket arbeidsposisjon.

Ved bruk første gang anbefaler vi drift med kabeltilkobling.

5.



Koble kabelen til USB-C-kontakten på baksiden av IMAIR.

6.




Koble USB-kabelen til datamaskinen (USB-A-kontakt).

7.



Trykk kort på høyre leppebryter for å skru på IMAIR.

8.

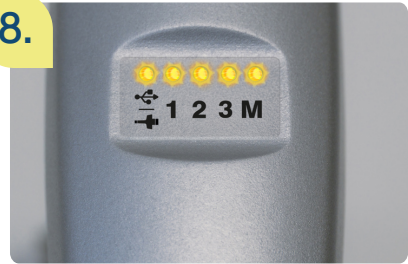

Alle LED-lampene lyser kort, og IMAIR kalibrerer seg selv automatisk.

9.



Den venstre LED-lampen lyser (kabeltilkobling). Den høyre LED-lampen (M) er av (musmodus).



**Ikke berør
IntegraMouse
AIR under
kalibreringen!**

Alle videre trinn utføres automatisk:

Det interne batteriet lades.

- Datamaskinen din installerer IntegraMouse AIR som standardmus.

Hurtigveiledning for oppstart av trådløs modus

(Paring via Bluetooth)



For å bruke IntegraMouse AIR med Bluetooth, må du sørge for at batteriet er tilstrekkelig ladet. Bruk den medfølgende laderen og lad batteriet før du bruker den for første gang.

1.



Trykk kort på høyre leppebryter for å slå på IMAIR.

2.



Alle LED-lampene blinker kort, og IMAIR kalibrerer seg selv.

3.



Den venstre LED-en lyser.

4.



Hold venstre leppebryter inntrykket i 3 sekunder.

5.



LED 1 begynner å blinke.

6.




Velg ønsket posisjon (1, 2 eller 3) ved å trykke på venstre leppebryter.

7.



Vent kort til den valgte LED-lampen blinker blått.

8.

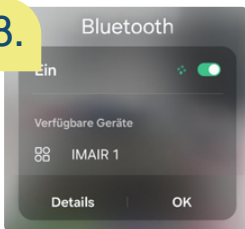

Start enhetstilkobling på enheten som skal tilkobles og velg IntegraMouse AIR xxxx.

9.



Hvis paringen er vellykket, stopper blinkingen og LED-lampen lyser oransje.

Generelle merknader om rengjøring



Bruk av IntegraMouse AIR i klinisk sektor

- I klinisk sektor skal munnstykket (inkludert membran og silikontupp) og leppehettene brukes som engangsprodukter.
- Intervallet mellom bytte av munnstykke (inkludert membran og silikontupp) og leppehetter må bestemmes av lege eller spesialistpersonell.
- Ved mistanke om smittsomme sykdommer, må du ta spesielle sikkerhetstiltak (f.eks. bruke hansker når du bytter munnstykke).

Desinfeksjon ved avtørking

- Bruk kun overflatedesinfeksjonsmidler som er egnet for LEXAN polykarbonat.
- Vi anbefaler fra Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive Liquid eller Mikrozid Sensitive Wipes eller tilsvarende produkter.



Ikke bruk våt- eller gammasterilisering

Munnstykket, leppeknappene og andre komponenter på IntegraMouse AIR må ikke rengjøres med våt- eller gammasterilisering.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler

Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, da dette vil ødelegge overflaten på komponentene.

Ikke senk ned i vann

Aldri senk IntegraMouse AIR og de elektroniske komponentene i vann, og bruk aldri rennende vann – da kan du ødelegge enheten.



Riktig rengjøring av komponenter

- Delene til IntegraMouse AIR, strømforsyningen inkludert kabel og monteringsystem kan rengjøres ved å tørke dem av med en fuktig, lofri klut.
- Rengjør komponentene annenhver uke

RENGJØRING av munnstykket og UTSKIFTING av membranen

Rengjørings- og utskiftingsintervall for munnstykket og leppehettene

Rengjøring: IntegraMouse AIR har en påminnelsesfunksjon for rengjøring og minner deg på det etter anbefalt brukstid med en blinkende LED-lampe (se side 8).

- minst én gang annenhver uke
- oftere ved sykdom

Kast:

hvis skadet eller tegn på slitasje synlige

- innen seks måneder

Utskiftingsintervall for membranen

Kast alltid membranen, rengjøring anbefales ikke.



1. Vri først munnstykket med klokken, og trekk det deretter rett av.



2. Fjern og kast membranen.



3. Rengjør munnstykket i en dampsterilisator.



4. La munnstykket tørke og avkjøles.

5.



Plasser ny membran på munnstykket.

6.



Sett inn munnstykket (merk Ledestiftet og føringssporet) og vri mot klokken med lett trykk.



**Munnstykket kan
også kokes i en kjele
med vann.**

- Kok opp vann.
- Legg i munnstykket i kjelen med en skje og sørg for at det er helt dekket med vann.
- La munnstykket ligge i det kokende vannet i minst 5 minutter.
- Ta forsiktig munnstykket ut av kjelen med en skje og la det tørke og avkjøles.

Funksjoner i IntegraMouse AIR

IntegraMouse AIR har tre driftsmoduser, standardmodus er musmodus.

	Mus	Tastatur	Gamepad
Flytt munnstykket: • opp • ned • til venstre • til høyre			
Sug	Venstreklikk 	Mellomslag 	Knapp 1 
Blås	Høyreklikk 	Enter 	Knapp 2 
Mikrofon	Merk: Det er en mikrofon på undersiden. Denne kan bare brukes i kabelmodus.		
Kalibrer: Trykk på høyre leppebryter i 3 sekunder	Alle LED-lampene blinker samtidig.  Vennligst ikke berør munnstykket.		
Bytt enhet: Trykk kort på venstre leppebryter	1x kabel 3x Bluetooth	   	
Endre modus: Trykk kort på høyre leppebryter	 Mus	 Tastatur	 Gamepad
Påminnelse om bytte av munnstykke	LED 0 blinker oransje. Trykk på begge leppebryterne samtidig (3 sekunder) for å nullstille tiden.		
Advarsel om lavt batteri	Når batteriet er lavt i trådløs modus, begynner LED-lampene 1, 2 eller 3 å blinke oransje.		
Slå av: Trykk på høyre leppebryter i 6 sekunder	Merk: IMAIR må være aktiv (LED-lampen lyser). Trykk til alle LED-lampene er slukket.		



For ytterligere innstillingsalternativer og funksjoner, last ned innstillingsappen gratis fra IntegraMouse-nettstedet på www.integramouse.com. Der finner du ytterligere nyttig informasjon og konfigurasjoner.