



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC

VERSION
// 1.1

IntegraMouse® AIR

Stručný návod

integramouse.com



Čeština (CZ)



**Zprovoznění, čištění
a použití**

Uvedení do provozu

Sestava IntegraMouse AIR

1.



Zasuňte náustek a věnujte pozornost správné pozici čepu a drážky.

2.



Lehce zatlačte a otáčejte náustkem proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

3.



Připevněte IMAIR k montážnímu systému (se závitem 1/4").

4.



Umístěte IMAIR podle potřeby.

Pro počáteční nastavení doporučujeme provoz s kabelovým připojením.

5.



Zapojte kabel do portu USB-C na zadní straně zařízení IMAIR.

6.



Zapojte kabel USB do počítače (zásuvka USB-A).

7.


Krátkým stisknutím pravého tlačítka pro dolní ret zapnete IMAIR.

8.


Všechny LED diody se krátce rozsvítí; IMAIR se automaticky kalibruje.

9.


Levá LED svítí (připojení kabelu). Pravá LED (M) nesvítí (režim myši).



**Během kalibrace
se prosím
nedotýkejte
náustku!**

Následující kroky proběhnou automaticky:

- Vnitřní baterie se nabíjí.
- Váš počítač nainstaluje IntegraMouse AIR jako výchozí myš.

Stručný průvodce nastavením bezdrátové sítě

(Párování přes Bluetooth)



Chcete-li používat IntegraMouse AIR s Bluetooth, ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá. Před prvním použitím použijte dodanou nabíječku a baterii nabijte.

1.



Krátce stiskněte pravé tlačítko pro dolní ret zapnete IMAIR.

2.



Všechny LED diody se krátce rozsvítí, IMAIR se kalibruje.

3.



Levá LED dioda svítí.

4.



Stiskněte levé tlačítko pro dolní ret po dobu 3 sekund.

5.



LED 1 začne blikat oranžově.

6.




Vyberte požadovaný stav (1, 2 nebo 3) stisknutím levého tlačítka pro dolní ret.

7.



Chvilí počkejte, dokud vybraná LED dioda nezačne modře blikat.

8.

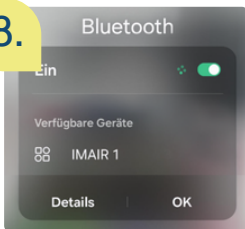

Spustíte vyhledávání zařízení na koncovém zařízení a vyberte IMAIR.

9.



Pokud je párování úspěšné, blikání přestane a LED se rozsvítí oranžově.

Obecné pokyny k čištění



Použití IntegraMouse AIR v klinickém prostředí

- V klinickém prostředí se náustek (včetně membrány a silikonového nástavce) a spínače pro dolní ret, používají jako jednorázové výrobky.
- Intervaly výměny náustku (včetně membrány a silikonového nástavce) a spínačů určuje kvalifikovaný personál nebo lékař.
- Pokud máte podezření na infekční onemocnění, dodržujte prosím další bezpečnostní opatření (např. při výměně náustku použijte rukavice).

Dezinfekce ubrouskem

- Použijte pouze povrchové dezinfekční prostředky vhodné pro polykarbonát LEXAN.
- Doporučujeme následující produkty od firmy Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive Liquid; Mikrozid Sensitive Wipes nebo ekvivalentní produkty.



Nepoužívejte mokrou ani gama sterilizaci.

Náustek, tlačítka pro dolní ret a další součásti IntegraMouse AIR se nesmí čistit mokrou sterilizací ani gama sterilizací.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu součástí.

Neponořujte do vody

Nikdy IntegraMouse AIR a její elektronické součásti neponořujte do vody a k čištění nikdy nepoužívejte tekoucí vodu – mohlo by dojít k trvalému poškození elektroniky.



Správné čištění součástí

- Otřete komponenty myši IntegraMouse AIR, napájecí zdroj včetně kabelu a stativ mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
- Čistěte součásti alespoň jednou za dva týdny.

Stručný návod: Čištění náustku a výměna membrány

Interval čištění a likvidace náustku a spínačů pro dolní ret

Čištění: Myš IntegraMouse AIR má zabudovanou funkci připomenutí čištění. Po uplynutí doporučené doby používání vás na uplynutí této doby upozorní blikající LED diodou (viz str. 8).

- alespoň jednou za dva týdny
- častěji v případě nemoci

Likvidace:

- v případě poškození nebo známek opotřebení
- nejpozději po šesti měsících

Interval likvidace membrány

Membránu vždy řádně zlikvidujte. Čištění membrány se důrazně nedoporučuje.



Nejprve otočte náustek ve směru hodinových ručiček a poté jej rovně stáhněte.



Odstraňte a zlikvidujte membránu.



Vařte v parním sterilizátoru



Osušte náustek a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.

5.


Nasadte novou membránu na náustek

6.


Vložte náustek (dbejte na správnou pozici čepu a drážky) a lehkým tlakem jím otáčejte proti směru hodinových ručiček.



**Náustek lze také
vařit v hrnci s vodou.**

- Přiveďte vodu k varu.
- Vložte náustek do hrnce pomocí lžice a ujistěte se, že je zcela ponořený do vody.
- Nechte jej 5 minut louhovat ve vroucí vodě.
- Pak jej opatrně pomocí lžice vyjměte z hrnce.

Funkce myši IntegraMouse AIR

IntegraMouse AIR nabízí 3 provozní režimy; standardním režimem je režim myši.

	Myš	Klávesnice	Gamepad
Pohyb náustku: • nahoru • dolů • doleva • doprava			
Sání (vdech)	Levý klik 	Mezera 	Tlačítko1 
Fouknutí (výdech)	Pravý klik 	Enter 	Tlačítko2 
Mikrofon	Poznámka: Na spodní straně je mikrofon. Ten lze použít pouze tehdy, když je zařízení připojeno kabelem.		
Kalibrace: Stiskněte po dobu 3 sekund pravé tlačítko pro dolní ret	Všechny LED diody blikají současně.  Nedotýkejte se prosím náustku.		  1 2 3 M
Přepínání zařízení: Krátce stiskněte levé tlačítko pro dolní ret	1x kabel 3x Bluetooth	 1 2 3 M  1 2 3 M  1 2 3 M  1 2 3 M	
Přepnout režim: Krátce stiskněte pravé tlačítko pro dolní ret.	 Myš	 Klávesnice	 Gamepad
Připomenutí výměny náustku	LED 0 bliká oranžově. Současným stisknutím obou tlačítek pro spodní ret (po dobu 3 sekund) vynulujete časovač.		  1 2 3 M
Upozornění na vybitou baterii	Pokud je v bezdrátovém režimu úroveň nabití baterie nízká, začnou LED diody 1, 2 nebo 3 blikat oranžově.		  1 2 3 M
Vypnutí: Stiskněte a podržte pravé tlačítko pro dolní ret po dobu 6 sekund.	Poznámka: IMAIR musí být aktivní (LED svítí). Stiskněte a podržte, dokud všechny LED nezasnou.		



Pro další nastavení a funkce si prosím stáhněte bezplatnou aplikaci **IntegraMouse Control** z našich internetových stránek: www.integramouse.com. Najdete tam také další užitečné informace a možnosti konfigurace.