



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC

VERSION
// 1.1

IntegraMouse® AIR Pikaopas

integramouse.com



Suomi (SF)



**Käyttöönotto,
puhdistus ja käyttö**

Käyttöönotto

IntegraMouse AIR -kokoonpano

1.



Aseta suukappale paikalleen kiinnittäen huomiota tappiin ja ohjaimeen.

2.



Paina suukappaletta kevyesti ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3.



Kiinnitä IMAIR kiinnitysjärjestelmään (1/4 tuuman kierre).

4.



Aseta IMAIR haluamaasi paikkaan.

Alkuasennuksessa suosittelemme käyttöä langallisen yhteyden kautta.

5.



Kytke kaapeli IMAIR-laitteen takana olevaan USB-C-porttiin.

6.




Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen (USB-A-liitäntä).

7.



Käynnistä IMAIR painamalla lyhyesti oikeanpuoleista painiketta.

8.

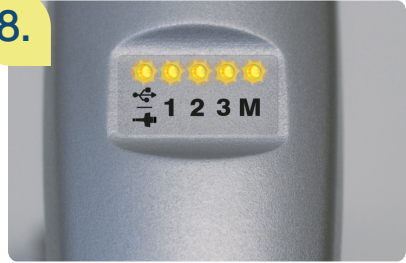

Kaikki merkkivalot syttyvät lyhyesti; IMAIR kalibroi itsensä automaattisesti.

9.



Vasen LED-valo palaa (kaapeliyhteys). Oikea LED-valo (M) on sammunut (hiiritila).



Älä koske
suokappaleeseen
kalibroinnin
aikana!

Seuraavat vaiheet tapahtuvat automaattisesti:

- Sisäinen akku latautuu.
- Tietokoneesi asentaa IntegraMouse AIRin oletushiireksi.

Pikaopas Langattoman yhteyden INTEGRA TOOLS asennukseen

(Pariliitos Bluetoothin kautta)



Jotta voit käyttää IntegraMouse AIR -hiirtä Bluetooth-yhteydellä, varmista, että akussa on riittävästi virtaa. Käytä mukana toimitettua laturia ja lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1.



Paina lyhyesti oikeanpuoleista huulipainiketta (käynnistääksesi IMAIRin).

2.



Kaikki LEDit syttyvät lyhyesti, IMAIR kalibroituu.

3.



Vasen LED-valo palaa.

4.



Paina vasemman huulen painiketta 3 sekunnin ajan.

5.



LED 1 alkaa vilkkua oranssina.

6.




Valitse haluttu asento (1, 2 tai 3) painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

7.



Odota hetki, kunnes valittu LED-valo vilkkuu sinisenä.

8.

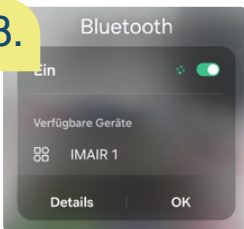

Aloita laitehaku päätelaitteesta ja valitse IMAIR.

9.



Kun pariliitos on valmis, oranssi valo palaa tasaisesti.



IntegraMouse AIR -hiiren käyttö kliinisissä olosuhteissa

- Kliinisissä olosuhteissa suukappaletta (mukaan lukien kalvo ja silikonikiinnike) ja huulipainikkeita käytetään kertakäyttöisinä tuotteina.
- Suukappaleen (mukaan lukien kalvo ja silikonikiinnike) ja huulipainikkeiden vaihtovälit määrittää pätevä henkilöstö tai lääkäri.
- Jos epäilet, että sinulla on tartuntatauti, ryhdy lisävarotoimiin (esim. käytä käsineitä suukappaletta vaihtaessasi).

Pyyhi desinfiointi

- Käytä vain LEXAN-polykarbonaatille sopivia pinnan desinfiointiaineita.
- Suosittelemme seuraavia Schülke & Mayrin tuotteita (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive Liquid; Mikrozid Sensitive Wipes tai vastaavia tuotteita.



Älä käytä märkä- tai gammasterilointia.

IntegraMouse AIR -hiiren suukappaletta, huulipainikkeita ja muita osia ei saa puhdistaa märkä- tai gammasteriloinnilla.

Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat komponenttien pintaa.

Älä upota veteen

Älä koskaan upota IntegraMouse AIR -hiirtä tai sen elektronisia komponentteja veteen äläkä koskaan käytä juoksevaa vettä puhdistukseen – se vahingoittaa elektroniikkaa pysyvästi.



Osien asianmukainen puhdistus

- Pyyhi IntegraMouse AIR -hiiren osat, virtalähde kaapeli mukaan lukien ja jalusta kevyesti kostealla, nukkaamattomalla liinalla.
- Puhdista osat vähintään kerran kahdessa viikossa.

Pikaopas: Suukappaleen puhdistus ja kalvon vaihto

Suukappaleen ja huulipainikkeiden puhdistus- ja hävitysväli

Puhdistus: IntegraMouse AIR -hiiressä on puhdistusmuistutustoiminto, joka muistuttaa sinua suositellun käyttöajan jälkeen vilkkuvalla LED-valolla (katso s. 8).

- vähintään kerran kahdessa viikossa
- useammin sairauden sattuessa

Hävitä:

- havaitessasi vaurioita tai kulumisen merkkejä
- viimeistään kuuden kuukauden kuluttua

Kalvon hävitysväli

Hävitä kalvo aina asianmukaisesti. Puhdistusta ei suositella.

1.



Käännä suukappaletta ensin myötäpäivään ja vedä se sitten suoraan irti.

2.



Irrota ja hävitä kalvo.

3.



Keitä höyrysterilointilaitteessa

4.



Kuivaa suukappale ja anna sen jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

5.



Aseta uusi kalvo suukappaleen päälle

6.



Aseta suukappale (huomioi tapit ja ohjaimet) ja käännä sitä vastapäivään kevyesti painamalla.



Suukappaleen voi
myös keittää
kattilassa vedessä.

- Kiehauta vesi
- Aseta suukappale kattilaan lusikan avulla ja varmista, että se on kauttaaltaan veden alla.
- Anna kiehuvan veden hautua vähintään 5 minuuttia.
- Nosta suukappale varovasti lusikalla kattilasta.

IntegraMouse AIRin toiminnot

IntegraMouse AIR tarjoaa kolme käyttötilaa; vakiotila on hiiritila.

	Hiiri	Näppäimistö	Gamepad
Suokappaleen siirtäminen: • ylös • alaspäin • vasemmalle • Oikealle			
Imu	Vasen klikkaus	Välilyönti	Painike 1
Puhallus	Oikea klikkaus	Enter	Painike 2
Mikrofoni	Huom: Laitteen alapinnassa oleva mikrofoni toimii vain laitteen ollessa kaapeliyhteydessä.		
Kalibroi: Oikean huulen painike Paina 3 sekuntia	Kaikki LED-valot vilkkuvat samanaikaisesti. ⚠ Älä koske suokappaleeseen.		
Laitteiden vaihtaminen: Paina lyhyesti vasemmanpuoleista painiketta	1x Kaapeli 3 Bluetooth-liitäntää		
Kytkintila: Paina lyhyesti oikeanpuoleista huulipainiketta.	 Hiiri	 Näppäimistö	 Gamepad
Muistutus suokappaleen vaihdosta	LED O vilkkuu oranssina. Nollaa ajastin painamalla molempia huulipainikkeita samanaikaisesti (3 sekuntia).		
Alhaisen akun varoitus	Kun akun varaustaso on heikko langattomassa tilassa, LED-valot 1, 2 tai 3 alkavat vilkkua oranssina.		
Sammuttaminen: Paina oikeanpuoleista painiketta ja pidä sitä painettuna 6 sekunnin ajan.	"Huomautus: IMAIRin on oltava aktiivinen (LED-valo palaa). Paina ja pidä pohjassa, kunnes kaikki LED-valot sammuvat."		



Saat lisäasetuksia ja -toimintoja lataamalla ilmaisen asetussovelluksen IntegraMousen verkkosivustolta osoitteesta www.integramouse.com. Sieltä löydät lisää hyödyllistä tietoa ja määrittäsvaihtoehtoja.