



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly LIFEtool
Solutions



VERSIONE
// 1.0

IntegraMouse[®] AIR Guida rapida

integramouse.com



Italiano (IT)



**Messa in servizio,
pulizia e controllo**

Messa in servizio

Montaggio di IntegraMouse AIR

1.



Inserire il bocchino prestando attenzione al perno guida e alla fessura guida.

2.



Esercitare una leggera pressione e ruotare il bocchino in senso antiorario finché non scatta in posizione.

3.



Fissare l'IMAIR al sistema di montaggio (filettatura da 1/4").

4.



Portare l'IMAIR nella posizione di lavoro desiderata.

Per la prima messa in funzione consigliamo il funzionamento tramite collegamento via cavo.

5.



Collegare il cavo alla presa USB-C sul retro dell'IMAIR.

6.



Collegare il cavo USB al computer (presa USB-A).

7.


Premere brevemente il pulsante destro per accendere l'IMAIR.

8.


Tutti i LED si accendono brevemente e l'IMAIR si calibra automaticamente.

9.


Il LED sinistro si accende (connessione via cavo). Il LED destro (M) è spento (modalità mouse).



**Non toccare
IntegraMouse
AIR durante la
calibrazione!**

Tutti gli ulteriori passaggi vengono eseguiti automaticamente:

La batteria interna è in carica.

- Il computer installa IntegraMouse AIR come mouse standard.

Guida rapida alla messa in servizio in modalità wireless

(Associazione tramite Bluetooth)



Per utilizzare IntegraMouse AIR con Bluetooth, assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica. A tal fine, utilizzare il caricabatterie in dotazione e caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

1.



Premere brevemente il pulsante destro per accendere l'IMAIR.

2.




Tutti i LED lampeggiano brevemente e l'IMAIR si calibra automaticamente.

3.



Il LED sinistro si accende.

4.

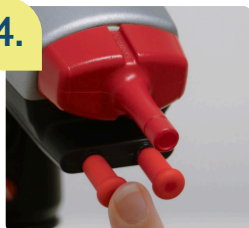

Premere il pulsante sul labbro sinistro per 3 secondi.

5.



Il LED 1 inizia a lampeggiare.

6.




Selezionare la posizione desiderata (1, 2 o 3) premendo il pulsante sinistro.

7.



Attendere brevemente finché il LED selezionato non lampeggia in blu.

8.

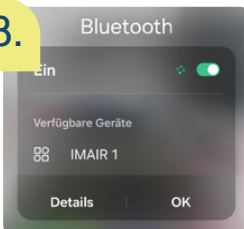

Avviare la ricerca del dispositivo sul dispositivo finale e selezionare IMAIR.

9.



Se l'associazione è riuscita, il lampeggiamento cessa e il LED si illumina di arancione.

Note generali sulla pulizia



Utilizzo di IntegraMouse AIR nel settore clinico

- Nel settore clinico utilizzare il boccaglio (compresa la membrana e il tubo in silicone) e i pulsanti labiali come prodotti monouso
- L'intervallo tra i cambi del boccaglio (compresa la membrana e il tubo in silicone) e dei pulsanti labiali deve essere determinato da un medico o da personale specializzato
- In caso di sospetta malattia infettiva, adottare particolari precauzioni di sicurezza (ad esempio, indossare i guanti quando si cambia il boccaglio).

Disinfezione tramite strofinamento

- Utilizzare solo disinfettanti per superfici adatti al polycarbonato LEXAN.
- Consigliamo da Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive Liquid o Mikrozid Sensitive Wipes o prodotti equivalenti.



Non utilizzare sterilizzazione a umido o a raggi gamma

Il boccaglio, i pulsanti labiali e gli altri componenti dell'IntegraMouse AIR non devono essere puliti con sterilizzazione a umido o a raggi gamma.

Non utilizzare detergenti aggressivi

Non utilizzare mai detergenti aggressivi, poiché potrebbero danneggiare la superficie dei componenti.

Non immergere in acqua

Non immergere mai l'IntegraMouse AIR e i suoi componenti elettronici in acqua e non utilizzare mai acqua corrente, altrimenti potresti distruggere il dispositivo.



Pulizia corretta dei componenti

- Le parti di IntegraMouse AIR, l'alimentatore incluso il cavo e il sistema di montaggio possono essere pulite con un panno umido e privo di lanugine.
- Pulire i componenti una volta ogni due settimane

PULIZIA del bocchino e SOSTITUZIONE della membrana

Intervallo di pulizia e smaltimento del bocchino e dei pulsanti labiali

Pulizia: IntegraMouse AIR è dotato di una funzione di promemoria per la pulizia e, dopo il periodo di utilizzo consigliato, vi ricorda tramite un LED lampeggiante (vedere pagina 8).

- almeno una volta ogni due settimane
- più spesso in caso di malattia

Smaltire:

- se danneggiato o segni di usura visibili
- entro sei mesi

Intervallo di smaltimento della membrana

Smaltire sempre la membrana, non è consigliata la pulizia.



Per prima cosa ruotare il bocchino in senso orario e poi tirarlo via dritto.



Rimuovere e smaltire la membrana.



Pulire il bocaglio in uno sterilizzatore a vapore.



Lasciare asciugare e raffreddare il bocchino.

5.



Posizionare la nuova membrana sul bocchino.

6.



Inserire il bocchino (notare il perno guida e la fessura guida) e ruotare in senso antiorario esercitando una leggera pressione.






















Il bocchino può anche essere fatto bollire in una pentola con acqua.

- Portare l'acqua a ebollizione.
- Inserire il bocaglio con un cucchiaino e assicurarsi che sia completamente coperto d'acqua.
- Lasciare il bocaglio nell'acqua bollente per almeno 5 minuti.
- Con un cucchiaino, rimuovere con cautela il bocchino dalla pentola e lasciarlo asciugare e raffreddare.

Funzionalità di IntegraMouse AIR

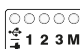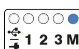IntegraMouse AIR offre tre modalità operative, la modalità standard è la modalità mouse.

	Mouse	Tastiera	Gamepad
Spostare il bocchino: <ul style="list-style-type: none"> Sono giù A sinistra A destra 			
Succhiare	Clic sinistro 	Spazio 	Pulsante 1 
Soffia	Clic destro 	Entra 	Pulsante 2 
Microfono	Nota: nella parte inferiore è presente un microfono. Può essere utilizzato solo in modalità cavo.		
Calibrazione: premere il pulsante destro per 3 secondi	Tutti i LED lampeggiano simultaneamente.  Si prega di non toccare il bocchino. 		
Cambia dispositivo: premere brevemente il pulsante sinistro	1x cavo 3x Bluetooth   		
Cambia modalità: premere brevemente il pulsante destro	 Mouse	 Tastiera	 Gamepad
Promemoria per la sostituzione del bocchino	Il LED 0 lampeggia in arancione. Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti labiali per reimpostare il timer. 		
Avviso di batteria scarica	Quando la batteria è scarica in modalità wireless, i LED 1, 2 o 3 iniziano a lampeggiare in arancione. 		
Spegnimento: premere il pulsante destro per 6 secondi	Nota: IMAIR deve essere attivo (LED illuminato). Premere finché tutti i LED non si spengono.		



Per ulteriori opzioni e funzioni di impostazione, scaricare l'app gratuita per le impostazioni dal sito web di IntegraMouse all'indirizzo www.integramouse.com. Qui troverete ulteriori informazioni e configurazioni utili.