



**INTEGRA  
TOOLS**

Formerly  
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC VERSION // 1.1

# IntegraMouse<sup>®</sup> AIR Snabbguide

integramouse.com



Svenska (SV)



Driftsättning, rengöring och  
användning

# Driftsättning

## IntegraMouse AIR-montering

1.



Sätt i munstycket och var uppmärksam på tappen och styrningen.

2.



Tryck lätt och vrid munstycket moturs tills det klickar på plats.

3.



Fäst IMAIR på ditt monteringsystem (1/4" gänga).

4.



Placera IMAIR enligt dina behov.

För den första installationen rekommenderar vi användning med en trådbunden anslutning.

5.



Anslut kabeln till USB-C-porten på baksidan av IMAIR.

6.




Anslut USB-kabeln till datorn (USB-A-uttag).

7.



Tryck kort på höger läppknapp för att slå på IMAIR.

8.

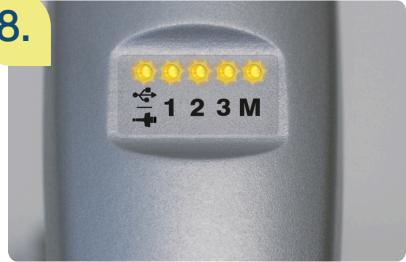

Alla lysdioder tänds kort; IMAIR kalibrerar sig själv automatiskt.

9.



Den vänstra lysdioden lyser (kabelanslutning). Den högra lysdioden (M) är släckt (musläge).



Rör inte  
munstycket  
under  
kalibreringen!

Följande steg sker automatiskt:

- Det interna batteriet laddas.
- Din dator kommer att installera IntegraMouse AIR som standardmus.

# Snabbguide till trådlös installation

## (Parkoppling via Bluetooth)



För att använda IntegraMouse AIR med Bluetooth, se till att batteriet är tillräckligt laddat. Använd den medföljande laddaren och ladda batteriet före första användningen.

1.



Tryck kort på höger läppsknapp (för att slå på IMAIR).

2.




Alla lysdioder tänds kort, IMAIR kalibrerar.

3.



Den vänstra lysdioden lyser.

4.

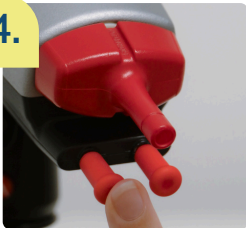

Tryck på vänster läppsknapp i 3 sekunder.

5.



Lysdiod 1 börjar blinka orange.

6.




Välj önskad position (1, 2 eller 3) genom att trycka på vänster läppsknapp.

7.



Vänta en stund tills den valda lysdioden blinkar blått.

8.

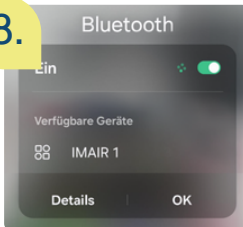

Starta enhetssökningen på enheten, välj IMAIR.

9.



Om parkopplingen lyckas slutar blinkningen och lysdioden lyser orange.

# Allmänna rengöringsinstruktioner



## Användning av IntegraMouse AIR i kliniska miljöer

- I kliniska miljöer ska munstycket (inklusive membran och silikonfäste) och läppknapparna användas som engångsprodukter.
- Utbytesintervallen för munstycket (inklusive membran och silikonfäste) och läppknapparna bestäms av kvalificerad personal eller läkaren.
- Om du misstänker att du har en infektionssjukdom, vänligen vidta ytterligare säkerhetsåtgärder (t.ex. använd handskar när du byter munstycke).

## Ytdesinfektion

- Använd endast ytdesinfektionsmedel som är lämpliga för LEXAN polykarbonat.
- Vi rekommenderar följande produkter från Schülke & Mayr ([www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)): Mikrozyd Sensitive Liquid; Mikrozyd Sensitive Wipes eller motsvarande produkter.



## Använd inte våtsterilisering eller gammasterilisering.

Munstycket, läppknapparna och andra komponenter på IntegraMouse AIR får inte rengöras med våtsterilisering eller gammasterilisering.

## Använd inte starka rengöringsmedel.

Använd aldrig starka rengöringsmedel, eftersom det skadar komponenternas yta.

## Doppa inte i vatten

Doppa aldrig IntegraMouse AIR och dess elektroniska komponenter i vatten och använd aldrig rinnande vatten för rengöring – det skadar elektroniken permanent.



## Korrekt rengöring av komponenterna

- Torka av IntegraMouse AIR-komponenterna, nätaggregatet inklusive kabel och monteringsystem med en lätt fuktig, luddfri trasa.
- Rengör komponenterna minst en gång varannan vecka.

# Snabbguide: Rengöring av munstycket och byte av membran

## 1 Rengörings- och avfallsintervall för munstycke och läppknappar

**Rengöring:** IntegraMouse AIR har en rengöringspåminnefunktion och påminner dig efter den rekommenderade användningstiden med en blinkande lysdiod (se s. 8).

- minst en gång varannan vecka
- oftare vid sjukdom

### Kassera:

- vid skador eller tecken på slitage
- senast efter sex månader

## Intervall för membranbortskaffning

Kassera alltid membranet på rätt sätt. Rengöring avråds starkt.



Vrid först munstycket medurs och dra det sedan rakt av.



Ta bort och kassera membranet.



Koka i en ångsterilisator.



Torka munstycket och låt det svalna till rumstemperatur.

5.



Placera ett nytt membran på munstycket.

6.



Sätt i munstycket (observera tappen och styrningen) och vrid det moturs med lätt tryck.














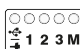
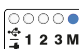





Munstycket kan också kokas i en kastrull med vatten.

- Koka upp vatten.
- Placera munstycket i kastrullen med en sked och se till att det är helt täckt av vatten.
- Låt ligga i kokande vatten i minst 5 minuter.
- Ta sedan försiktigt upp det ur grytan med en sked.

# Funktioner hos IntegraMouse AIR

IntegraMouse AIR erbjuder 3 driftlägen; standardläget är musläge.

	Mus	Tangentbord	Gamepad
Flytta munstycket: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uppåt</li> <li>• nedåt</li> <li>• till vänster</li> <li>• till höger</li> </ul>			
Sug	Vänsterklick 	Mellan-slag 	Knapp 1 
Blås	Högerklick 	Enter 	Knapp 2 
Mikrofon	Obs: Det finns en mikrofon på undersidan. Denna kan endast användas när enheten är ansluten med kabel.		
Kalibrera: Höger läppknapp Tryck i 3 sekunder	Alla lysdioder blinkar samtidigt.  Rör inte vid munstycket.		
Växla enhet: Tryck kort på vänster läppknapp.	1x kabel 3x Bluetooth		
Växlingsläge: Tryck kort på höger läppknapp.	 Mus	 Tangentbord	 Gamepad
Påminnelse om att byta munstycke	Lysdiod 0 blinkar orange. Tryck på båda läppknapparna samtidigt (3 sekunder) för att återställa timern.		
Varning för lågt batteri	När batterinivån är låg i trådlöst läge börjar lysdioderna 1, 2 eller 3 blinka orange.		
För att stänga av: Tryck och håll ner höger läppknapp i 6 sekunder.	Obs: IMAIR måste vara aktiv (lysdioden lyser). Tryck och håll intryckt tills alla lysdioder släcks.		



För ytterligare inställningar och funktioner, vänligen ladda ner den kostnadsfria inställningsappen från IntegraMouses webbplats på [www.integramouse.com](http://www.integramouse.com). Där hittar du ytterligare användbar information och konfigurationsalternativ.