



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC

VERSION
// 1.1

IntegraMouse[®] AIR Hurtigguide

integramouse.com



Dansk (DK)



**Idriftsættelse,
rengøring og brug**

Idriftsættelse

IntegraMouse AIR-samling

1.



Sæt mundstykket i, og vær opmærksom på tappen og føringen.

2.



Tryk let på mundstykket, og drej det mod uret, indtil det klikker på plads.

3.



Fastgør IMAIR til dit monteringsystem (1/4" gevind).

4.



Placer IMAIR som ønsket.

Til den første opsætning anbefaler vi drift med en kabelforbindelse.

5.



Sæt kablet i USB-C-porten på bagsiden af IMAIR.

6.




Sæt USB-kablet i computeren (USB-A-stik).

7.



Tryk kort på den højre læbeknap for at tænde IMAIR.

8.

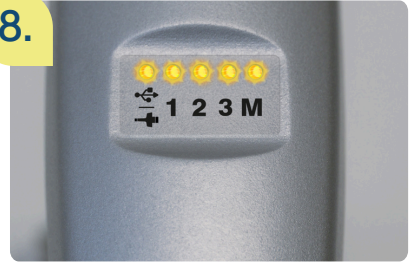

Alle LED'er lyser kortvarigt; IMAIR kalibrerer sig selv automatisk.

9.



Den venstre LED lyser (kabelforbindelse).
Den højre LED (M) er slukket (musetilstand).



Rør venligst ikke
ved mundstykket
under
kalibreringen!

Følgende trin sker automatisk:

- Det interne batteri oplades.
- Din computer vil installere IntegraMouse AIR som standardmus.

Hurtig guide til trådløs opsætning

(Parring via Bluetooth)



For at bruge IntegraMouse AIR med Bluetooth skal du sørge for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet. Brug den medfølgende oplader, og oplad batteriet før første brug.

1.



Tryk kort på den højre læbeknap (for at tænde IMAIR).

2.



Alle LED'er lyser kortvarigt, IMAIR kalibrerer.

3.



Den venstre LED lyser.

4.



Tryk på venstre læbeknap i 3 sekunder.

5.



LED 1 begynder at blinke orange.

6.




Vælg den ønskede position (1, 2 eller 3) ved at trykke på venstre læbeknap.

7.



Vent et øjeblik, indtil den valgte LED blinker blå.

8.

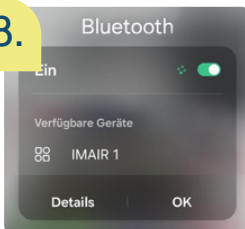

Start enhedssøgningen på slutenheden, og vælg IMAIR.

9.



Hvis parringen lykkes, stopper blinkningen, og LED-lampen lyser orange.

Generelle rengøringsinstruktioner



Brug af IntegraMouse AIR i kliniske omgivelser

- I kliniske omgivelser skal mundstykket (inklusive membran og silikonetilbehør) og læbeknapperne anvendes som engangsprodukter.
- Udskiftningsintervallerne for mundstykket (inklusive membran og silikonetilbehør) og læbeknapperne bestemmes af kvalificeret personale eller lægen.
- Hvis du har mistanke om, at du har en infektionssygdom, skal du tage yderligere sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. bruge handsker, når du skifter mundstykket).

Desinfektion af tørklude

- Brug kun overfladedesinfektionsmidler, der er egnede til LEXAN polycarbonat.
- Vi anbefaler følgende produkter fra Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozyd Sensitive Liquid; Mikrozyd Sensitive Wipes eller tilsvarende produkter.



Brug ikke våd- eller gammasterilisering.

Mundstykket, læbeknapperne og andre komponenter på IntegraMouse AIR må ikke rengøres ved våd- eller gammasterilisering.

Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, da dette vil beskadige komponenternes overflade.

Må ikke nedsænkes i vand

Dyp aldrig IntegraMouse AIR og dens elektroniske komponenter i vand, og brug aldrig rindende vand til rengøring – dette vil beskadige elektronikken permanent.



Korrekt rengøring af komponenterne

- Tør IntegraMouse AIR-komponenterne, strømforsyningen inklusive kabel og monteringsystem af med en let fugtig, fnugfri klud.
- Rengør komponenterne mindst én gang hver anden uge.

Lynguide: Rengøring af mundstykket og udskiftning af membranen

Rengørings- og bortskaffelsesinterval for mundstykke og læbeknapper

Rengøring: IntegraMouse AIR har en rengøringspåmindelsesfunktion og giver dig en påmindelse efter den anbefalede brugstid med en blinkende LED (se s. 8).

- mindst én gang hver anden uge
- oftere i tilfælde af sygdom

Bortskaf:

- i tilfælde af skader eller tegn på slid
- senest efter seks måneder

Interval for bortskaffelse af membran

Bortskaf altid membranen korrekt. Rengøring frarådes kraftigt.

1.



Drej først mundstykket med uret, og træk det derefter lige af.

2.



Fjern og bortskaf membranen.

3.



Kog i en dampsterilisator

4.



Tør mundstykket og lad det køle af til stuetemperatur.

5.



Sæt en ny membran på mundstykket

6.




















Sæt mundstykket i (bemærk tappen og føringen) og drej det mod uret med et let tryk.



Mundstykket kan også koges i en gryde med vand.

- Bring vand i kog
- Placer mundstykket i gryden med en ske, og sørg for, at det er helt fugtet med vand.
- Lad det ligge i kogende vand i mindst 5 minutter.
- Tag den derefter forsigtigt op af gryden med en ske.

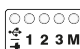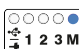IntegraMouse AIR tilbyder 3 driftstilstande; standardtilstanden er musetilstand.

	Mus	Tastatur	Gamepad
Flytning af mundstykket: <ul style="list-style-type: none"> • op • ned • til venstre • til højre 			
Sugning	Venstre-klik 	Mellemrum 	Knap 1 
Pusten	Højre-klik 	Enter 	Knap 2 
Mikrofon	Bemærk: Der er en mikrofon på undersiden. Denne kan kun bruges, når enheden er tilsluttet med kabel.		
Kalibrer: Højre læbeknap Tryk i 3 sekunder	Alle LED'er blinker samtidigt. ⓘ Rør venligst ikke ved mundstykket.		 1 2 3 M
Skift enhed: Tryk kort på venstre læbeknap.	1x Kabel 3x Bluetooth	 1 2 3 M	 1 2 3 M
Skifttilstand: Tryk kort på den højre læbeknap.	 Mus	 Tastatur	 Gamepad
Påmindelse om skift af mundstykke	LED 0 blinker orange. Tryk på begge læbeknapper samtidigt (i 3 sekunder) for at nulstille timeren.		 1 2 3 M
Advarsel om lavt batteri	Når batteriniveauet er lavt i trådløs tilstand, vil LED-lamperne 1, 2 eller 3 begynde at blinke orange.		 1 2 3 M
For at slukke: Tryk og hold den højre læbeknap nede i 6 sekunder.	Bemærk: IMAIR skal være aktiv (LED lyser). Tryk og hold nede, indtil alle LED'er er slukket.		



For yderligere indstillinger og funktioner, download venligst den gratis indstillingsapp fra IntegraMouse-webstedet på www.integramouse.com. Der finder du yderligere nyttige oplysninger og konfigurationsmuligheder.