



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC

VERSION
// 1.1

IntegraMouse[®] AIR

Guía rápida

integramouse.com



Español (ES)



**Puesta en marcha,
limpieza y control**

Puesta en marcha

Montaje de IntegraMouse AIR

1.



Inserte la boquilla, prestando atención al pasador guía y a la ranura guía.

2.



Aplique una ligera presión y gire la boquilla en sentido antihorario hasta que encaje en su lugar.

3.



Conecte el IMAIR a su sistema de montaje (rosca de 1/4").

4.



Coloque el IMAIR en la posición de trabajo deseada.

Para la primera puesta en servicio recomendamos el funcionamiento con conexión por cable.

5.



Conecte el cable al conector USB-C en el extremo trasero del IMAIR.


6.



Conecte el cable USB a la computadora (toma USB-A).

7.

Presione brevemente el botón de labio derecho para encender el IMAIR.

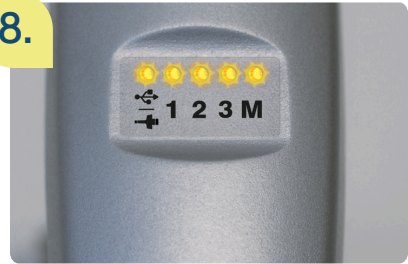8.

Todos los LED se encienden brevemente y el IMAIR se calibra automáticamente.

9.

El LED izquierdo está encendido (conexión del cable). El LED derecho (M) está apagado (modo ratón).



**¡No toque el
IntegraMouse
AIR durante la
calibración!**

Todos los demás pasos se ejecutan automáticamente:

- La batería interna se está cargando.
- Su computadora instala el IntegraMouse AIR como el ratón estándar.

Guía rápida para la puesta en servicio en modo inalámbrico

(Emparejamiento vía Bluetooth)



Para usar el IntegraMouse AIR con Bluetooth, asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada. Para ello, utilice el cargador incluido y cargue la batería antes de usarlo por primera vez.

1.



Presione brevemente el botón de labio derecho para encender el IMAIR.

2.



Todos los LED parpadean brevemente y el IMAIR se calibra automáticamente.

3.



El LED izquierdo se enciende.

4.



Presione el botón de labio izquierdo durante 3 segundos.

5.



El LED 1 comienza a parpadear.

6.




Seleccione la posición deseada (1, 2 o 3) presionando el botón de labio izquierdo.

7.



Espere brevemente hasta que el LED seleccionado parpadee en azul.

8.

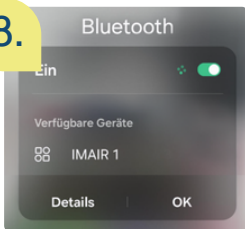

Inicie la búsqueda del dispositivo en el dispositivo final y seleccione IMAIR.

9.



Si el emparejamiento es exitoso, el parpadeo se detiene y el LED se ilumina en naranja.

Notas generales sobre la limpieza



Uso de IntegraMouse AIR en el sector clínico

- En el sector clínico utilice la boquilla (incluyendo membrana y accesorio de silicona) y los botones de labio como productos desechables.
- El intervalo entre los cambios de la boquilla (incluida membrana y accesorio de silicona) y los botones de labio debe ser determinado por un médico o por personal especializado.
- En caso de sospecha de enfermedades infecciosas, tome precauciones de seguridad especiales (por ejemplo, use guantes al cambiar la boquilla).

Desinfección mediante frotamiento

- Utilice únicamente desinfectantes de superficies adecuados para policarbonato LEXAN.
- Recomendamos de Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive Liquid o Mikrozid Sensitive Wipes o productos equivalentes.



No utilice esterilización húmeda ni gamma.

La boquilla, los botones de labio y otros componentes del IntegraMouse AIR no se pueden limpiar con esterilización húmeda o gamma.

No utilice productos de limpieza agresivos.

Nunca utilice agentes de limpieza agresivos, esto destruirá la superficie de los componentes.

No sumergir en agua

Nunca sumerja el IntegraMouse AIR ni sus componentes electrónicos en agua y nunca utilice agua corriente, ya que podría dañar el dispositivo.



Limpieza correcta de los componentes

- Las piezas del IntegraMouse AIR, el paquete de alimentación incluido el cable y el sistema de montaje se pueden limpiar con un paño húmedo que no suelte pelusa.
- Limpie los componentes una vez cada dos semanas

LIMPIEZA de la boquilla y REEMPLAZO de la membrana

Intervalo de limpieza y eliminación de la boquilla y los botones de labio

Limpieza: El IntegraMouse AIR dispone de una función de recordatorio para la limpieza y le recuerda después del período de uso recomendado mediante un LED parpadeante (ver página 8).

- al menos una vez cada dos semanas
- con mayor frecuencia en caso de enfermedad

Disponer:

- Si está dañado o hay signos de desgaste visibles
- dentro de seis meses

Intervalo de eliminación de la membrana

Deseche siempre la membrana, no se recomienda limpiarla.



Primero gire la boquilla en el sentido de las agujas del reloj y luego tire de ella hacia afuera.



Retire y deseche la membrana.



Limpie la boquilla en un esterilizador de vapor.



Deje que la boquilla se seque y se enfríe.

5.



Coloque una nueva membrana en la boquilla.

6.



Inserte la boquilla (tenga en cuenta el pasador guía y la ranura guía) y gire en sentido antihorario con una ligera presión.



La boquilla también se puede hervir en una cacerola con agua.

- Poner el agua a hervir.
- Introduzca la boquilla con una cuchara y asegúrese de que esté completamente cubierta de agua.
- Deje la boquilla en el agua hirviendo durante al menos 5 minutos.
- Retire con cuidado la boquilla de la cacerola con una cuchara y déjela secar y enfriar.

Funcionalidad de IntegraMouse AIR

El IntegraMouse AIR ofrece tres modos de funcionamiento, el modo estándar es el modo ratón.

	Ratón	Teclado	Gamepad
Mover la boquilla: • arriba • abajo • a la izquierda • a la derecha			
Succión	Clic izquierdo 	Espacio 	Botón 1 
Soplo	Clic derecho 	Intro 	Botón 2 
Micrófono	Nota: Hay un micrófono en la parte inferior. Solo se puede usar en modo cable.		
Calibrar: Presione el botón de labio derecho durante 3 segundos	Todos los LED parpadean simultáneamente.  Por favor, no toque la boquilla. 		
Cambiar dispositivo: Presione brevemente el botón de labio izquierdo	1x cable  3x Bluetooth   		
Cambiar modo: Presione brevemente el botón de labio derecho.	 Ratón	 Teclado	 Gamepad
Recordatorio de cambio de boquilla	El LED 0 parpadea en naranja. Presione ambos botones de labio simultáneamente (durante 3 segundos) para reiniciar el temporizador. 		
Advertencia de batería baja	Cuando la batería está baja en el modo inalámbrico, los LED 1, 2 o 3 comienzan a parpadear en naranja. 		
Apagado: Presione el botón de labio derecho durante 6 segundos	Nota: IMAIR debe estar activo (LED iluminado). Presione hasta que todos los LED se apaguen.		



Para más opciones y funciones de configuración, descargue la aplicación gratuita de configuración del sitio web de IntegraMouse: www.integramouse.com. Allí encontrará información útil y configuraciones adicionales.