



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC

VERSIE
// 1.1

IntegraMouse[®] AIR Snelgids

integramouse.com



Nederlands (NL)



**Inbedrijfstelling,
reiniging en besturing**

Inbedrijfstelling

Montage van IntegraMouse AIR

1.



Plaats het mondstuk en let daarbij op de geleidingspen en de geleidingsgleuf.

2.



Oefen lichte druk uit en draai het mondstuk tegen de klok in totdat het vastklikt.

3.



Bevestig de IMAIR aan uw montagesysteem (1/4" schroefdraad).

4.



Breng de IMAIR in de gewenste werkpositie.

Voor de eerste ingebruikname adviseren wij een kabelaansluiting.

5.



Steek de kabel in de USB-C-aansluiting aan de achterkant van de IMAIR.

6.




Sluit de USB-kabel aan op de computer (USB-A-aansluiting).

7.



Druk kort op de rechter lipknop om de IMAIR in te schakelen.

8.

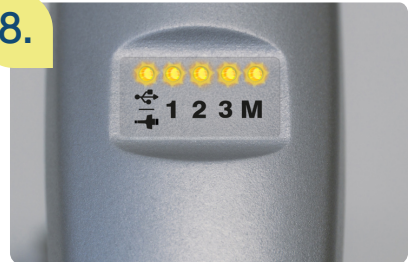

Alle LED's lichten even op en de IMAIR kalibreert zichzelf automatisch.

9.



De linker LED brandt (kabelverbinding). De rechter LED (M) is uit (muismodus).



**Raak de
IntegraMouse
AIR niet aan
tijdens de
kalibratie!**

Alle volgende stappen worden automatisch uitgevoerd:

- De interne batterij wordt opgeladen.
- Uw computer installeert de IntegraMouse AIR als de standaardmuis.

Snelgids voor inbedrijfstelling in draadloze modus



(Koppelen via Bluetooth)



Om de IntegraMouse AIR met Bluetooth te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de batterij voldoende is opgeladen. Gebruik hiervoor de meegeleverde oplader en laad de batterij op voordat u de muis voor de eerste keer gebruikt.

1.



Druk kort op de rechter lipknop om de IMAIR in te schakelen.

2.



Alle LED's knipperen even en de IMAIR kalibreert zichzelf.

3.



De linker LED gaat branden.

4.



Houd de linker lipknop 3 seconden ingedrukt.

5.



LED 1 begint te knipperen.

6.




Selecteer de gewenste positie (1, 2 of 3) door op de knop aan de linkerzijde te drukken.

7.



Wacht even totdat de geselecteerde LED blauw knippert.

8.

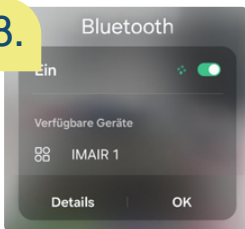

Start de apparaatzoekfunctie op het eindapparaat en selecteer IMAIR.

9.



Als het koppelen lukt, stopt het knipperen en gaat de LED oranje branden.

Algemene opmerkingen over schoonmaken



Gebruik van IntegraMouse AIR in de klinische sector

- In de klinische sector worden het mondstuk (inclusief membraan en siliconen opzetstuk) en de lipknoppen als wegwerpproducten gebruikt.
- De frequentie waarmee het mondstuk (inclusief membraan en siliconen opzetstuk) en de lipknoppen vervangen moeten worden, dient te worden vastgesteld door een arts of specialist.
- Neem bij vermoedens van infectieziekten extra veiligheidsmaatregelen in acht (draag bijvoorbeeld handschoenen bij het verwisselen van het mondstuk).

Desinfecteren door af te vegen

- Gebruik uitsluitend oppervlakte-desinfectiemiddelen die geschikt zijn voor LEXAN polycarbonaat.
- Wij bevelen de volgende producten van Schülke & Mayr (www.schuelke.com) aan: Mikrozyd Sensitive Liquid of Mikrozyd Sensitive Wipes of gelijkwaardige producten.



Gebruik geen natte sterilisatie of gammasterilisatie.

Het mondstuk, de lipknoppen en andere onderdelen van de IntegraMouse AIR mogen niet worden gereinigd door middel van natte sterilisatie of gammastraling.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, deze beschadigen het oppervlak van de onderdelen.

Niet onderdompelen in water.

Dompel de IntegraMouse AIR en de elektronische componenten ervan nooit onder in water en gebruik nooit stromend water – anders kunt u het apparaat beschadigen.



Correcte reiniging van componenten

- De onderdelen van de IntegraMouse AIR, de voedingseenheid inclusief kabel en het montagesysteem, kunnen worden schoongemaakt door ze af te nemen met een vochtige, pluisvrije doek.
- Reinig de onderdelen eens in de twee weken.

Het mondstuk reinigen en het membraan vervangen.

Reinigings- en afvoerinterval van het mondstuk en de lipknoppen

Reiniging: De IntegraMouse AIR heeft een herinneringsfunctie voor reiniging en herinnert u na de aanbevolen gebruiksperiode met een knipperende led (zie pagina 8).

- minstens eens in de twee weken
- vaker in geval van ziekte

Afvoeren:

indien beschadigd of zichtbaar slijtageplekken aanwezig zijn.

- binnen zes maanden

Afvoerinterval van het membraan

Gooi het membraan altijd weg; reiniging wordt niet aanbevolen.



Draai eerst het mondstuk met de klok mee en trek het er vervolgens recht af.



Verwijder het membraan en gooi het weg.



Reinig het mondstuk in een stoomsterilisator.



Laat het mondstuk drogen en afkoelen.

5.



Plaats een nieuw membraan op het mondstuk.

6.



Plaats het mondstuk (let op de geleidingspen en de geleidingsgleuf) en draai het met lichte druk tegen de klok in.



Het mondstuk kan ook in een pan met water worden uitgekookt.

- Breng het water aan de kook.
- Plaats het mondstuk met behulp van een lepel in het water en zorg ervoor dat het volledig onder water staat.
- Laat het mondstuk minstens 5 minuten in het kokende water weken.
- Verwijder het mondstuk voorzichtig met een lepel uit de pan en laat het drogen en afkoelen.

Functionaliteit van IntegraMouse AIR

De IntegraMouse AIR biedt drie bedieningsmodi; de standaardmodus is de muismodus.

	Muis	Toetsenbord	Gamepad
Beweeg het mondstuk: • omhoog • omlaag • naar links • naar rechts			
Zuigen	Links klikken 	Spatie 	Knop 1 
Blazen	Rechts klikken 	Enter 	Knop 2 
Microfoon	Let op: Er zit een microfoon aan de onderkant. Deze kan alleen in de kabelmodus worden gebruikt.		
Kalibreren: Houd de rechter lipknop 3 seconden ingedrukt.	Alle LED's knipperen tegelijk. ⓘ Raak het mondstuk niet aan.		
Apparaat wisselen: druk kort op de linker lipknop.	1x kabel 3x Bluetooth	   	
Modus wijzigen: Druk kort op de rechter lipknop.	 Muis	 Toetsenbord	 Gamepad
Herinnering: vervanging van het mondstuk	LED 0 knippert oranje. Druk beide lipknoppen tegelijk in (gedurende 3 seconden) om de timer te resetten.		
Waarschuwing voor lage batterijspanning	Als de batterij in de draadloze modus bijna leeg is, beginnen de LED's 1, 2 of 3 oranje te knipperen.		
Uitschakelen: Houd de rechter lipknop 6 seconden ingedrukt.	Let op: IMAIR moet actief zijn (LED moet branden). Druk totdat alle LED's uitgaan.		



Voor meer instellingsmogelijkheden en functies kunt u de gratis instellingen-app downloaden van de IntegraMouse-website op www.integramouse.com. Daar vindt u meer nuttige informatie en configuratiemogelijkheden.