



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UK CA FC

WERSJA
// 1.1

IntegraMouse® AIR Szybki przewodnik

integramouse.com



Polski (PL)



**Uruchomienie, czyszczenie i
użytkowanie**

Uruchomienie

Zespół IntegraMouse AIR

1.



Włóż ustnik, zwracając uwagę na czop i prowadnicę.

2.



Naciśnij lekko i przekręć ustnik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

3.



Zamontuj IMAIR w systemie montażowym (gwint 1/4").

4.



Ustaw IMAIR według potrzeb.

Na początek zalecamy korzystanie z połączenia przewodowego.

5.



Podłącz kabel do portu USB-C z tyłu urządzenia IMAIR.

6.



Podłącz kabel USB do komputera (gniazdo USB-A).

7.


Naciśnij krótko prawy przycisk wargowy, aby włączyć IMAIR.

8.


Wszystkie diody LED zaświecą się na chwilę; IMAIR skalibruje się automatycznie.

9.


Lewa dioda LED świeci (połączenie kablowe).
Prawa dioda LED (M) jest wyłączona (tryb myszy).



Nie dotykać
ustnika podczas
kalibracji!

Poniższe kroki wykonywane są
automatycznie:

- Trwa ładowanie wewnętrznej baterii.
- Na Twoim komputerze zostanie zainstalowana IntegraMouse AIR jako domyślna mysz.


Krótki przewodnik po konfiguracji sieci bezprzewodowej

(Parowanie przez Bluetooth)



Aby używać myszy IntegraMouse AIR z Bluetooth, upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana. Użyj dotychczasowej ładowarki i naładuj baterię przed pierwszym użyciem.

1.

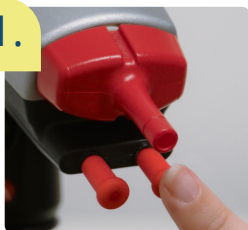

Naciśnij krótko prawy przycisk wargowy (aby włączyć IMAIR).

2.



Wszystkie diody LED zapalają się na chwilę, IMAIR kalibruje się.

3.



Świeci się lewa dioda LED.

4.



Naciśnij lewy przycisk wargowy przez 3 sekundy.

5.



Dioda LED 1 zaczyna migać na pomarańczowo.

6.




Wybierz żądaną pozycję (1, 2 lub 3) naciskając lewy przycisk wargowy.

7.



Poczekaj chwilę, aż wybrana dioda LED zacznie migać na niebiesko.

8.

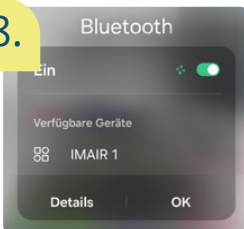

Rozpocznij wyszukiwanie urządzenia na urządzeniu końcowym i wybierz IMAIR.

9.



Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, miganie ustanie, a dioda LED zaświeci się na pomarańczowo.

Ogólne instrukcje dotyczące czyszczenia



Zastosowanie IntegraMouse AIR w warunkach klinicznych

- W warunkach klinicznych ustnik (łącznie z membraną i silikonową nakładką) oraz przyciski wargowe należy stosować jako produkty jednorazowego użytku.
- Częstotliwość wymiany ustnika (w tym membrany i nakładki silikonowej) oraz przycisków wargowych ustala wykwalifikowany personel lub lekarz.
- Jeśli podejrzewasz, że masz chorobę zakaźną, podejmij dodatkowe środki ostrożności (np. załóż rękawiczki podczas zmiany ustnika).

Dezynfekcja przez przetarcie

- Należy używać wyłącznie środków dezynfekujących przeznaczonych do powierzchni poliwęglanowych LEXAN.
- Polecamy następujące produkty firmy Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive Liquid, Mikrozid Sensitive Wipes lub produkty równoważne.



Nie stosować sterylizacji na mokro ani sterylizacji promieniami gamma.

Ustnika, przycisków wargowych i innych podzespołów IntegraMouse AIR nie wolno czyścić sterylizując je na mokro ani promieniami gamma.

Nie używaj silnych środków czyszczących.

Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię podzespołów.

Nie zanurzać w wodzie

Nigdy nie zanurzaj IntegraMouse AIR ani jego podzespołów elektronicznych w wodzie i nie czyść ich pod bieżącą wodą, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie podzespołów elektronicznych.



Prawidłowe czyszczenie podzespołów

- Przetrzyj elementy IntegraMouse AIR, zasilacz wraz z kablem i systemem montażowym lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.
- Czyść komponenty co najmniej raz na dwa tygodnie.

Krótki przewodnik: Czyszczenie ustnika i wymiana membrany

Częstotliwość czyszczenia i utylizacji ustnika i przycisków wargowych

Czyszczenie: Mysz IntegraMouse AIR ma funkcję przypomnienia o czyszczeniu i po upływie zalecanego czasu użytkowania przypomni o tym za pomocą migającej diody LED (patrz str. 8).

- co najmniej raz na dwa tygodnie
- częściej w przypadku choroby

Utylizacja:

- w przypadku uszkodzeń lub oznak zużycia
- najpóźniej po sześciu miesiącach

Interwał utylizacji membrany

Zawsze utylizuj membranę prawidłowo. Czyszczenie jest stanowczo odradzane.



Najpierw przekręć ustnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie pociągnij go prosto.



Wymij i wyrzuć membranę.



Gotować w sterylizatorze parowym



Wysusz ustnik i pozostaw go do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

5.



Założ nową membranę na ustnik

6.



Włóż ustnik (zwróć uwagę na czop i prowadnicę) i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, lekko naciskając.




Ustnik można również zagotować w garnku z wodą.

- Doprowadzić wodę do wrzenia
- Umieścić ustnik w rondlu za pomocą łyżki, upewniając się, że jest całkowicie zwilżony wodą.
- Pozostawić we wrzącej wodzie przez co najmniej 5 minut.
- Następnie ostrożnie wyjmij go z garnka za pomocą łyżki.

Funkcjonalności IntegraMouse AIR

IntegraMouse AIR oferuje 3 tryby pracy; trybem standardowym jest tryb myszy.

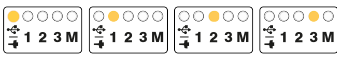	Mysz	Klawiatura	Gamepad
Przesuwanie usticka: - w górę - w dół - w lewo - w prawo			
Ssanie	Kliknij lewym 	Spacja 	Przycisk 1 
Dmuchanie	Kliknij prawym 	Enter 	Przycisk 2 
Mikrofon	Uwaga: Mikrofon znajduje się na spodzie urządzenia. Można go używać tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone przewodowo.		
Kalibracja: prawy przycisk wargowy Naciśnij przez 3 sekundy	Wszystkie diody LED migają jednocześnie.  Nie dotykać usticka.		
Zmiana urządzenia: Naciśnij krótko lewy przycisk wargowy.	1x kabel 3x Bluetooth		
Zmień tryb: Naciśnij krótko prawy przycisk wargowy.	 Mysz	 Klawiatura	 Gamepad
Przypomnienie o wymianie usticka	Dioda LED 0 miga na pomarańczowo. Aby zresetować timer, naciśnij oba przyciski wargowe jednocześnie (3 sekundy).		
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii	Gdy w trybie bezprzewodowym poziom naładowania baterii jest niski, diody LED 1, 2 lub 3 zaczną migać na pomarańczowo.		
Aby wyłączyć: Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk wargowy przez 6 sekund.	Uwaga: IMAIR musi być aktywny (dioda LED świeci). Naciśnij i przytrzymaj, aż wszystkie diody LED zgasną.		



Aby uzyskać dostęp do dalszych ustawień i funkcji, pobierz bezpłatną aplikację konfiguracyjną ze strony internetowej IntegraMouse pod adresem www.integramouse.com. Znajdziesz tam dodatkowe przydatne informacje i opcje konfiguracji.