



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UKCA FC

VERSION
// 1.1

IntegraMouse® AIR 퀵 가이드

integramouse.com



한국어 (KR)



설치, 세척 및 조작

설치

IntegraMouse AIR 장착

1.



가이드 핀과 가이드 홈에 유의하며 마우스피스를 삽입하십시오.

2.



가볍게 누른 상태에서 딸깍 소리가 나며 고정될 때까지 마우스피스를 시계 반대 방향으로 돌리십시오.

3.



IMAIR를 마운팅 시스템(1/4인치 나사산)에 고정하십시오.

4.



IMAIR를 원하는 작업 위치로 조정하십시오.

최초 설치 시에는 케이블 연결 상태로 작동할 것을 권장합니다.

5.



케이블을 IMAIR 뒷면의 USB-C 소켓에 연결하십시오.


6.



USB 케이블을 컴퓨터(USB-A 소켓)에 연결하십시오.

7.


IMAIR를 켜려면 오른쪽 립 버튼을 짧게 누르십시오.

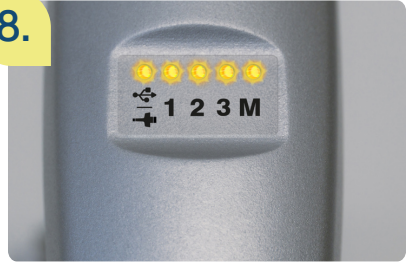8.


모든 LED가 잠시 켜지며 IMAIR가 자동으로 보정됩니다.

9.


왼쪽 LED가 켜집니다(케이블 연결). 오른쪽 LED(M)는 꺼져 있습니다(마우스 모드).



**보정 중에는
IntegraMouse
AIR를 만지지 마십
시오!**

이후 모든 과정은 자동으로 진행됩니다:

- 내장 배터리가 충전되며.
- 컴퓨터가 IntegraMouse AIR를 기본 마우스로 설치합니다.

무선 모드 설치를 위한 퀵 가이드



(블루투스 페어링)



블루투스로 IntegraMouse AIR를 사용하려면 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다. 최초 사용 전에 동봉된 충전기로 배터리를 충전하십시오.

1.



IMAIR를 켜려면 오른쪽 립 버튼을 짧게 누르십시오.

2.



모든 LED가 잠시 깜빡이며 IMAIR가 보정됩니다.

3.



왼쪽 LED가 켜집니다.

4.



왼쪽 립 버튼을 3초간 누르십시오.

5.



LED 1이 깜빡이기 시작합니다.

6.




왼쪽 립 버튼을 눌러 원하는 위치(1, 2 또는 3)를 선택하십시오.

7.



선택한 LED가 파란색으로 깜빡일 때까지 잠시 기다리십시오.

8.

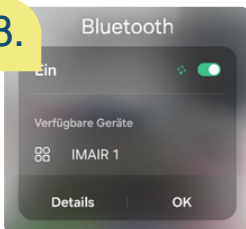

최종 기기에서 장치 검색을 시작하여 IMAIR를 선택하십시오.

9.



페어링에 성공하면 깜빡임이 멈추고 LED가 주황색으로 켜집니다.



임상 환경에서의 IntegraMouse AIR 사용

- 임상 환경에서는 마우스피스(멤브레인 및 실리콘 튜브 포함)와 립 버튼을 일회용 제품으로 사용하십시오.
- 마우스피스(멤브레인 및 실리콘 튜브 포함)와 립 버튼의 교체 주기는 의사 또는 전문 인력이 결정해야 합니다.
- 감염성 질환이 의심되는 경우 추가 안전 조치를 취하십시오(예: 마우스피스 교체 시 장갑 착용).

표면 소독(닦아내기)

- LEXAN 폴리카보네이트에 적합한 표면 소독제만 사용하십시오.
- Schülke & Mayr (www.schuelke.com) 제품인 Mikrozid Sensitive Liquid 또는 Mikrozid Sensitive Wipes, 혹은 이와 동등한 제품을 권장합니다.



습식 또는 감마 멸균 금지

마우스피스, 립 버튼 및 IntegraMouse AIR의 기타 구성품은 습식 또는 감마 멸균으로 세척해서는 안 됩니다.

강한 세척제 사용 금지

강한 세척제는 절대 사용하지 마십시오. 구성품 표면이 손상됩니다.

물에 담그지 마십시오

IntegraMouse AIR와 전자 부품을 절대 물에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오. 기기가 손상될 수 있습니다.



구성품의 올바른 세척 방법

- IntegraMouse AIR 본체, 케이블을 포함한 전원 어댑터, 마운팅 시스템은 보풀이 없는 축축한 천으로 닦아 세척할 수 있습니다.
- 구성품은 2주에 한 번씩 세척하십시오.

마우스피스 세척 및 멤브레인 교체



마우스피스 및 립 버튼의 세척·폐기 주기

세척: IntegraMouse AIR에는 세척 알림 기능이 있어 권장 사용 기간이 지 나면 LED 점멸로 알려줍니다(8페이지 참조).

- 최소 2주에 한 번
- 질병이 있는 경우 더 자주

폐기:

- 손상되었거나 마모 흔적이 있는 경우
- 늦어도 6개월 이내

멤브레인 폐기 주기

멤브레인은 세척하지 말고 항상 폐기하십시오.

1.



먼저 마우스피스를 시계 방향으로 돌린 다음 똑바로 잡아당겨 분리하십시오.

2.



멤브레인을 분리하여 폐기하십시오.

3.



마우스피스를 스팀 멸균기로 세척하십시오.

4.



마우스피스를 건조시키고 실온으로 식히십시오.

5.


새 멤브레인을 마우스피스에 끼우십시오.

6.


마우스피스를 삽입하고(가이드 핀과 가이드 홈 확인) 가볍게 누르면서 시계 반대 방향으로 돌리십시오.



마우스피스는 냄비에 물을 넣고 끓여서 소독할 수도 있습니다.

- 물을 끓이십시오.
- 손가락을 이용해 마우스피스를 넣고 물에 완전히 잠기도록 하십시오.
- 끓는 물에 최소 5분간 두십시오.
- 손가락으로 마우스피스를 조심스럽게 꺼내 건조시키고 식히십시오.

IntegraMouse AIR의 기능



IntegraMouse AIR는 3가지 작동 모드를 제공하며, 기본 모드는 마우스 모드입니다.

	마우스 모드	키보드 모드	게임패드 모드
마우스피스를 위 / 아래 / 왼쪽 / 오른쪽으로 움직이기(모든 모드에 적용).			
빨기(Sip)	좌클릭	스페이스바	버튼 1
불기(Puff)	우클릭	엔터	버튼 2
마이크	하단에 마이크가 있습니다. 케이블 모드에서만 사용할 수 있습니다.		
보정: 오른쪽 림 버튼을 3초간 누르십시오.	모든 LED가 동시에 깜빡입니다. ! 마우스피스를 만지지 마십시오.		
기기 전환: 왼쪽 림 버튼을 짧게 누르십시오	케이블 1개 블루투스 3개 연결		
모드 전환: 오른쪽 림 버튼을 짧게 누르십시오	 마우스 모드	 키보드 모드	 게임패드 모드
마우스피스 교체 알림	LED 0이 주황색으로 깜빡입니다. 타이머를 재설정하려면 양쪽 림 버튼을 동시에 3초간 누르십시오.		
배터리 부족 경고	무선 모드에서 배터리가 부족하면 LED 1, 2 또는 3이 주황색으로 깜빡이기 시작합니다.		
전원 끄기: 오른쪽 림 버튼을 6초간 누르십시오.	참고: IMAIR가 켜져 있어야 합니다(LED 점등). 모든 LED가 꺼질 때까지 누르십시오.		



추가 설정 옵션 및 기능은 IntegraMouse 웹사이트
(www.integramouse.com)에서 무료 설정 앱을 다운로드하십시오.