





Zum Übertragen eines Kommunikationsbuches auf ein anderes iPad

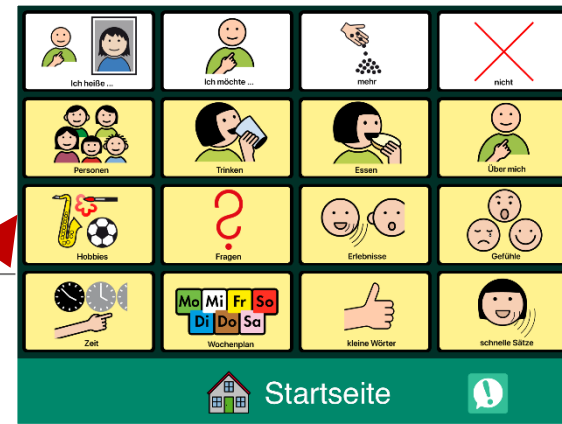



GoTalk NOW

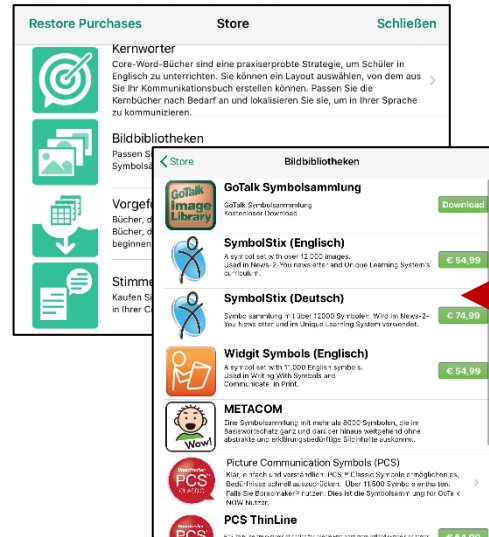

Stimmen und Symbolsammlungen kaufen




Liste an Kommunikationsbüchern

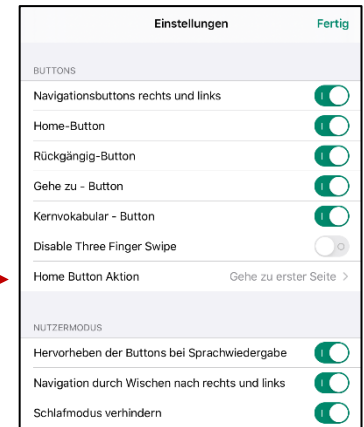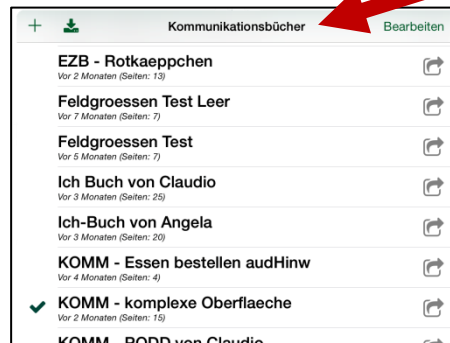


Nähere Informationen sh. S. 5-7




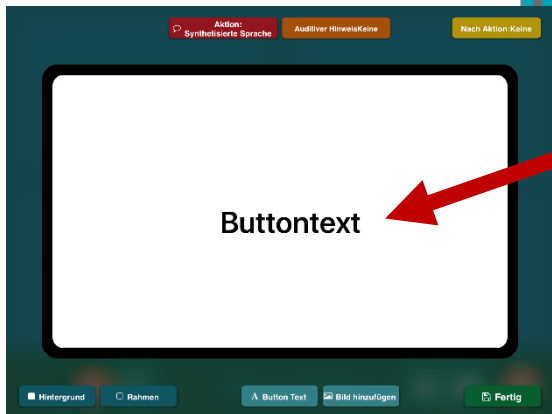

Button bearbeiten/hinzufügen (sh. S.3)

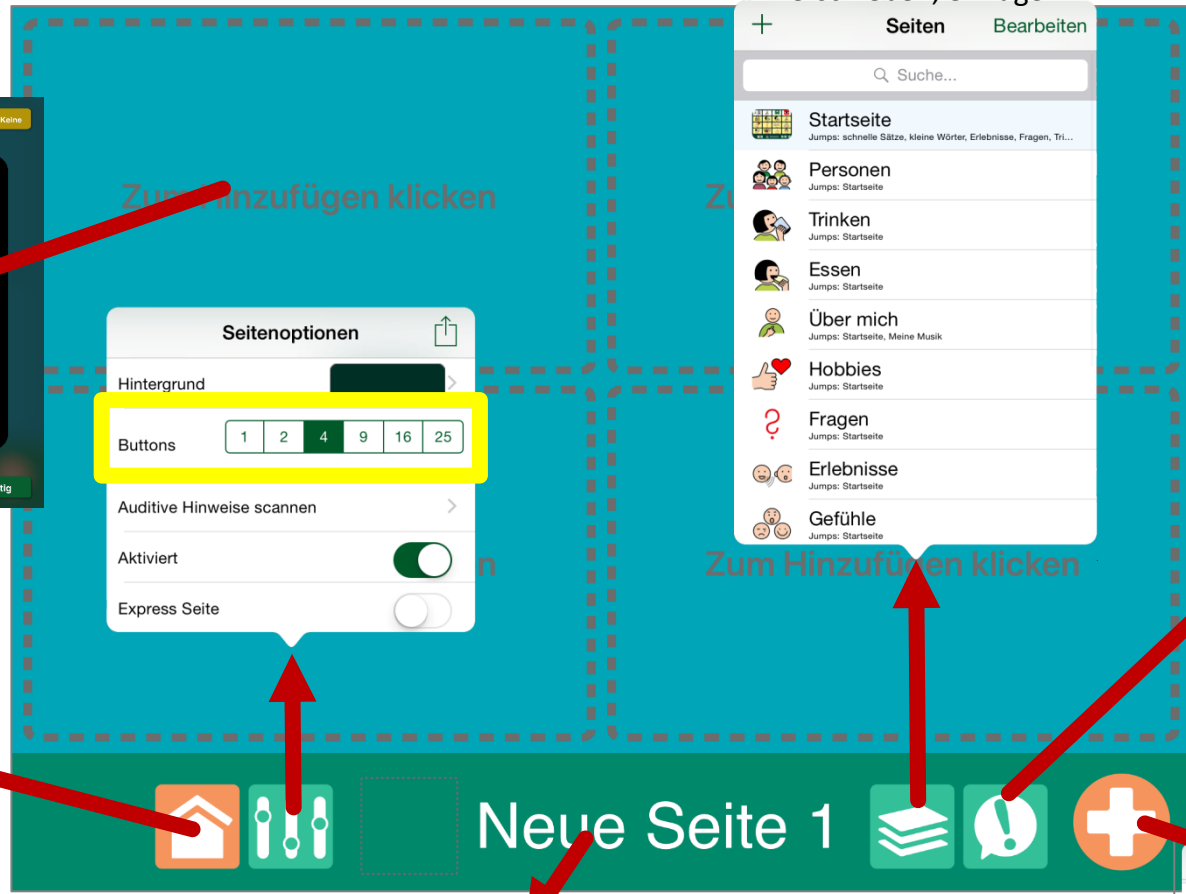

Seiten löschen, verschieben, einfügen

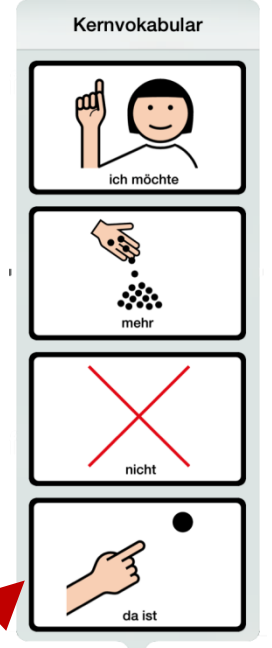


Vier Kernvokabular – Tasten bearbeiten


Zurück zur Startseite



Icon für Seite definieren

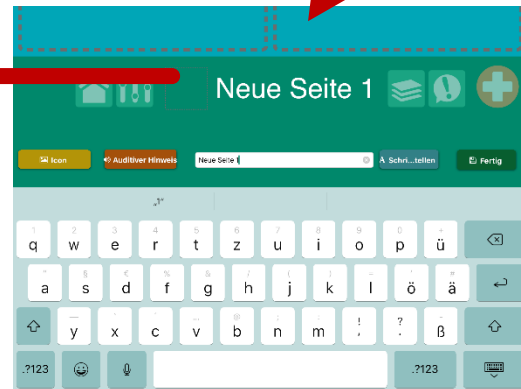

Seitenname & -icon bearbeiten

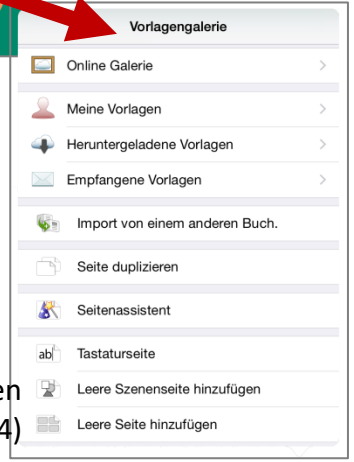

Seiten & Vorlagen einfügen (sh. S.4)

Aufnahme synthetisierte Sprache Gehe zu Seite Mediaplayer URL GoVisual Steuerung der Hue Lampen Video

Text eingeben (wenn nicht wird Button Text gesprochen)

Stimme Vorschau Als Aufn...peichern

Hier wird definiert, was passieren soll, wenn die Taste gedrückt wird.

Diese Option kann hilfreich für Blinde & Sehbehinderte sein.

Aufnahme synthetisierte Sprache Keiner

Es wird kein aud. Hinweis abgespielt

Hintergrundfarbe

Standardfarben Benutzerdefiniert

Aktion: Synthetisierte Sprache Auditiver HinweisKeine Nach Aktion:Keine

Butte

Bild hinzufügen

GoTalk Image Library

Metacom

Suche im Internet

Foto machen

Aus Fotoalbum

Hintergrund Rahmen A Button Text Bild hinzufügen Fertig

Nach Aktionen:

Nichts ✓

Gehe zur nächsten Seite

Gehe zurück (Seitenhistorie)

Gehe zu bestimmter Seite

Bestimmen Sie, was nach Ausführen einer Aktion (rote Taste) passieren soll.

Beendet und speichert das Bearbeiten der Taste

Buttontext

Text Buttontext >

Größe 56


Schriftart HelveticaNeueInterface-Medium... >

Farbe

Schatten

Hier wird der Text bearbeitet, der auf der Taste angezeigt wird.

Auf dieser Taste können Sie Bilder aus geladenen Symbolbibliotheken (sh. S.1: „Store“), aus dem Fotoalbum oder aus dem Internet einfügen.

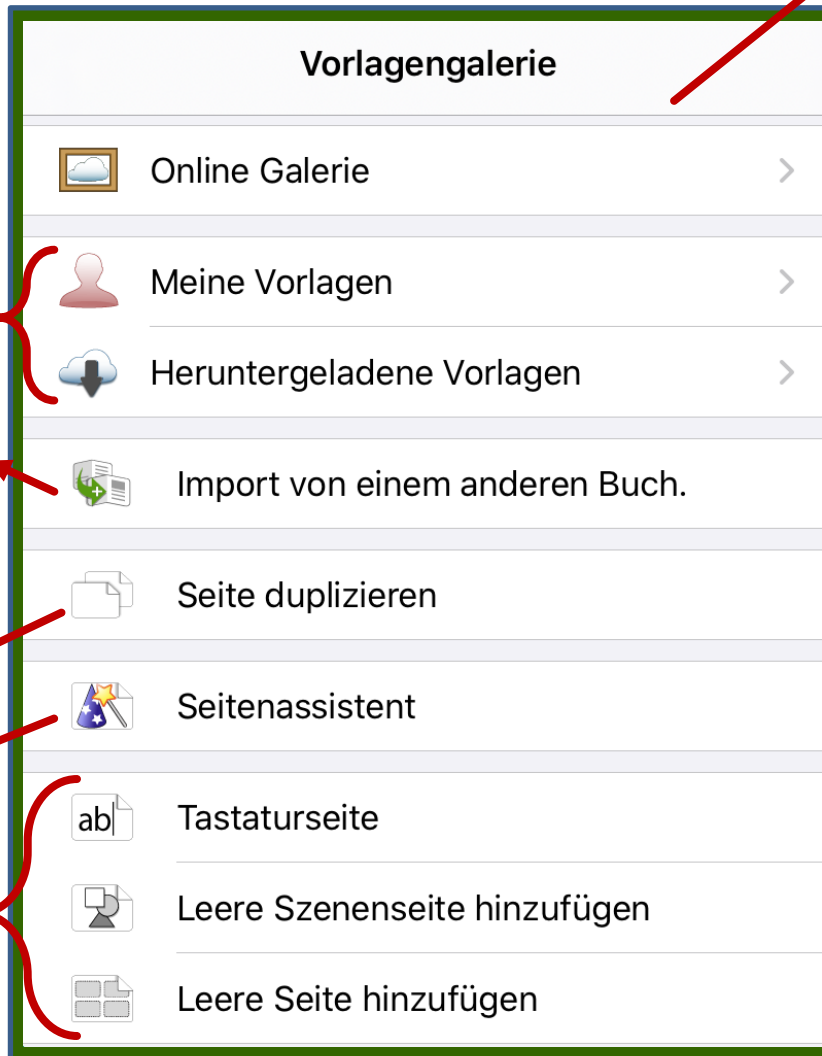

Eigene (geladene und selbst erstellte) Vorlagen verwalten


Seite aus anderem Kommunikationsbuch importieren

Seite aus diesem Kommunikationsbuch kopieren

Zum schnellen Befüllen einer neuen Seite

Neue (leere) Seite anlegen

Vorlagen aus dem Internet laden

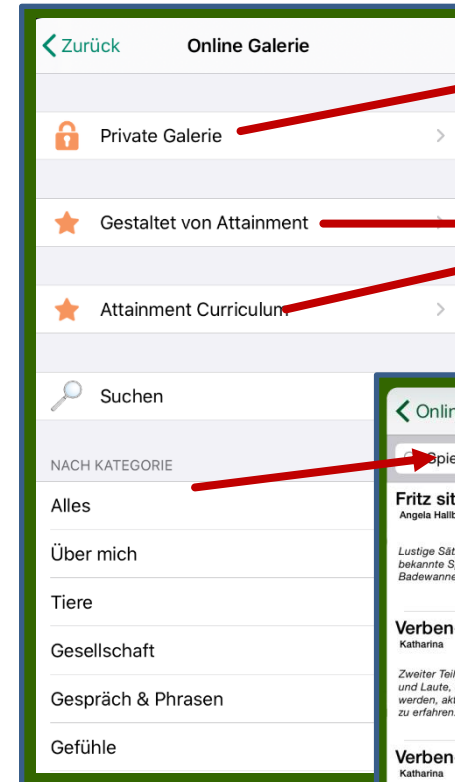

Passwort-geschützte Vorlagen herunterladen

(Englische) Vorlagen des Herstellers

In der öffentlichen Galerie können Sie entweder mit einem Suchbegriff suchen (sh. rechts) oder die Kategorien (sh. oben) durchschmökern.



Tipp: Verwenden Sie die öffentliche Online-Galerie und schauen Sie dort regelmäßig hinein, hier werden laufend neue Vorlagen hochgeladen. Weiters sei die Facebook-Gruppe „Unterstützte Kommunikation“ erwähnt, in der oftmals neu hochgeladene Inhalte beschrieben werden. Lassen Sie sich inspirieren! 😊



Hier kann man die Haus-Taste im Nutzermodus entfernen.
Achtung: Verlassen des Nutzermodus funktioniert dann nur über Wischen mit drei Fingern von oben nach unten!



Hier kann man die Taste für das Inhaltsverzeichnis deaktivieren.



Aktionen der Haus-Taste: „Gehe zu erster Seite“ oder „Nutzermodus verlassen“!

Blättern zur nächsten bzw. letzten Seite kann hier (de)aktiviert werden. Aktivierung z.B. sinnvoll bei Bilder- oder Fotobüchern.


Im Hintergrund laufende Musik wird gestoppt, wenn GoTalk Now gestartet wird.

Auditive Hinweise können bei den einzelnen Buttons hinterlegt sein. Hier kann gewählt werden ob und in welcher Lautstärke diese wiedergegeben werden sollen.

Sollen auditive Hinweise auch für die Navigationstasten verwendet werden?

Hier kann eingestellt werden, wie lange ein Button berührt werden muss, um sie auszulösen.

Hier kann man die Pfeiltasten im Nutzermodus zum Blättern ausschalten.

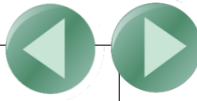

Hier kann man die Taste ausschalten, mit dem man auf die jeweilige vorherige Seite kommt.



Blendet Kernvokabular-Taste aus



Verhindert die 3-Finger-Geste zum Verlassen des Nutzermodus/Editor

Buttons werden umrahmt, wenn sie angeklickt werden. Das kann hier deaktiviert werden.

Ist die GoTalk Now App geöffnet, ist die automatische Sperre des iPads deaktiviert.

Wie wird ein Button ausgelöst? „Loslassen“ oder „Berühren“

Wichtige Einstellung beim Scanning: Wenn ein Button keinen auditiven Hinweis hat, wird dieser beim Scanning übersprungen.

Soll zum Verlassen des Nutzermodus ein Passwort verwendet werden und wenn ja, welches?

Blendet die Wortvorhersage auf der Tastaturseite ein oder aus

Definieren Sie, ob und wie gescannt werden soll. „Keiner“ bedeutet dass kein Scanning verwendet werden soll. Sie können verschiedene Taster bzw. den Bildschirm als Taster wählen.

Ist diese Option eingeschaltet, startet das Scanning automatisch.

Wenn zwei Taster verwendet werden, können hier die Funktionen der beiden Taster vertauscht werden (Weiterschalten und Auswahl).

Definieren Sie, ob auch die vorhandenen Schaltflächen der Fußzeile („Zurück“, „Weiter“ usw.) beim Scanning mit einbezogen werden sollen.

Attainment Switch ist eine App, für das iPhone um dann dieses als Taster für GoTalk Now zu verwenden.


Ein= definiert die zuletzt eingestellte Schriftart für alle neu erstellten Buttons

Position des Nachrichtenfensters (Express-Seiten) oben oder unten

Erstellt jede neue Seite mit Nachrichtenfenster (Express-Seiten)

einzelne Buchstaben bzw. Silben im Nachrichtenfenster als Wörter gesprochen.

Wörter werden beim Einfügen gesprochen

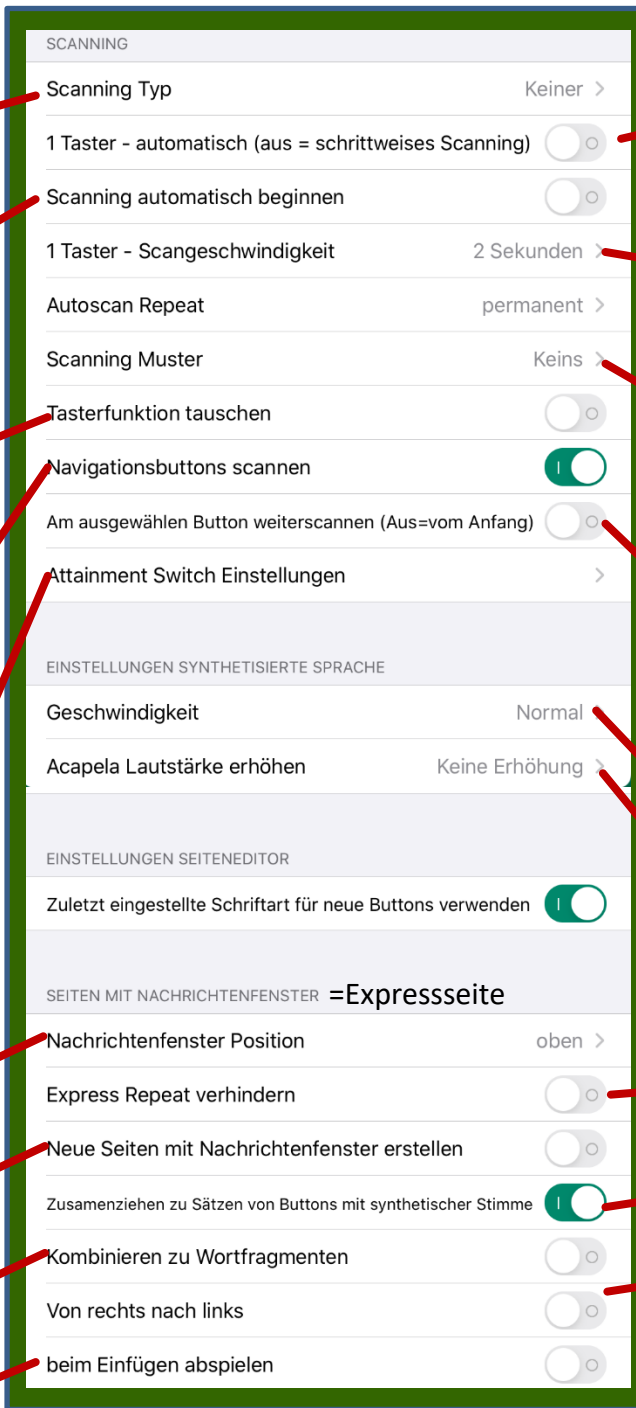

Ist diese Option eingeschaltet, wird automatisch gescannt, d.h. es wird nur ein Taster verwendet. Ist sie ausgeschaltet, werden zwei Taster verwendet.

Wenn Sie nur einen Taster verwenden, können Sie hier einstellen, wie schnell sich der Scanningrahmen bewegen soll.

Ist hier „Keins“ ausgewählt, werden die Tasten einer Seite nacheinander gewählt. Bei „Zeile/Spalte“ werden erst die Zeilen ausgewählt und dann die einzelnen Elemente dieser Zeile.

Aus: Bei Scanning wird immer bei der ersten Taste der Seite begonnen. Ein: Das Scanning wird bei der zuletzt gewählten Taste fortgesetzt.

Hier können Sie die Geschwindigkeit der synthetischen Stimme einstellen.


Hier können Sie die Höhe der synthetischen Stimme einstellen.

Blendet die Wiederholungstaste im Nachrichtenfenster von Expressseiten aus

Einzelne Buttons werden als Satz gesprochen

Ändert die Schreib-Lese-Richtung

Soll das Nachrichtenfenster beim Scanning mitgescannt werden?

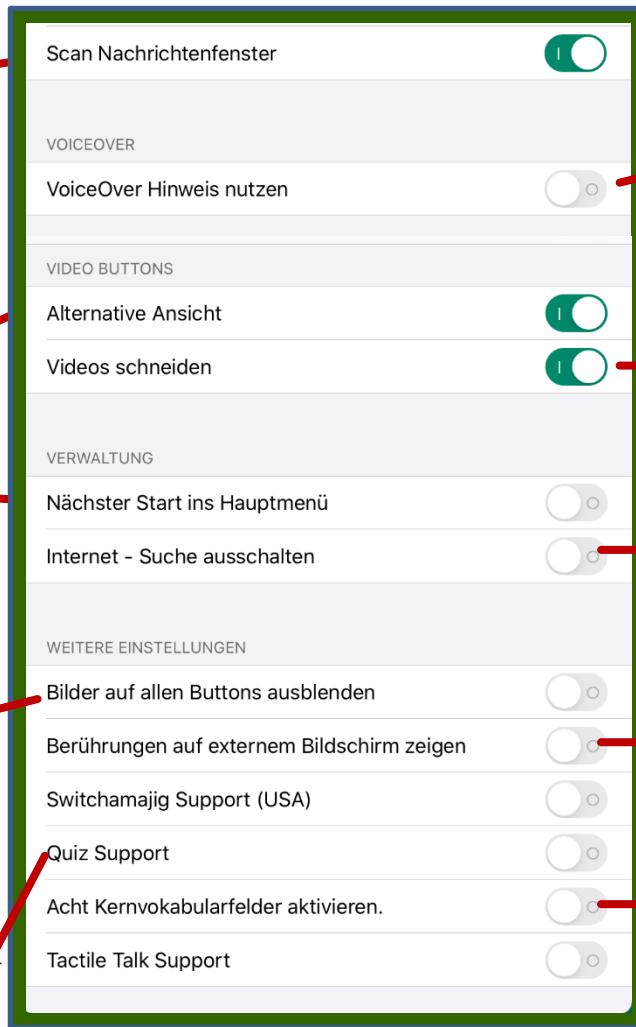

Hier kann der VoiceOver Hinweis aktiviert werden

Ist diese Option eingeschaltet, werden bei den Videos unten große Schaltflächen „Play/Pause“ und „Abbrechen“ eingeblendet.

Ist diese Option eingeschaltet, können Videos nach dem Einfügen in GoTalk Now zugeschnitten werden.

Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Schließen und erneutem Öffnen der App das Hauptmenü (sh. S.1) angezeigt.

Ist diese Option aktiviert, können beim Einfügen eines Bildes auf einer Taste (sh. S.3) keine Bilder im Internet gesucht werden.

Ist diese Option aktiviert, werden auf den Tasten in Nutzermodus keine Bilder angezeigt.

Diese Einstellung ist bei Präsentationen sinnvoll, da auf dem Beamer gezeigt wird, wo der iPad Bildschirm berührt wird.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann man auf einer Seite die Option „Quiz“ einstellen, Dies bedeutet, dass die Tasten auf dieser Seite nach dem Zufallsprinzip gemischt werden. Im Seiteneditor kann dann jede Seite als „Quiz-Seite“ aktiviert werden.

Ist diese Option aktiviert, werden 8 statt 4 Kernvokabularfelder aktiviert