

Wie sichere ich mein LIFEpad und dessen Inhalte?



Ein LIFEpad/iPad sollte regelmäßig gesichert werden.

Unterbleiben Backups und es kommt zu einem Problem – etwa durch eine mehrfach falsche Eingabe des Entsperrcodes – können sämtliche Daten und Einstellungen verloren gehen, sodass eine Neueinrichtung erforderlich ist. Alle individuell erstellten Inhalte sind dann unwiederbringlich weg!

Wer hingegen regelmäßig Backups erstellt, kann diese im Bedarfsfall nutzen, um das LIFEpad auf einen früheren Stand zurückzusetzen.

Dringende Empfehlung:

Zusätzlich zu den allgemeinen LIFEpad-Backups sollten **auch die Inhalte von Apps**, in denen **individuelle Anpassungen** vorgenommen werden, regelmäßig separat gesichert werden (z. B. GoTalk Now, MetaTalk, Predictable, TD Snap, Book Creator).

Wird eine App versehentlich vom LIFEpad gelöscht, kann sie zwar erneut aus dem App Store installiert werden, die individuell erstellten Inhalte (Seitensets und Kommunikationsbücher) sind jedoch ohne vorherige Sicherung unwiderruflich verloren.



Gesamtes LIFEpad sichern

Eine Sicherungskopie ermöglicht es nicht nur, Daten abzusichern, sondern auch, bestehende Einstellungen problemlos auf ein neues Gerät zu übertragen. Wurde ein Backup erstellt, kann dieses jederzeit genutzt werden, um die gespeicherten Informationen bei Bedarf wieder auf dem Gerät herzustellen.

Sichern Sie Ihr LIFEpad regelmäßig (wir empfehlen einmal pro Monat), so sind Sie immer am aktuellen Stand! Um den gesamten Geräteinhalt als Backup zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten:

A) Sicherung/Backup des LIFEpads in der iCloud:



Das LIFEpad wird automatisch in der iCloud gesichert, sobald es gesperrt ist, mit Strom versorgt wird und eine WLAN-Verbindung besteht.

Achtung: In der kostenlosen iCloud stehen lediglich **5 GB Speicherplatz** zur Verfügung. Für größere Datenmengen ist der Erwerb von **iCloud+** erforderlich (nicht im Kauf enthalten).

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

<https://support.apple.com/de-at/108922>




B) Sicherung/Backup des LIFEpads am PC/Mac:




Eine weitere Möglichkeit zur Sicherung der LIFEpad-Daten ist die Erstellung eines Backups auf einem Windows-PC oder Mac. Hierfür wird die Software „**Apple Geräte**“ benötigt. Auf Windows-11-Geräten ist diese **häufig bereits vorinstalliert**; andernfalls kann sie kostenlos über den **Microsoft Store** heruntergeladen werden: <https://apps.microsoft.com/detail/9NP83LWLPZ9K>

1. Das LIFEpad mit dem Windows-Gerät via USB-Kabel verbinden, Gegebenenfalls muss auf dem LIFEpad die Option „**Vertrauen**“ bestätigt werden..
2. Die App „**Apple-Geräte**“  am Windows-Gerät öffnen.
3. In der Seitenleiste das **entsprechende Gerät auswählen** und den Punkt „**Allgemein**“ in der Seitenleiste anwählen

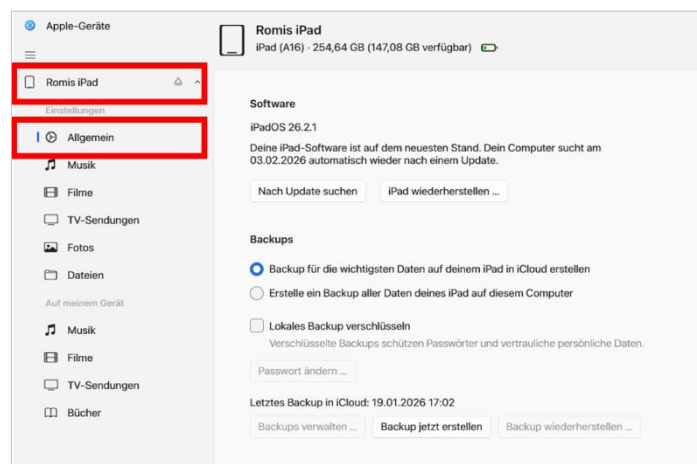


- Den Punkt „**Erstelle ein Backup aller Daten deines LIFEpads auf diesem Computer**“ wählen, um die Backups am Windows-Gerät zu sichern.
- „**Backup jetzt erstellen**“ anklicken
- Wenn das Backup abgeschlossen ist, findet sich unter „**Backups verwalten**“, die aktuelle Backup-Datei.

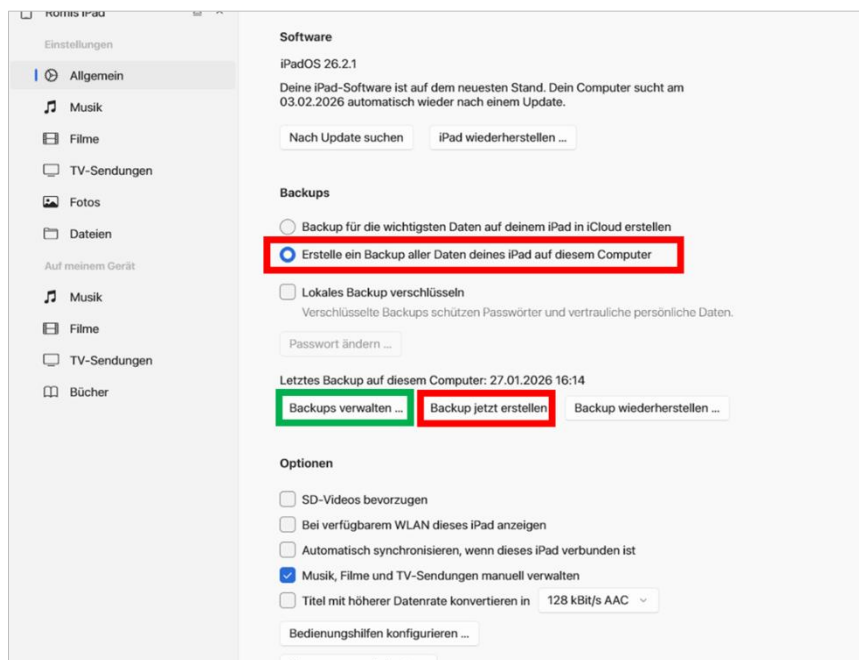

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur *Wiederherstellung* eines LIFEpads aus einem Backup

Tritt ein Problem mit dem LIFEpad auf, kann ein kürzlich erstelltes Backup zum Wiederherstellen der Informationen auf dem Gerät verwendet werden.

- Das LIFEpad mittels USB-Kabel mit dem Windows-Gerät verbinden. Gegebenenfalls muss auf dem LIFEpad die Option „**Vertrauen**“ bestätigt werden.
- Die App „**Apple-Geräte**“  am Windows-Gerät öffnen.
- In der Seitenleiste das **entsprechende Gerät auswählen**.
- Den Punkt „**Allgemein**“ in der Seitenleiste anwählen
- Den Punkt „**Backup wiederherstellen**“ wählen
- Im folgenden Einblendmenü „**Backup wiederherstellen**“, das Backup auswählen, das auf dem Gerät wiederhergestellt werden soll und dann „**iPad wiederherstellen**“ wählen.

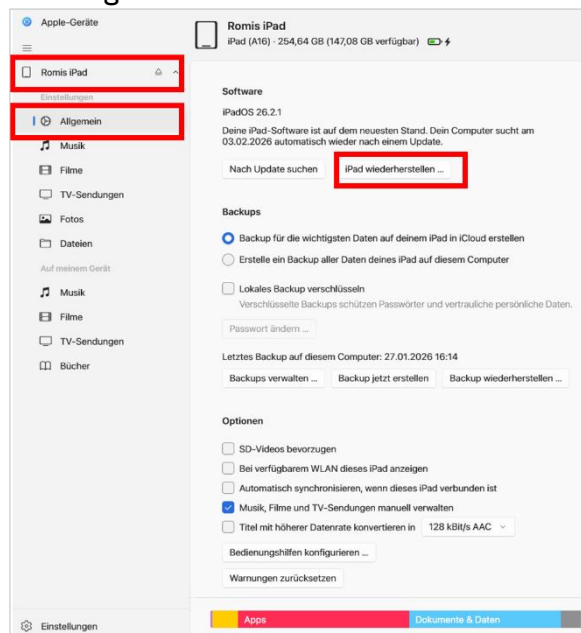

Achtung:

Es ist möglich, dass in Apps wie GoTalk Now, MetaTalk oder TD Snap erstellte Kommunikationsbücher bzw. Kommunikationsoberflächen in einem allgemeinen LIFEpad-Backup **nicht** automatisch mitgesichert werden.

Daher wird dringend empfohlen, diese Inhalte zusätzlich separat zu sichern!

Beispielsweise auf einen USB-Stick, Dropbox oder mit der App „Apple Geräte“, abhängig von der jeweiligen App.

Maßgeblich ist dabei die nachfolgende, app-spezifische Sicherungsanleitung für die jeweilige Kommunikations-App.



GoTalk Now - Kommunikationsbücher sichern




Wenn Sie Kommunikationsbücher und Oberflächen erstellt haben, ist es sehr wichtig, diese alle regelmäßig zu sichern. Hierfür können wir Ihnen drei Wege empfehlen:

- Sicherung/Übertragung per AirDrop auf ein anderes Gerät
- Sicherung auf einen USB-C-Stick (nicht mitgeliefert)
- Sicherung in die Dropbox
- Sicherung über den PC über die App „Apple-Geräte“

Sicherung GTN-Kommunikationsbücher auf USB-C-Stick



1. **USB-Stick verbinden:** USB-C-Stick in den Anschluss des LIFEpads stecken
2. **App öffnen:** die App GoTalk NOW öffnen.
3. **Gewünschtes Kommunikationsbuch wählen:** Unten in der Mitte auf den in weiß geschriebenen Namen des aktiven Kommunikationsbuches tippen und das **zu sichernde Kommunikationsbuch** aus der Liste **auswählen u. antippen**, sodass links vor dem Namen ein **Häkchen** sichtbar wird
4. **Sicherung starten:** Rechts nach dem Namen des Kommunikationsbuches findet sich ein **Pfeil**, diesen anwählen und „**komprimiertes Buch teilen**“ wählen

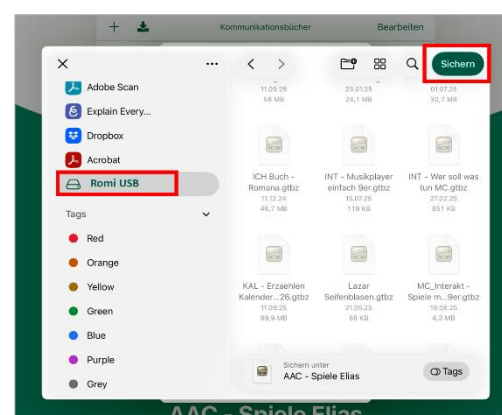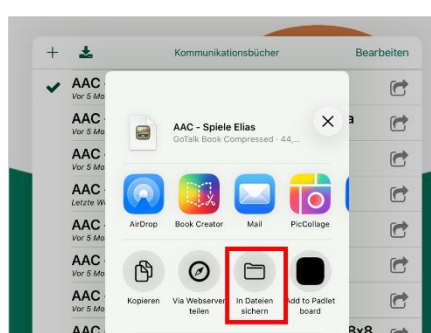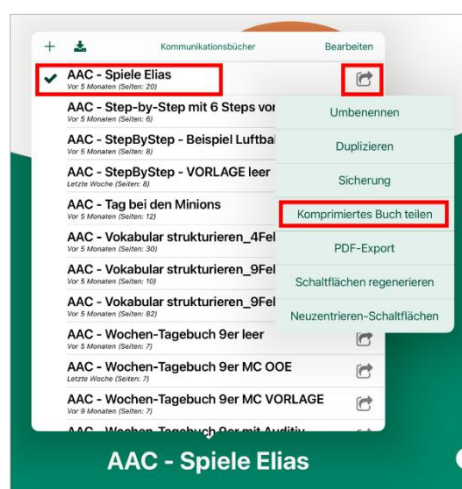


5. **Speicherort wählen:** Um zum USB-Stick zu gelangen, erst „**in Dateien sichern**“ wählen
6. und dann links den **USB-Stick** aus der Liste auswählen und rechts oben mit „**sichern**“ bestätigen.

Hinweis:


Die Dateien am USB-Stick haben die Endung „**gtbz**“ (*GoTalk Book Zipped*) und können anschließend auf jeglichen Rechner/Festplatte/Server als Sicherung abgelegt werden, um sie im Notfall wieder auf das LIFEpad zurück zu sichern.

Wiederherstellung GTN-Kommunikationsbücher von USB-C-Stick

1. **USB-Stick verbinden:** USB-C-Stick in den Anschluss des LIFEpads stecken
2. **Dateien App öffnen**
3. **Gewünschtes Kommunikationsbuch auswählen u. antippen**

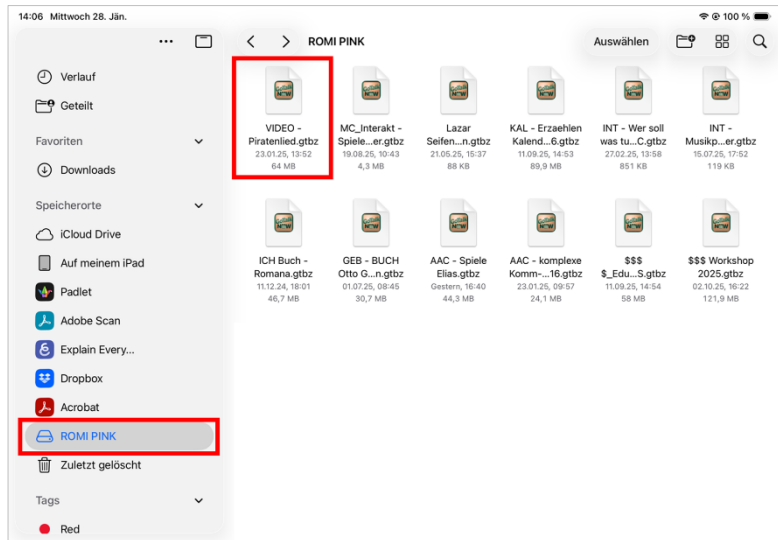

4. **In GoTalk NOW öffnen:** Das LIFEpad versucht eine Vorschau der Datei, der Bildschirm wird weiß, **rechts oben das Teilen-Icon** (Quadrat mit dem Pfeil nach oben) wählen und die **App GoTalk NOW wählen** (gegebenenfalls erst aus der Liste bei den drei Punkten am Ende auswählen)
5. App GoTalk NOW wird **automatisch geöffnet**, es öffnet sich ein Dialogfenster, hier kann das Kommunikationsbuch ev. neu benannt werden, anschließend „**Erstellen**“ wählen
6. Das **Kommunikationsbuch** ist am LIFEpad in der App GoTalk NOW **gespeichert**.
Um das zu kontrollieren: unten in der Mitte auf den in weiß geschriebenen Namen des aktiven Kommunikationsbuches tippen und die Übersicht der Kommunikationsbücher öffnet sich.

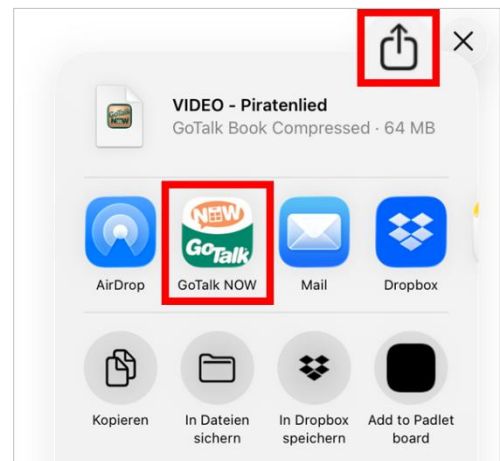




Sicherung GTN-Kommunikationsbücher in die Dropbox

Kommunikationsbuch aus GoTalk Now in die Dropbox sichern

Stellen Sie sicher, dass Ihr LIFEpad mit dem Internet verbunden ist

1. Öffnen Sie die App "GoTalk Now"
2. **Gewünschtes Kommunikationsbuch wählen:** Unten in der Mitte auf den in weiß geschriebenen Namen des aktiven Kommunikationsbuches tippen und das **zu sichernde Kommunikationsbuch** aus der Liste **auswählen u. antippen**, sodass links vor dem Namen ein **Häkchen** sichtbar wird
3. **Sicherung starten:** Rechts nach dem Namen des Kommunikationsbuches findet sich nun ein **Pfeil**, diesen auswählen und „**Sicherung**“ wählen

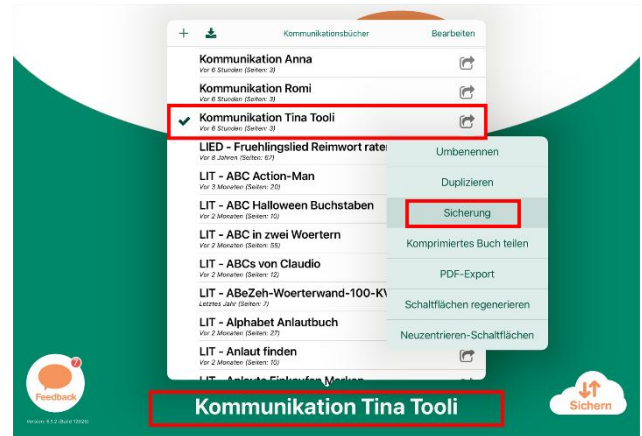

4. Wählen Sie dann im Auswahlfenster "**Über Dropbox**" > "**Sicherung zu Dropbox**"
5. Gegebenenfalls müssen Sie sich erst mit Ihren Dropbox-Zugangsdaten anmelden ("**Dropbox Account verlinken**"). Dann werden Ihnen die Ordner der bereits gespeicherten Kommunikationsbücher in Ihrer Dropbox angezeigt.
6. **Wählen Sie hier „Neu erstellen“** (Tipp: Legen Sie für jedes neue Kommunikationsbuch einen neuen Ordner an, denn pro Ordner kann nur ein Kommunikationsbuch gespeichert werden!)




7. „**Name der Sicherung**“ der Name des Kommunikationsbuches wird vorgeschlagen, diesen können Sie übernehmen, in dem Sie auf „**Erstellen**“ klicken
8. Nun wird das **Buch in die Dropbox gespeichert** und kann geteilt oder jederzeit von dort wiederhergestellt werden. Der Datentransfer kann (vor allem bei großen Dateien) eine Weile dauern – bitte warten, bis dieser beendet ist!



Wiederherstellung GTN-Kommunikationsbücher aus der Dropbox

1. **ACHTUNG: Legen Sie unbedingt zuerst (!) ein neues (leeres) Kommunikationsbuch an**, in welches Sie das gesicherte Buch aus der Dropbox hineinspeichern werden, sonst werden die Daten des geöffneten Buches mit dem Buchinhalt aus der Dropbox überschrieben und somit unwiederbringlich gelöscht!!!
2. Erst dann tippen Sie in **der Liste der Kommunikationsbücher auf den Pfeil** neben dem neu angelegten Buch und wählen Sie **"Sicherung" > "Über Dropbox" > "Wiederherstellen von Dropbox"**.

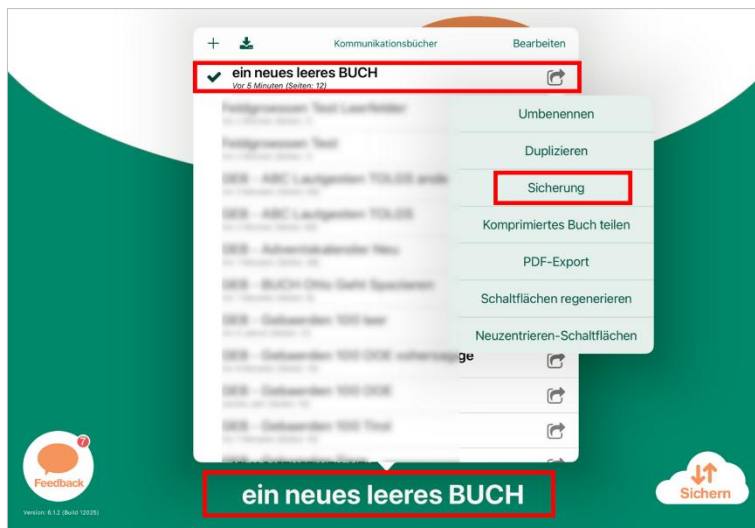

3. Wählen Sie die den Ordner der Sicherung aus, in der sich das wiederherzustellende Buch befindet und tippen Sie auf **"Wiederherstellen"**.


4. Bestätigen Sie die Meldung „**Löschen bestätigen**“ – diese dient nur dazu, Sie zu warnen, dass der Inhalt des derzeit geöffneten Kommunikationsbuches am Gerät mit dem Inhalt des Kommunikationsbuches der Dropbox **überschrieben** wird!




Deswegen ist es so wichtig, vorher ein neues/leeres Kommunikationsbuch anzulegen!

5. Warten Sie bis das Buch heruntergeladen und wiederhergestellt ist – fertig!
6. Ev. möchten Sie das Buch nun auf einen anderen Namen **umbenennen**, dazu tippen Sie in **der Liste der Kommunikationsbücher auf den Pfeil** neben dem neu angelegten/importierten Buch und wählen Sie „**umbenennen**“ um das Buch verständlich zu benennen.


Sicherung GTN-Kommunikationsbücher über die Software „Apple-Geräte“ (Computer)

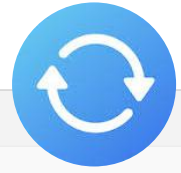

1. Schließen Sie das LIFEpad mit dem USB-Kabel am Computer an
2. Wenn die Software „Apple-Geräte“ nicht automatisch startet, starten Sie diese und wählen oben links ihr Gerät
3. Wählen Sie den Menüpunkt "Dateien"
4. Dann die App "GoTalk Now" anwählen, es werden Ihnen nach kurzer Wartezeit (!) alle Kommunikationsbücher am Gerät angezeigt

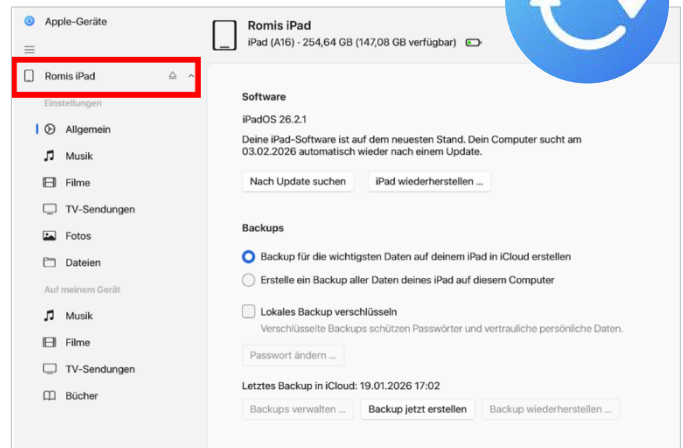

5. das zu sichernde Kommunikationsbuch auswählen
6. dann rechts seitlich ganz nach unten scrollen und dort dann auf "Speichern ..." klicken

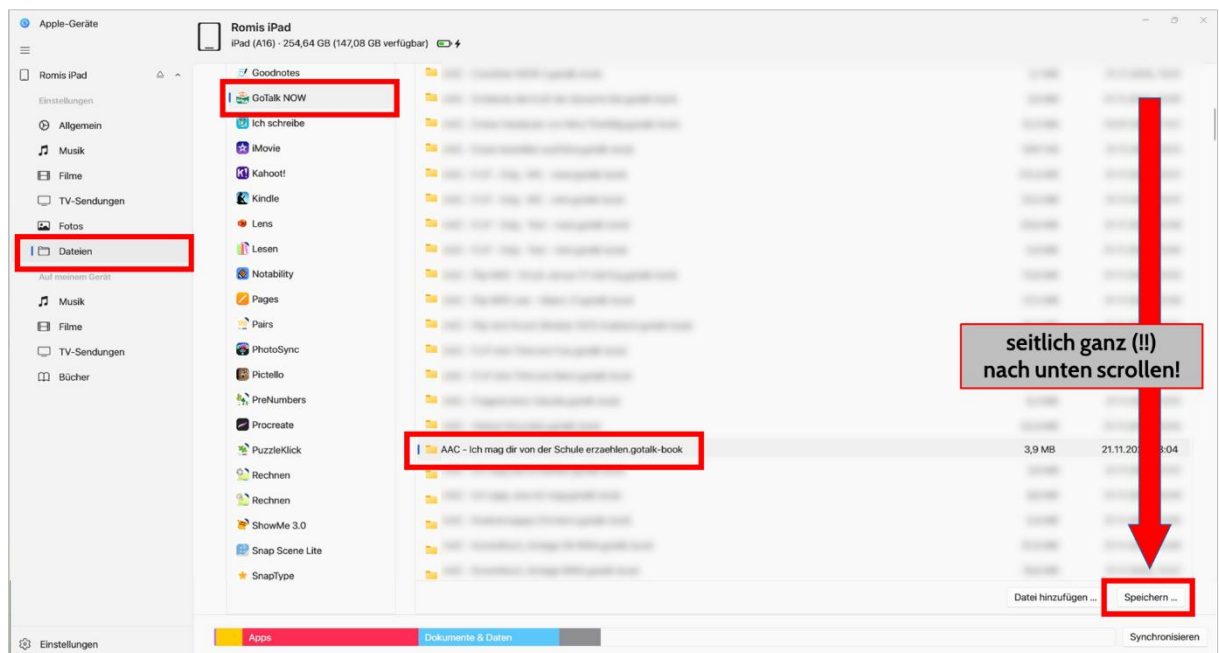

7. Wählen Sie den Ordner auf Ihrem Computer aus, in dem Sie das Kommunikationsbuch sichern möchten und speichern Sie dieses mit Klick auf „Ordner auswählen“

Wiederherstellung GTN-Kommunikationsbücher über die Software „Apple-Geräte“ (Computer)




Erster Schritt – Buch komprimieren („zippen“)

1. Gewünschte „gotalk-book“-Datei auf dem PC auswählen
2. Rechtsklick darauf ausführen (ev. müssen Sie „weitere Optionen anzeigen“ wählen)
3. Es öffnet sich ein Untermenü, dort wählen Sie „Senden an“ und dann „ZIP-komprimierten Ordner“ – diese ZIP-Datei wird nun als „Ordner mit Reisverschluss“ dargestellt



zweiter Schritt – Buch aufs LIFEpad übertragen

1. schließen Sie ihr LIFEpad mittels USB-Kabel am Computer an und starten Sie die Software „Apple-Geräte“, sollte dies nicht automatisch passieren
2. ev. müssen Sie „dem Computer vertrauen“ auf Ihrem LIFEpad wählen
3. wählen Sie links oben das LIFEpad aus, klicken Sie auf den Menüpunkt „Dateien“
4. Dann die App „GoTalk Now“ anwählen, es werden Ihnen nach kurzer Wartezeit (!) alle Kommunikationsbücher am Gerät angezeigt
5. Dann rechts seitlich **ganz nach unten scrollen**, dort dann auf „Datei Hinzufügen“ klicken

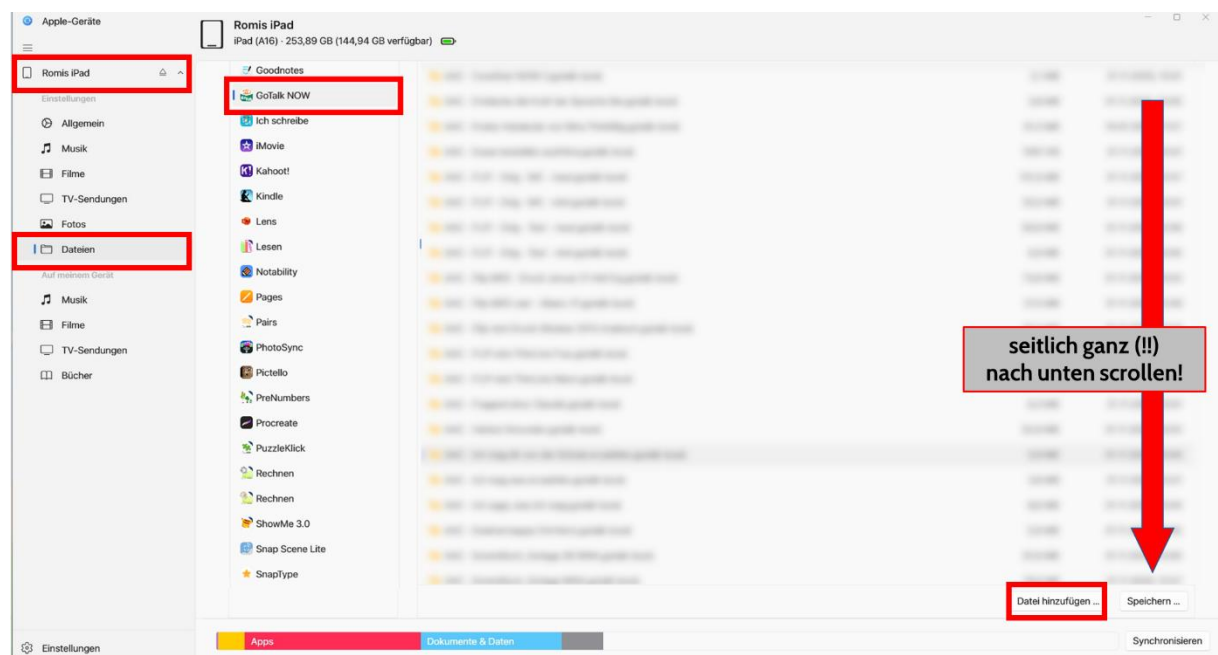

6. Wählen das hinzuzufügende Buch (als ZIP-Datei) aus Ihrem Dateisystem und bestätigen mit "OK" und das Buch wird nun auf Ihrem LIFEpad hinzugefügt
7. Am LIFEpad bestätigen Sie noch das Dialogfenster, um das Kommunikationsbuch in die App GoTalk NOW zu importieren



MetaTalk – Seiten oder Vokabulare sichern




Auch in MetaTalk DE ist es wichtig, die neu erstellten Seiten oder ganze Vokabulare zu sichern. Dies ist sehr gut im Handbuch beschrieben. Das aktuelle Handbuch finden sie hier:

<https://metatalk.app>



Sicherung MetaTalk Vokabulare oder einzelne Seiten

1. Tippen Sie links unten auf den **Bleistift**, tippen Sie die Zahlen **von klein nach groß** an, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln
2. wählen Sie im Seitenmanager (oder im Vokabularmanager) die Seite (das Vokabular) aus, das Sie exportieren möchten
3. tippen Sie rechts unten auf das Symbol "Export"

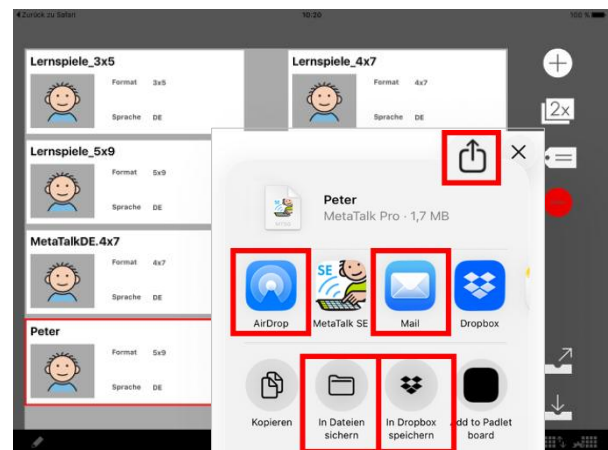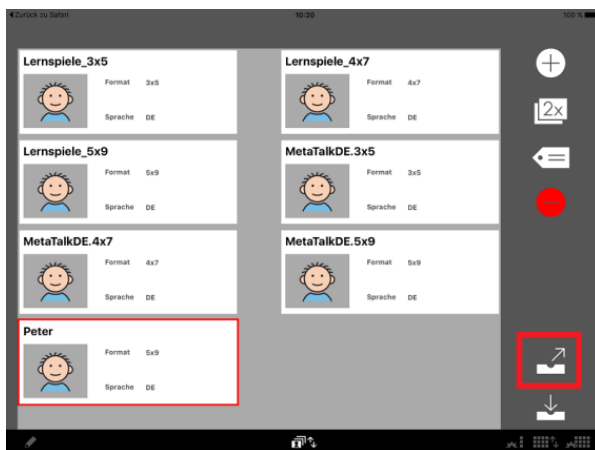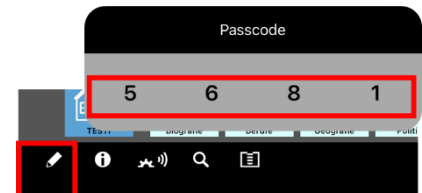

4. es öffnet sich ein Menü, bei dem Sie verschiedene Möglichkeiten haben:
 - **Airdrop:** Transfer von iPad (LIFEpad) zu iPad (LIFEpad)
 - **Mail:** zum Sichern wenn ein Mail-Account am LIFEpad eingerichtet ist.
 - **Dropbox:** zum Sichern wenn ein Dropbox-Account angelegt ist
 - **In Dateien sichern:** Möchten Sie Vokabulare/Seiten auf einem USB-Stick speichern, wählen sie diese Methode.


Tipp:

Wenn Sie per Mail, USB oder Dropbox sichern, können Sie die Dateien auf ihrem herkömmlichen Rechner oder auch auf einem externen Speichermedium (Festplatte, USB-Stick) in einem Ordner zusammenkopieren und so sichern. Bei Bedarf übertragen Sie die Dateien einfach dann per Mail oder Dropbox wieder zurück auf das LIFEpad.

Wiederherstellung MetaTalk Vokabulare oder einzelne Seiten

Schritt 1:

- **Airdrop:** die Datei die per Airdrop von einem auf ein anderes LIFEpad geschickt wurde, poppt am Empfänger-LIFEpad auf, zum Öffnen auf das **Quadrat-Pfeil-Symbol oben** klicken und "Öffnen in ..." > "MetaTalk" auswählen
- **Mail:** den Anhang (Seite/Vokabular) im Mail anklicken und "Öffnen in ..." > "MetaTalk" auswählen
- **Dropbox:** In der Dropbox-App die Datei auswählen, die geöffnet werden soll und dann auf das **Quadrat-Pfeil-Symbol** und "Öffnen in ..." > "MetaTalk" auswählen

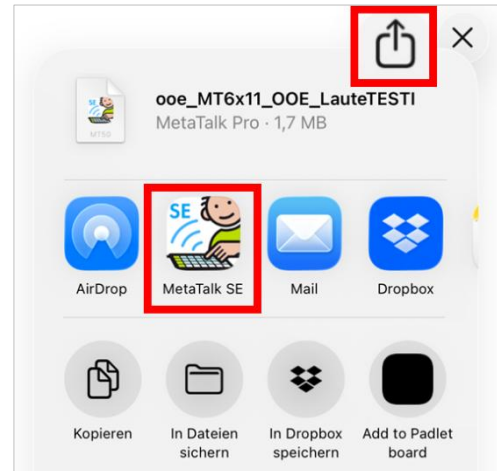

Schritt 2:

- **MetaTalk öffnen** und hier ist im Seiten- bzw. Vokabularmanager schon **ein roter Punkt zu sehen** (je nachdem, ob eine neue Seite oder ein neues Vokabular importiert wurde)



- **Seiten- bzw. Vokabularmanager öffnen**
- In der Inbox rechts unten ist wieder der **roten PUNKT** zu sehen. Tippen Sie darauf und wählen Sie das Vokabular/die Seite zum Importieren aus
- ev. Namen ändern und speichern



Tipp: Auch von der Homepage der Metacom-Symbole können Sie sich tolle fertige Vokabulare und Seiten herunterladen. Sie finden dies unter: www.metacom-symbole.de „Downloads > Vokabular zu MetaTalk“.







Predictable-Sicherung - Backup

Die Verwendung eines TherapyBox-Benutzer-Kontos ist sinnvoll – denn damit profitieren Sie von der automatischen Synchronisation und den **automatischen Backups**.

Bei den LIFEpads von IntegraTools wird das Benutzerkonto automatisch für Sie mithilfe der Apple-ID angelegt. Die Daten für das Benutzerkonto finden Sie auf Ihrem LIFEpad-Datenblatt.

Ist Ihr Gerät regelmäßig mit dem WLAN verbunden, brauchen Sie nichts weiter zu tun, die Synchronisation Ihres Benutzerkontos wird im Hintergrund automatisch durchgeführt.

Damit sind alle Einstellungen und Personalisierungen in Ihrem Benutzerkonto gespeichert.

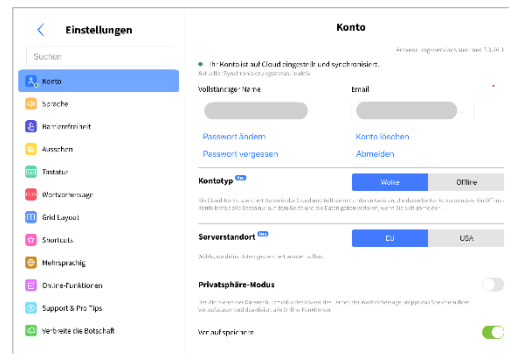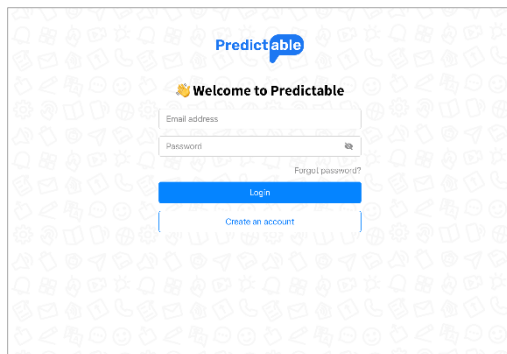



TD Snap – Benutzer und Seitensets sichern

Haben Sie in der App TD Snap Individualisierungen vorgenommen, ist es sehr wichtig, das Seitenset oder gleich den ganzen Benutzer regelmäßig zu sichern. Hierfür können wir Ihnen zwei Wege empfehlen:

- Sicherung des gesamten Benutzers (alle Seitensets und Einstellungen, ...)
ODER
- Sicherung/Synchronisierung einzelner Seitensets

Sicherung des gesamten Benutzers auf myTobiiDynavox

Sicherungsdateien für Benutzer enthalten die mit dem Benutzer verbundenen Seitensets und Einstellungen (zB Auswahlmethode, Stimmeneinstellungen, ...).

Die Sicherung des ganzen Benutzers ist die sicherste und effizienteste Methode, alle Daten u. Einstellungen auf einmal zu sichern. Für eine schnelle Sicherung nach kleinen Änderungen am Seitenset eignet sich das Synchronisieren des Seitensets gut.

Bei den LIFEpads IntegraTools wird das Benutzerkonto auf myTobiiDynavox automatisch für Sie mithilfe der Apple-ID angelegt.

Benutzersicherung auf myTobiiDynavox:

- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **bearbeiten**.
- Wählen Sie unten die Registerkarte **Benutzer** aus.
- Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
- Wählen Sie das Feld  **Sichern** neben dem Namen des Benutzers, den Sie sichern möchten.
- Wählen Sie **Auf myTobiiDynavox sichern**.
- Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich erst bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto anzumelden (Zugangsdaten siehe LIFEpad-Datenblatt)
- Als Name für die Sicherungsdatei wird der Name des Benutzers vorgeschlagen, diesen können Sie gleich übernehmen und wählen dann **weiter**
- **TIPP: es kann hilfreich sein, das Sicherungsdatum in den Dateinamen einzufügen (zB Romi_2026_0401 für den 1. April 2026)**
- Wählen Sie **fertig**.

Wiederherstellung des gesamten Benutzers von myTobiiDynavox

- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie unten die Registerkarte **Benutzer** aus.
- Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
- Ev. müssen Sie etwas nach unten scrollen und wählen unten in der Mitte **Neuer Benutzer**.
- Wählen Sie **Vorhandenen Benutzer wiederherstellen**.

- Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich erst bei Ihrem **myTobiiDynavox-Konto anzumelden** (Zugangsdaten siehe LIFEpad-Datenblatt) und wählen dann **Weiter**.
- Wählen Sie eine **Sicherungsdatei für einen Benutzer** aus der Liste aus und wählen rechts unten den **Pfeil nach rechts**
- Fertig – der Benutzer ist nun am Gerät wiederhergestellt

Sicherung von einzelnen Seitensets eines Benutzers auf myTobiiDynavox

Möchten Sie **nur einzelne Seitensets** eines Benutzers sichern, klappt das auch mit der Cloud von myTobiiDynavox sehr rasch und einfach.

Ein so gespeichertes Seitenset kann auch anderen Nutzern freigegeben werden, nähere Informationen zum Teilen von Seitensets entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch von TD Snap.

- **Kopie des Seitensets auf myTobiiDynavox speichern:**
- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
- Wählen Sie das aktuelle Seitenset.
- Wählen Sie das Symbol  **Speichern** neben dem Seitenset, das Sie speichern möchten.
- Wählen Sie **Kopie auf myTobiiDynavox** speichern.
- Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich erst bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto anzumelden (Zugangsdaten siehe LIFEpad-Datenblatt)
- Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Seitenset und (optional) eine Beschreibung ein und wählen Sie dann **speichern**.
- Eine Fortschrittsanzeige erscheint, die den Speichervorgang anzeigt.
- Wenn dieser abgeschlossen ist, wählen Sie **fertig**.

Synchronisation von einzelnen Seitensets eines Benutzers auf myTobiiDynavox

- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
 - Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste
 - Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich erst bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto anzumelden (Zugangsdaten siehe LIFEpad-Datenblatt)
 - Wählen Sie **Seitenset synchronisieren**.
 - Das war alles! Ihr Seitenset ist nun mit Ihrem myTobiiDynavox-Konto synchron.
-
- **HINWEIS:** Über das Feld „Synchronisieren“  in der oberen Menüleiste können Sie die Sicherung des Seitensets dauerhaft aktuell halten. So bleibt Ihr Seitenset immer synchronisiert mit MyTobiiDynavox.

Die auf myTobiiDynavox gespeicherte Seitenset-Dateien finden Sie nach Anmeldung mit Ihrem TobiiDynavox-Konto (Zugangsdaten siehe LIFEpad-Datenblatt) auf www.myTobiiDynavox.com

unter: Meine Produkte > TD Snap > Seitensets

