

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung genau durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch auf.

n-ABLER Joystick

Pretorian
Technologies LTD.

ERSTE SCHRITTE

Leuchtdiode

Die Leuchtdiode zeigt an, welche Funktion gerade aktiviert ist:

Grün: Funktion Halten ist nicht aktiv

Rot: Funktion Halten ist aktiv
Blinklicht (beide Farben):
Feststelltaste X/ Y-Achse ist aktiv

Grünes Blinklicht:
Programmiermodus ist aktiv

Feststelltaste X/ Y-Achse

Wird diese Taste gedrückt, so bewegt sich der Mauszeiger nur mehr auf einer Achse hin und her und kann somit schrittweise besser positioniert werden. Drücken Sie die Taste einmal, so ist nur eine horizontale Ausrichtung möglich. Drücken Sie dann die Taste ein zweites Mal, so kann der Mauszeiger nur mehr vertikal positioniert werden. Um die Bildlauffunktion zu aktivieren (ähnlich wie bei einer Radmaus) drücken Sie die Taste ein drittes Mal. Um in den normalen Modus zurückzukehren, drücken sie die Taste ein viertes Mal.

Wenn der Ton eingeschaltet ist, hören Sie bei jedem Achsenwechsel einen Hinweiston. Die Leuchtdiode blinkt, solange aktiviert ist.

Linke Maustaste (Rot)

Entspricht genau der Funktion der linken Maustaste auf einer herkömmlichen Maus.

Doppelklick-Taste (Grün)

Da das Doppelklicken mit der linken Maustaste oft sehr mühsam ist, haben wir eine eigene Taste dafür eingebaut. Drücken Sie die grüne Taste einmal und Ihr n-ABLER macht daraus automatisch einen Doppelklick.

Wenn Sie den Ton eingeschaltet haben, hören Sie zwei kurze Hinweistöne, die Ihnen anzeigen, dass ein Doppelklick ausgeführt wurde.



Rechte Maustaste (Gelb)

Entspricht genau der Funktion der rechten Maustaste auf einer herkömmlichen Maus.

Positionieren des

Mauszeigers

Der Mauszeiger bewegt sich immer genau in die Richtung, in die Sie den Joystick bewegen.

Je nach eingestellter Mausgeschwindigkeit bewegt sich der Mauszeiger schneller oder langsamer im Vergleich zur Bewegung des Joysticks.

Funktionstaste Halten (Blau)

Beim Ziehen eines Objektes über den Bildschirm ist es oft sehr schwierig, die Bewegung auszuführen und gleichzeitig die linke Maustaste gedrückt zu halten.

Ihr n-ABLER hat dafür eine eigene Funktionstaste. Drücken Sie die Taste Halten, um das Objekt an den Mauszeiger zu binden und bewegen Sie dann das Objekt an die gewünschte Stelle, ohne die linke Maustaste gedrückt zu halten. Danach drücken Sie eine beliebige Taste, um diese Funktion wieder auszuschalten.


Wenn der Ton eingeschaltet ist, hören Sie eine ansteigende Tonfrequenz beim Aktivieren der Funktion Halten und eine absteigende Tonfrequenz sobald diese Funktion ausgeschaltet wird. Ist die Funktion Halten aktiviert, leuchtet die Leuchtdiode rot. So haben Sie auch eine optische Kontrolle über die Aktivierung dieser Funktion.

Mausgeschwindigkeit

Mit dieser Taste können Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Es gibt vier Geschwindigkeitsstufen. Wenn Sie die niedrigste Geschwindigkeit erreicht haben und die Taste noch einmal drücken, wechselt das Gerät wieder zur höchsten Geschwindigkeitsstufe.

Wenn der Ton eingeschaltet ist, hören Sie drei kurze Hinweistöne bei jedem Wechsel der Geschwindigkeitsstufe.

Die gewählte Einstellung wird von Ihrem n-ABLER automatisch gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart des Computers erhalten.

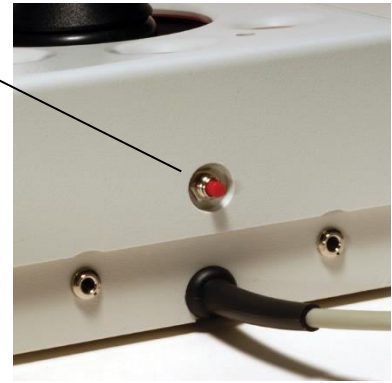

Programmiermodus



Schritt 1 – Ausrichtung Ihres n-ABLER

Bringen Sie Ihr Gerät in die gewünschte Position.

Schritt 2 – Schalten Sie den Programmiermodus ein

Halten Sie hierfür die Taste für die Geschwindigkeitseinstellung an der Rückseite des Gerätes länger als eine Sekunde gedrückt. Wenn Sie die Taste loslassen, hören Sie einen speziellen Hinweiston, der Ihnen anzeigt, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Die Leuchtdiode blinkt.

Schritt 3 – Bestimmen Sie am Gerät, wo oben ist

Bewegen Sie den Joystick in die Richtung, in der sich der Mauszeiger nach oben bewegen soll. Der Mauszeiger wird sich nicht sofort bewegen. Erst nachdem das Gerät Ihre Einstellung übernommen hat, hören Sie einen einzelnen Hinweiston und der Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegt sich in die angegebene Richtung.

Schritt 4 – Ton ein- bzw. ausschalten

Um den Ton einzuschalten, drücken Sie die rote Taste einmal. Um den Ton auszuschalten, drücken Sie die gelbe Taste einmal. Bei jeder Änderung hören Sie einen einzelnen Hinweiston (egal ob der Ton ein- oder ausgeschaltet ist).

Schritt 5 – Linke Maustaste definieren

Soll die rote Taste als linke Maustaste verwendet werden, so drücken Sie diese einmal. Ansonsten drücken Sie die gelbe Taste.

Sie hören einen speziellen Hinweiston, der anzeigt, dass Sie den Programmiermodus verlassen.

Ihre persönlichen Einstellungen bleiben in Ihrem Gerät gespeichert und sind auch nach jedem Neustart des Computers noch verfügbar.

Sollten Sie einen Fehler machen, aktivieren Sie den Programmiermodus neuerlich und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5.