

Wie sichere ich mein LIFEpad und dessen Inhalte?



Ein LIFEpad/iPad sollte regelmäßig gesichert werden.

Unterbleiben Backups und es kommt zu einem Problem – etwa durch eine mehrfach falsche Eingabe des Entsperrcodes – können sämtliche Daten und Einstellungen verloren gehen, sodass eine Neueinrichtung erforderlich ist. Alle individuell erstellten Inhalte sind dann unwiederbringlich weg!

Wer hingegen regelmäßig Backups erstellt, kann diese im Bedarfsfall nutzen, um das LIFEpad auf einen früheren Stand zurückzusetzen.

Dringende Empfehlung:

Zusätzlich zu den allgemeinen LIFEpad-Backups sollten **auch die Inhalte von Apps**, in denen **individuelle Anpassungen** vorgenommen werden, regelmäßig separat gesichert werden (z. B. GoTalk Now, MetaTalk, Predictable, TD Snap, Book Creator).

Wird eine App versehentlich vom LIFEpad gelöscht, kann sie zwar erneut aus dem App Store installiert werden, die individuell erstellten Inhalte (Seitensets und Kommunikationsbücher) sind jedoch ohne vorherige Sicherung unwiderruflich verloren.



Gesamtes LIFEpad sichern

Eine Sicherungskopie ermöglicht es nicht nur, Daten abzusichern, sondern auch, bestehende Einstellungen problemlos auf ein neues Gerät zu übertragen. Wurde ein Backup erstellt, kann dieses jederzeit genutzt werden, um die gespeicherten Informationen bei Bedarf wieder auf dem Gerät herzustellen.

Sichern Sie Ihr LIFEpad regelmäßig (wir empfehlen einmal pro Monat), so sind Sie immer am aktuellen Stand! Um den gesamten Geräteinhalt als Backup zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten:

A) Sicherung/Backup des LIFEpads in der iCloud:



Das LIFEpad wird automatisch in der iCloud gesichert, sobald es gesperrt ist, mit Strom versorgt wird und eine WLAN-Verbindung besteht.

Achtung: In der kostenlosen iCloud stehen lediglich **5 GB Speicherplatz** zur Verfügung. Für größere Datenmengen ist der Erwerb von **iCloud+** erforderlich (nicht im Kauf enthalten).

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

<https://support.apple.com/de-at/108922>




B) Sicherung/Backup des LIFEpads am PC/Mac:




Eine weitere Möglichkeit zur Sicherung der LIFEpad-Daten ist die Erstellung eines Backups auf einem Windows-PC oder Mac. Hierfür wird die Software „**Apple Geräte**“ benötigt. Auf Windows-11-Geräten ist diese **häufig bereits vorinstalliert**; andernfalls kann sie kostenlos über den **Microsoft Store** heruntergeladen werden: <https://apps.microsoft.com/detail/9NP83LWLPZ9K>

1. Das LIFEpad mit dem Windows-Gerät via USB-Kabel verbinden, Gegebenenfalls muss auf dem LIFEpad die Option „**Vertrauen**“ bestätigt werden..
2. Die App „**Apple-Geräte**“ am Windows-Gerät öffnen.
3. In der Seitenleiste das **entsprechende Gerät auswählen** und den Punkt „**Allgemein**“ in der Seitenleiste anwählen

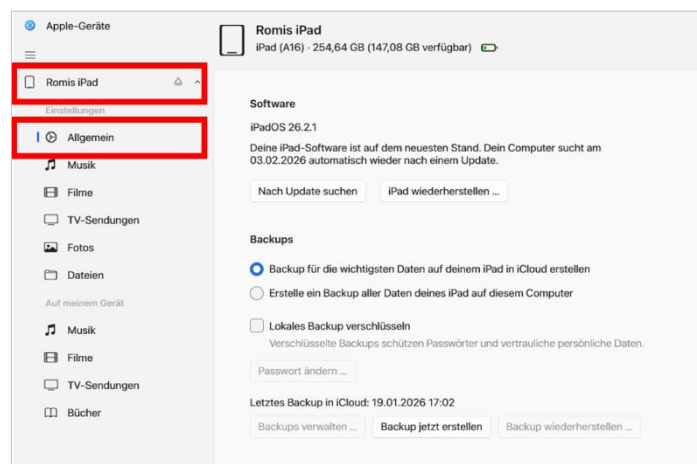


4. Den Punkt „**Erstelle ein Backup aller Daten deines LIFEpads auf diesem Computer**“ wählen, um die Backups am Windows-Gerät zu sichern.
5. „**Backup jetzt erstellen**“ anklicken
6. Wenn das Backup abgeschlossen ist, findet sich unter „**Backups verwalten**“, die aktuelle Backup-Datei.

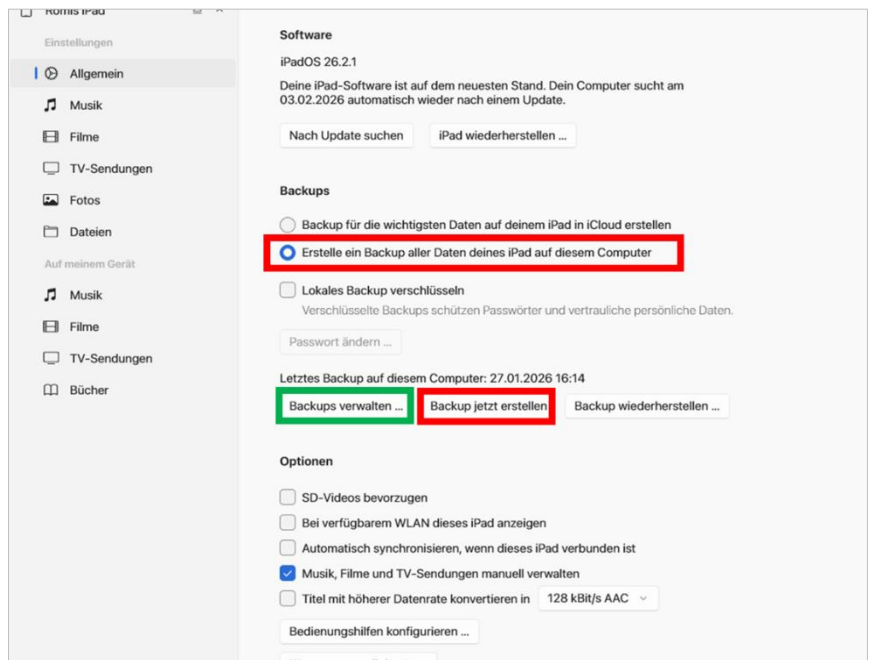

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur *Wiederherstellung* eines LIFEpads aus einem Backup

Tritt ein Problem mit dem LIFEpad auf, kann ein kürzlich erstelltes Backup zum Wiederherstellen der Informationen auf dem Gerät verwendet werden.

1. Das LIFEpad mittels USB-Kabel mit dem Windows-Gerät verbinden. Gegebenenfalls muss auf dem LIFEpad die Option „**Vertrauen**“ bestätigt werden.
2. Die App „**Apple-Geräte**“  am Windows-Gerät öffnen.
3. In der Seitenleiste das **entsprechende Gerät auswählen**.
4. Den Punkt „**Allgemein**“ in der Seitenleiste anwählen
5. Den Punkt „**Backup wiederherstellen**“ wählen
6. Im folgenden Einblendmenü „**Backup wiederherstellen**“, das Backup auswählen, das auf dem Gerät wiederhergestellt werden soll und dann „**iPad wiederherstellen**“ wählen.

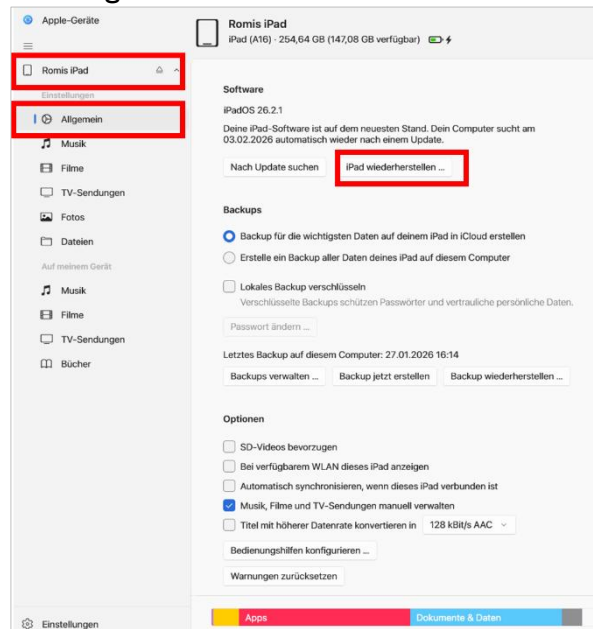

Achtung:

Es ist möglich, dass in Apps wie GoTalk Now, MetaTalk oder TD Snap erstellte Kommunikationsbücher bzw. Kommunikationsoberflächen in einem allgemeinen LIFEpad-Backup **nicht** automatisch mitgesichert werden.

Daher wird dringend empfohlen, diese Inhalte **zusätzlich separat zu sichern!**

Beispielsweise auf einen USB-Stick, Dropbox oder mit der App „Apple Geräte“, abhängig von der jeweiligen App.

Maßgeblich ist dabei die nachfolgende, app-spezifische Sicherungsanleitung für die jeweilige Kommunikations-App.



Predictable-Sicherung - Backup



Die **Verwendung eines TherapyBox-Benutzer-Kontos** ist sinnvoll – denn damit profitieren Sie von der automatischen Synchronisation und den **automatischen Backups**.

Bei den LIFEpads von IntegraTools wird das Benutzerkonto automatisch für Sie mithilfe der Apple-ID angelegt. Die Daten für das Benutzerkonto finden Sie auf Ihrem LIFEpad-Datenblatt.

Ist Ihr Gerät **regelmäßig mit dem WLAN verbunden**, brauchen Sie nichts weiter zu tun, die Synchronisation Ihres Benutzerkontos wird im Hintergrund automatisch durchgeführt.

Damit sind alle Einstellungen und Personalisierungen in Ihrem Benutzerkonto gespeichert.

