




Predictable


weitere Funktionen



Einstellungen

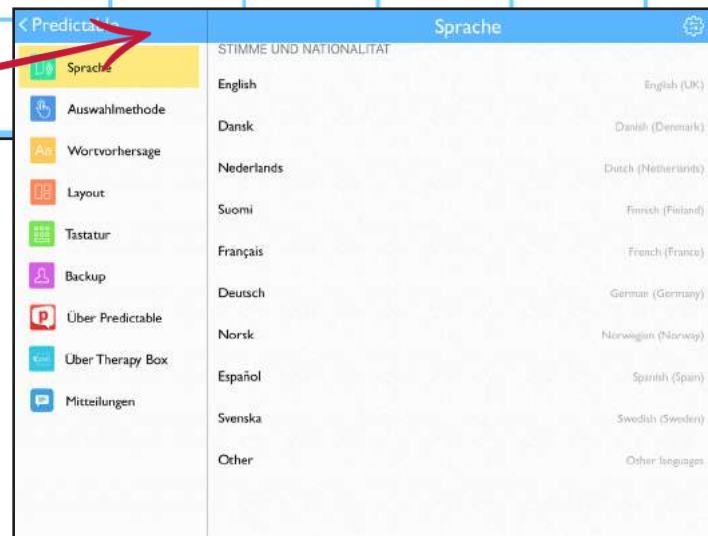

Löschoptionen

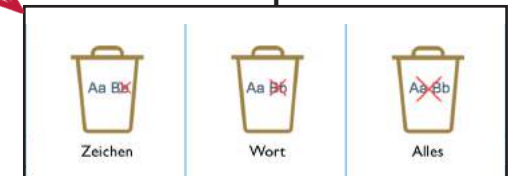

Emotionen



vorgefertigte Kategorien



Predictable - Einstellungen- Wortvorhersage

Ich hab^e mir

habe das hab die
haben mich hab

habe das hab die haben mich hab

< Predictable

- Sprache
- Auswahlmethode
- Wortvorhersage**
- Layout
- Tastatur
- Backup
- Über Predictable

Wortvorhersage

Vorhersageart
Konfigurieren Sie Ihre Wortvorhersageeinstellungen

Selbst gelernte Wörter organisieren
Wörter, die nach 5 Wiederholungen gelernt wurden

Verlauf speichern
Speichert die Wörter und Sätze, die Sie verwendet haben

< Einstellungen der Vorhersage ✓

Vorhersageart

Blase Zeilen **Sprechblase & Streifen**

Sprechblasenvorhersage
Erscheint im Nachrichtenfenster als ein Overlay neben dem Wort, das Sie gerade tippen, damit es immer gut sichtbar ist

Ein Wort Ein Wort kleine Blase große Blase

Zeilen-Vorhersage
Das klassische Predictable Layout erscheint oberhalb der Tastatur für einen einfachen Zugang

Ein Wort **Zwei Wörter**

Autokorrektur
Die wahrscheinlichste Wortvorhersage wird direkt im Nachrichtenfenster angezeigt. Tippen Sie auf die Leertaste, um es in die Nachricht einzufügen

Aus Ein

das mich



mir die mir das

habe das hab die
haben mich hab

hab haben
habt hab




Predictable - Layout

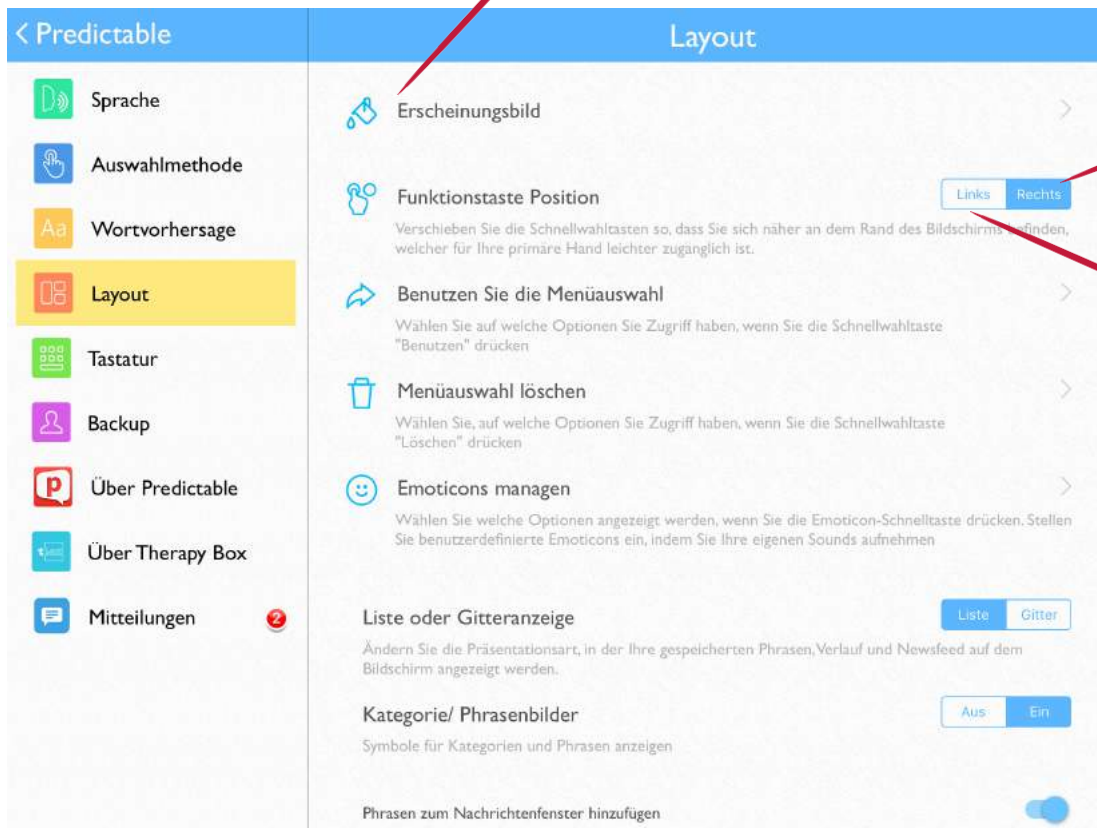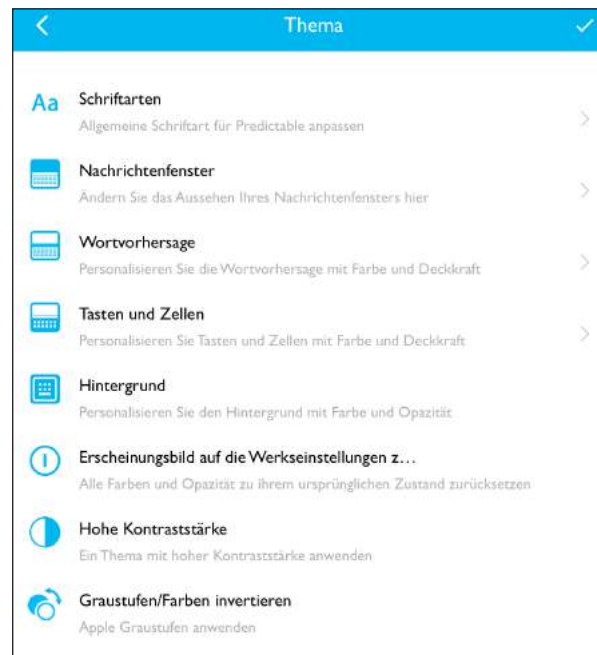




Predictable - Thema konfigurieren

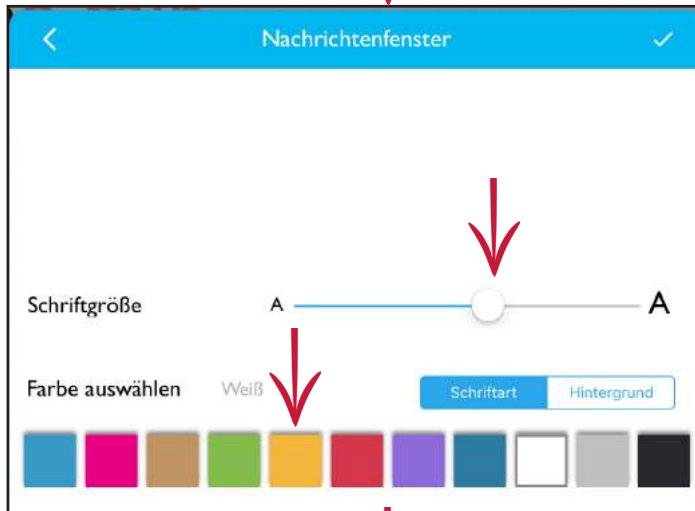

Schriftgröße und Farbe lassen sich für die Wortvorhersage ebenfalls konfigurieren

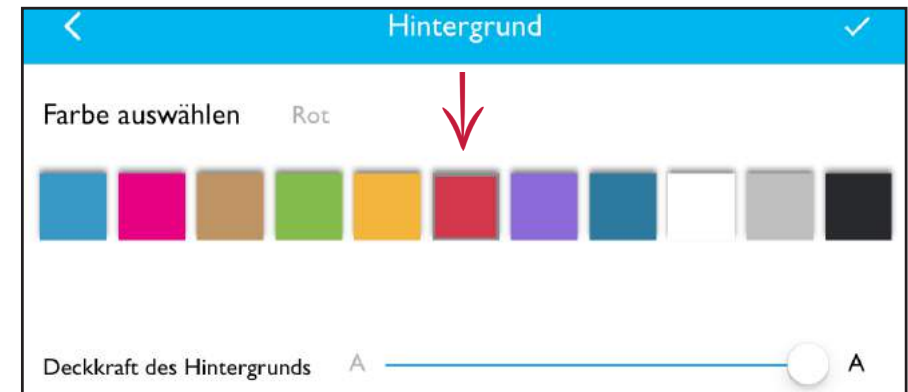


Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ü
Ä	SS	Y	X	C	V	B	N	M	Ö
⌂	123	⚙️	⌵	⬅️	✍️	🔍	📶	⬅️	



Predictable - vorgefertigte Kategorien

durch langes drücken auf eine Kategorie erhält man das Dialogfeld. Drücken Sie „Bearbeiten“ zum anpassen der Kategorie

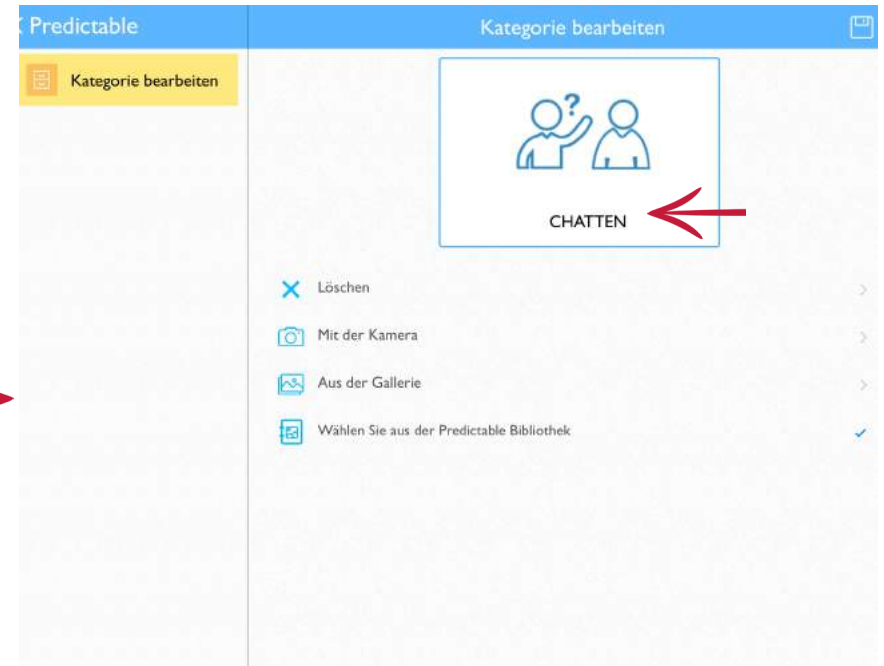

Hier kann der Name und das Symbol für die jeweilige Kategorie angepasst werden