




Zum Übertragen eines Kommunikationsbuches auf ein anderes iPad




GoTalk


NEW

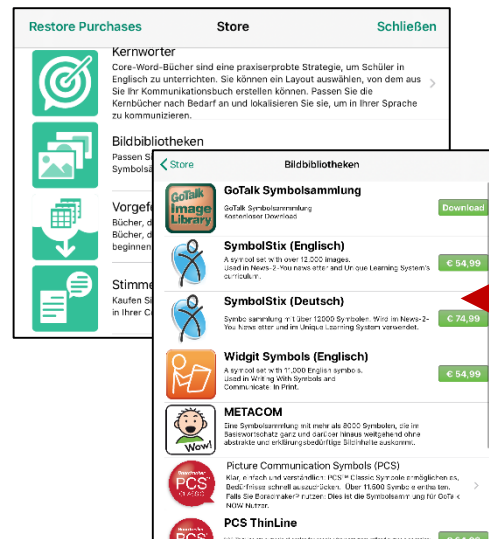

Stimmen und Symbolsammlungen kaufen

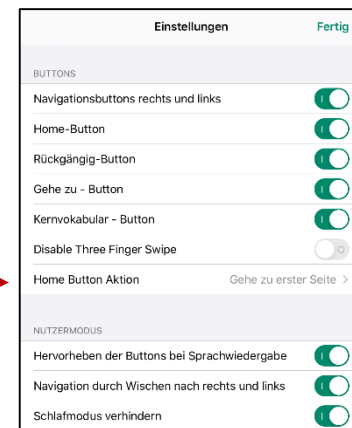


Nähere Informationen sh. S. 5-7

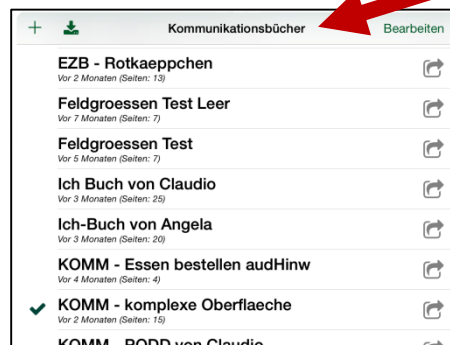


Liste an Kommunikationsbüchern




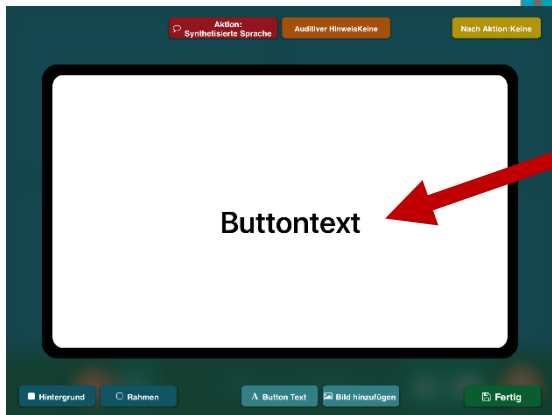

Button bearbeiten/hinzufügen (sh. S.3)

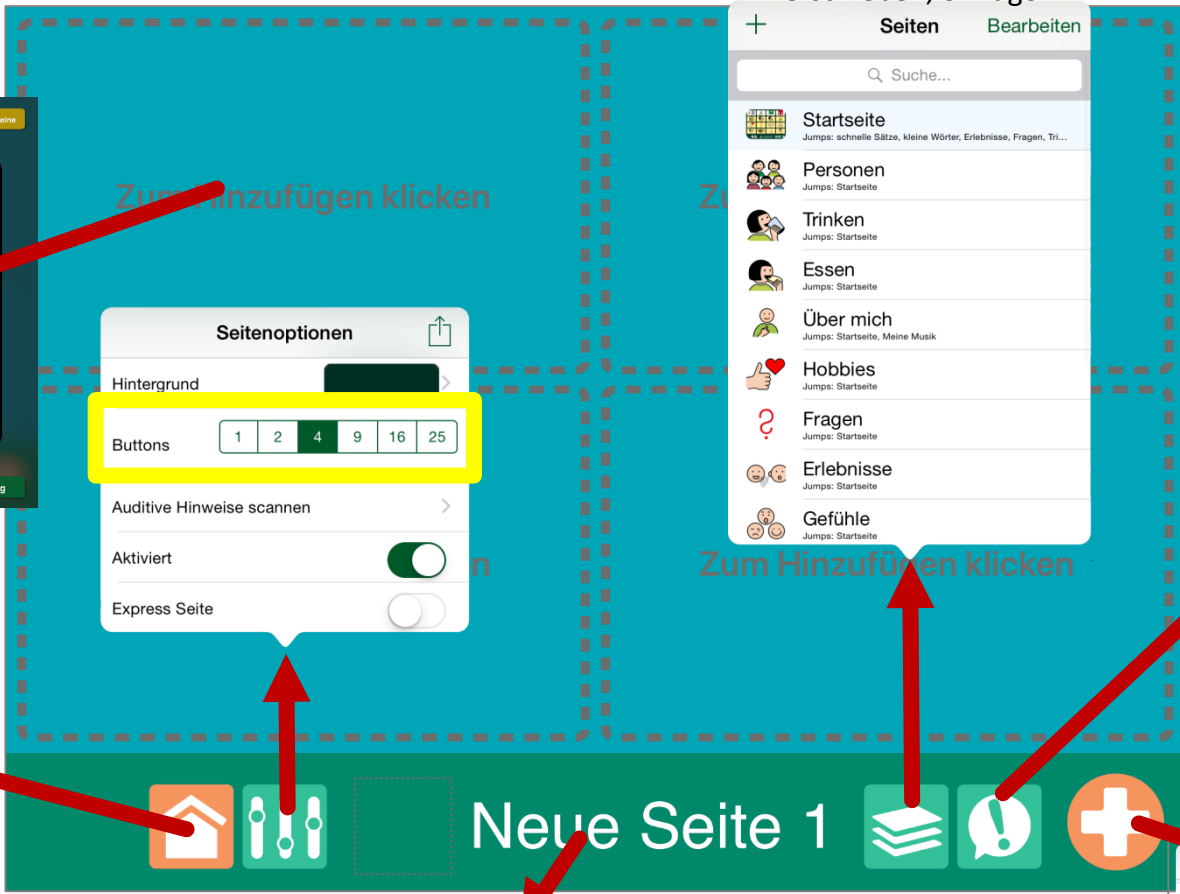


Zurück zur Startseite

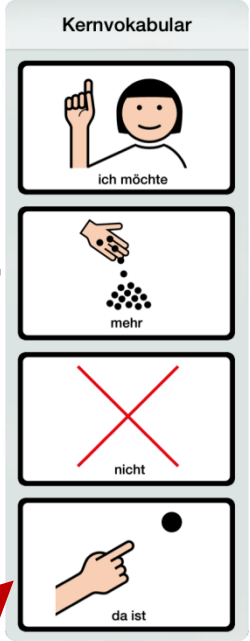


Vier Kernvokabular – Tasten bearbeiten



Icon für Seite definieren

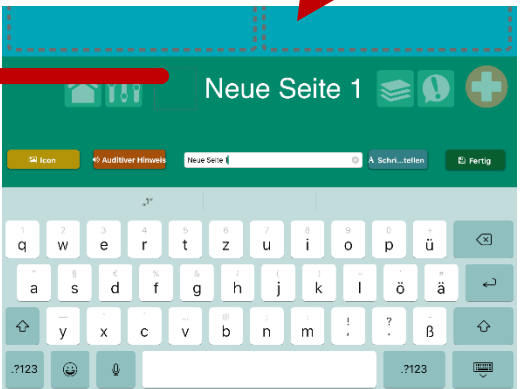

Seitenname & -icon bearbeiten

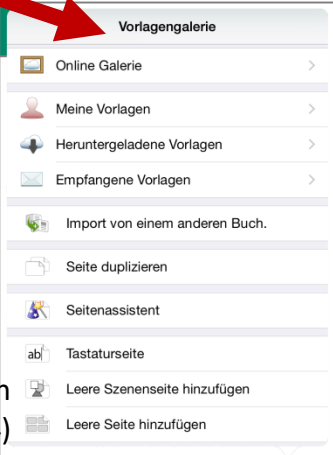





Seiten & Vorlagen einfügen (sh. S.4)

Seiten löschen, verschieben, einfügen




Hier wird definiert, was passieren soll, wenn die Taste gedrückt wird.

Diese Option kann hilfreich für Blinde & Sehbehinderte sein.

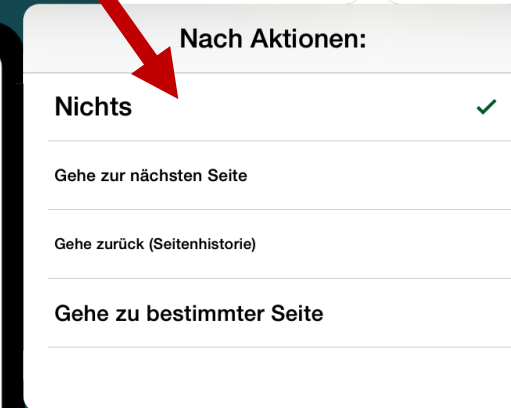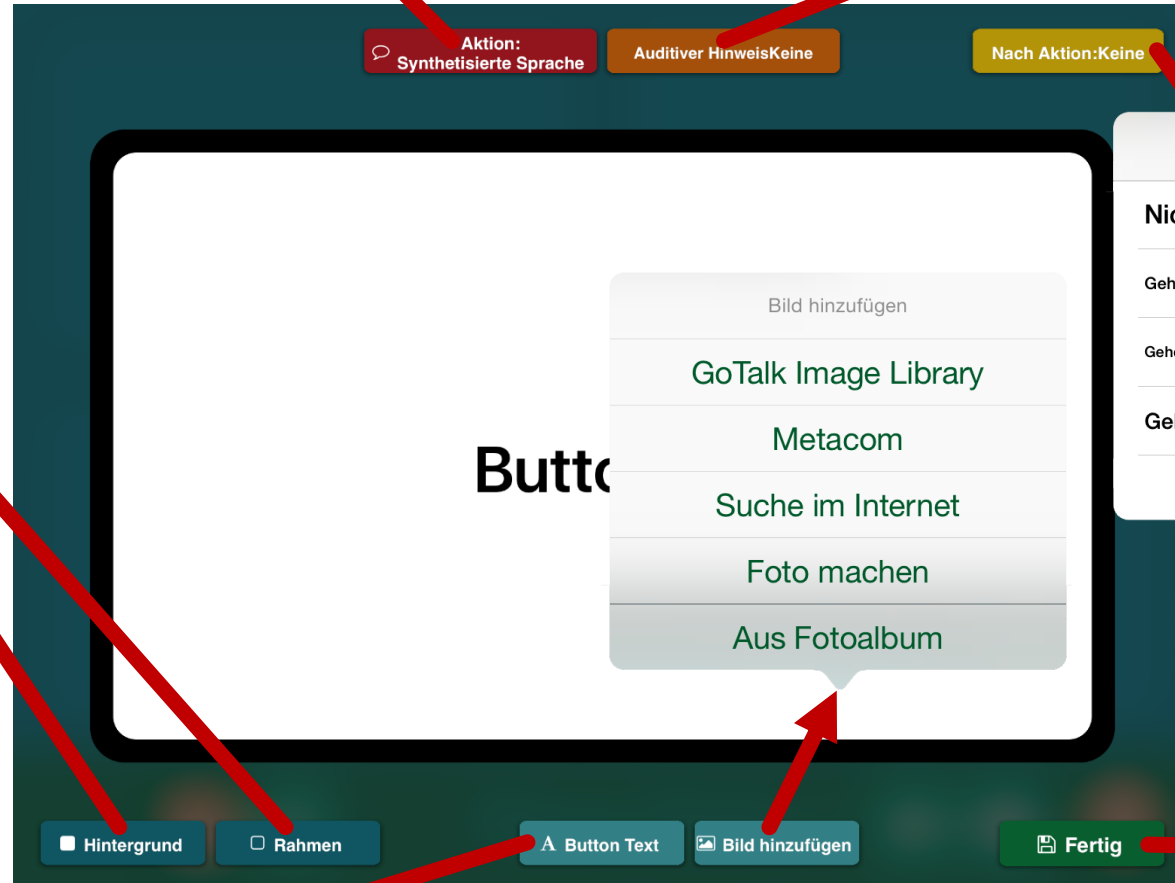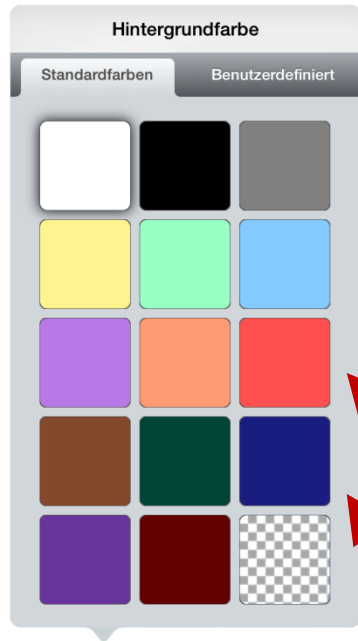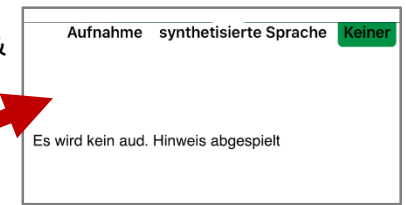


Bestimmen Sie, was nach Ausführen einer Aktion (rote Taste) passieren soll.

Beendet und speichert das Bearbeiten der Taste

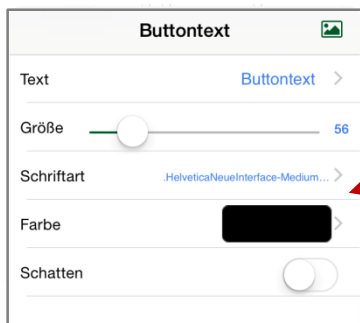


Hier wird der Text bearbeitet, der auf der Taste angezeigt wird.

Auf dieser Taste können Sie Bilder aus geladenen Symbolbibliotheken (sh. S.1: „Store“), aus dem Fotoalbum oder aus dem Internet einfügen.

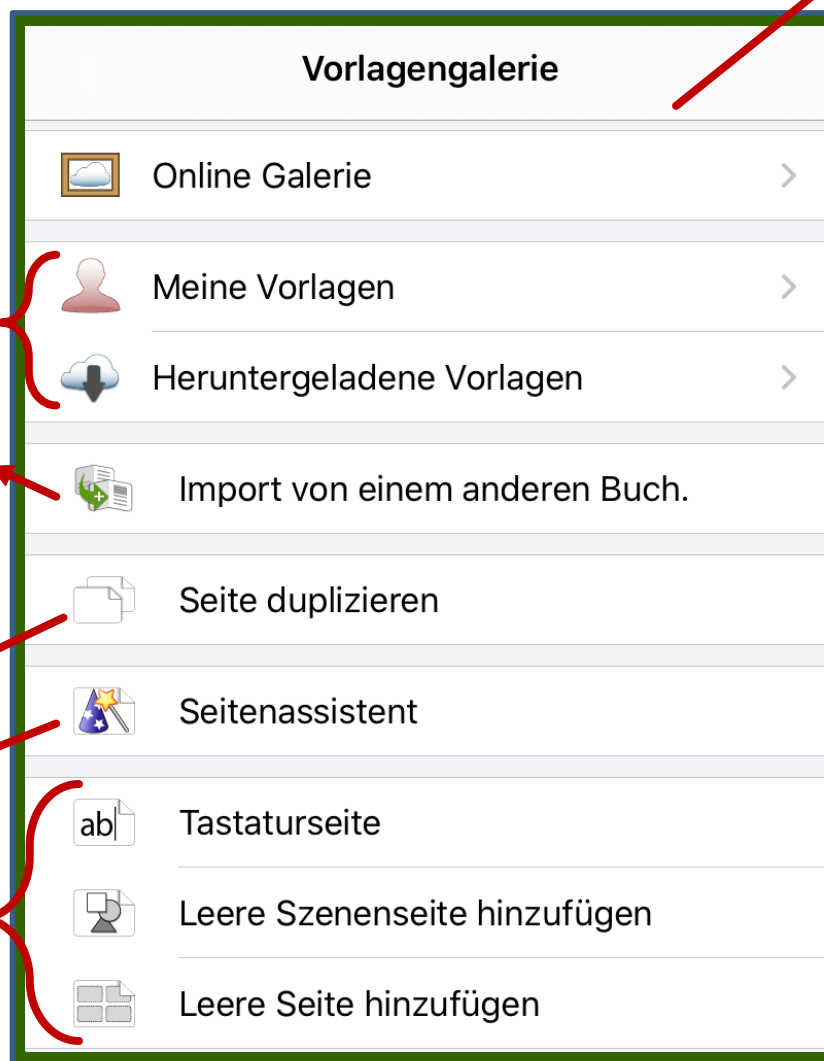

## Vorlagen aus dem Internet laden

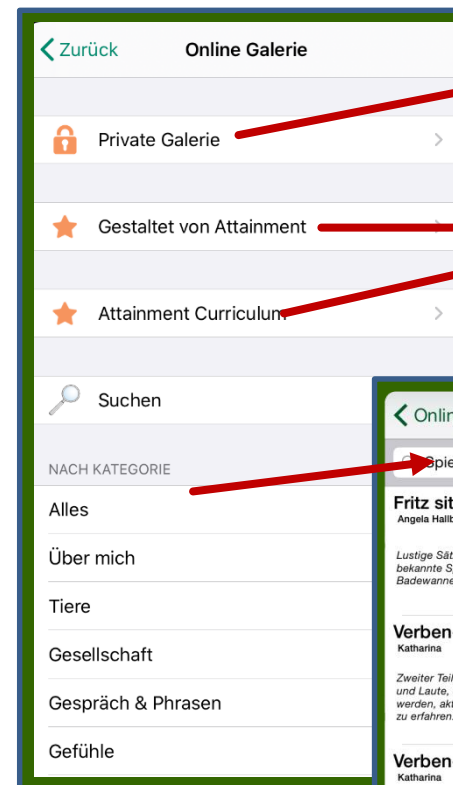

Passwort-geschützte Vorlagen herunterladen

(Englische) Vorlagen des Herstellers



In der öffentlichen Galerie können Sie entweder mit einem Suchbegriff suchen (sh. rechts) oder die Kategorien (sh. oben) durchschmökern.

Tipp: Verwenden Sie die öffentliche Online-Galerie und schauen Sie dort regelmäßig hinein, hier werden laufend neue Vorlagen hochgeladen. Weiters sei die Facebook-Gruppe „Unterstützte Kommunikation“ erwähnt, in der oftmals neu hochgeladene Inhalte beschrieben werden. Lassen Sie sich inspirieren! ☺



Hier kann man die Haus-Taste im Nutzermodus entfernen.  
Achtung: Verlassen des Nutzermodus funktioniert dann nur über Wischen mit drei Fingern von oben nach unten!



Hier kann man die Taste für das Inhaltsverzeichnis deaktivieren.



Aktionen der Haus-Taste: „Gehe zu erster Seite“ oder „Nutzermodus verlassen“!

Blättern zur nächsten bzw. letzten Seite kann hier (de)aktiviert werden. Aktivierung z.B. sinnvoll bei Bilder- oder Fotobüchern.

Im Hintergrund laufende Musik wird gestoppt, wenn GoTalk Now gestartet wird.

Auditive Hinweise können bei den einzelnen Buttons hinterlegt sein. Hier kann gewählt werden ob und in welcher Lautstärke diese wiedergegeben werden sollen.

Sollen auditive Hinweise auch für die Navigationstasten verwendet werden?

Hier kann eingestellt werden, wie lange ein Button berührt werden muss, um sie auszulösen.

Einstellungen

Fertig

BUTTONS

Navigationsbuttons rechts und links

Home-Button

Rückgängig-Button

Gehe zu - Button

Kernvokabular - Button

Disable Three Finger Swipe

Home Button Aktion

Gehe zu erster Seite >

NUTZERMODUS

Hervorheben der Buttons bei Sprachwiedergabe

Navigation durch Wischen nach rechts und links

Schlafmodus verhindern

Andere Audioquellen stoppen

Buttonauswahl durch

Loslassen >

Auditive Hinweise

Keiner >

Buttons ohne aud. Hinweise überspringen

Aud. Hinweise für Navigation

Aud. Hinweise für Navigation einrichten

>

Passwort zum Verlassen des Nutzermodus

Passwort einrichten

>

Bücher beim Öffnen nicht konvertieren

Wortvorhersage auf Tastatur ausblenden

ZUGANG

Freigabezeit

Keine >



Hier kann man die Pfeiltasten im Nutzermodus zum Blättern ausschalten.



Hier kann man die Taste ausschalten, mit dem man auf die jeweilige vorherige Seite kommt.



Blendet Kernvokabular-Taste aus

Verhindert die 3-Finger-Geste zum Verlassen des Nutzermodus/Editor

Buttons werden umrahmt, wenn sie angeklickt werden. Das kann hier deaktiviert werden.

Ist die GoTalk Now App geöffnet, ist die automatische Sperre des iPads deaktiviert.

Wie wird ein Button ausgelöst? „Loslassen“ oder „Berühren“

Wichtige Einstellung beim Scanning: Wenn ein Button keinen auditiven Hinweis hat, wird dieser beim Scanning übersprungen.

Soll zum Verlassen des Nutzermodus ein Passwort verwendet werden und wenn ja, welches?

Blendet die Wortvorhersage auf der Tastaturseite ein oder aus

Definieren Sie, ob und wie gescannt werden soll. „Keiner“ bedeutet dass kein Scanning verwendet werden soll. Sie können verschiedene Taster bzw. den Bildschirm als Taster wählen.

Ist diese Option eingeschaltet, startet das Scanning automatisch.

Wenn zwei Taster verwendet werden, können hier die Funktionen der beiden Taster vertauscht werden (Weiterschalten und Auswahl).

Definieren Sie, ob auch die vorhandenen Schaltflächen der Fußzeile („Zurück“, „Weiter“ usw.) beim Scanning mit einbezogen werden sollen.

Attainment Switch ist eine App, für das iPhone um dann dieses als Taster für GoTalk Now zu verwenden.


Ein= definiert die zuletzt eingestellte Schriftart für alle neu erstellten Buttons

Position des Nachrichtenfensters (Express-Seiten) oben oder unten

Erstellt jede neue Seite mit Nachrichtenfenster (Express-Seiten)

einzelne Buchstaben bzw. Silben im Nachrichtenfenster als Wörter gesprochen.

Wörter werden beim Einfügen gesprochen

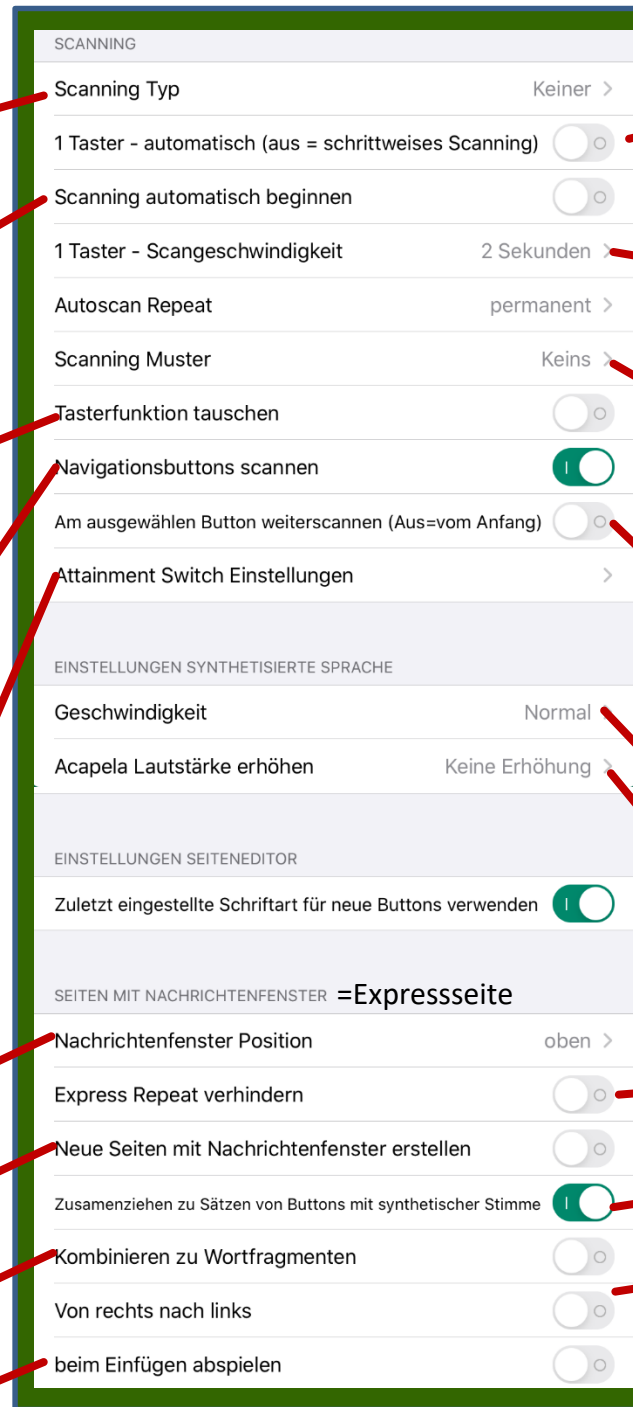

Ist diese Option eingeschaltet, wird automatisch gescannt, d.h. es wird nur ein Taster verwendet. Ist sie ausgeschaltet, werden zwei Taster verwendet.

Wenn Sie nur einen Taster verwenden, können Sie hier einstellen, wie schnell sich der Scanningrahmen bewegen soll.

Ist hier „Keins“ ausgewählt, werden die Tasten einer Seite nacheinander gewählt. Bei „Zeile/Spalte“ werden erst die Zeilen ausgewählt und dann die einzelnen Elemente dieser Zeile.

Aus: Bei Scanning wird immer bei der ersten Taste der Seite begonnen. Ein: Das Scanning wird bei der zuletzt gewählten Taste fortgesetzt.

Hier können Sie die Geschwindigkeit der synthetischen Stimme einstellen.

Hier können Sie die Höhe der synthetischen Stimme einstellen.

Blendet die Wiederholungstaste im Nachrichtenfenster von Expressseiten aus

Einzelne Buttons werden als Satz gesprochen

Ändert die Schreib-Lese-Richtung




Soll das Nachrichtenfenster beim Scanning mitgescannt werden?

Ist diese Option eingeschaltet, werden bei den Videos unten große Schaltflächen „Play/Pause“ und „Abbrechen“ eingeblendet.

Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Schließen und erneutem Öffnen der App das Hauptmenü (sh. S.1) angezeigt.

Ist diese Option aktiviert, werden auf den Tasten in Nutzermodus keine Bilder angezeigt.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann man auf einer Seite die Option „Quiz“ einstellen, Dies bedeutet, dass die Tasten auf dieser Seite nach dem Zufallsprinzip gemischt werden. Im Seiteneditor kann dann jede Seite als „Quiz-Seite“ aktiviert werden.

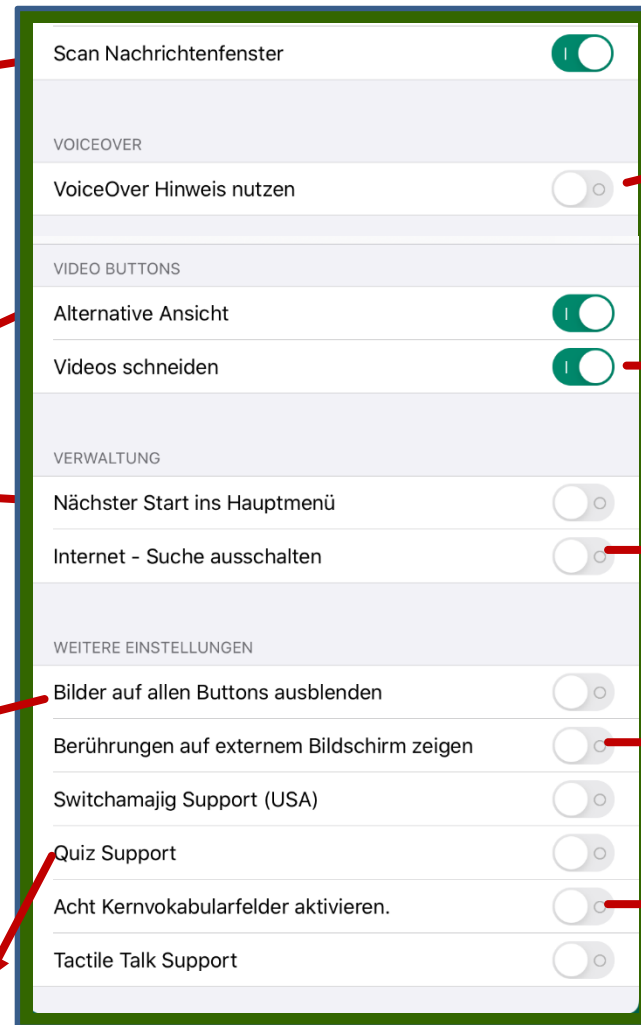

Hier kann der VoiceOver Hinweis aktiviert werden

Ist diese Option eingeschaltet, können Videos nach dem Einfügen in GoTalk Now zugeschnitten werden.

Ist diese Option aktiviert, können beim Einfügen eines Bildes auf einer Taste (sh. S.3) keine Bilder im Internet gesucht werden.

Diese Einstellung ist bei Präsentationen sinnvoll, da auf dem Beamer gezeigt wird, wo der iPad Bildschirm berührt wird.

Ist diese Option aktiviert, werden 8 statt 4 Kernvokabularfelder aktiviert