




PCEye 5

Startanleitung

Was ist im Lieferumfang enthalten?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ➊ PCEye 5 | ➋ Sicherheits- und Zertifizierungsunterlagen |
| ➌ Startanleitung | ➍ Transporttasche |
| ➎ Montageplatte | ➏ Adapter USB-C zu USB-A |
| ➐ Vorbereitungsset für Montageplatte | |

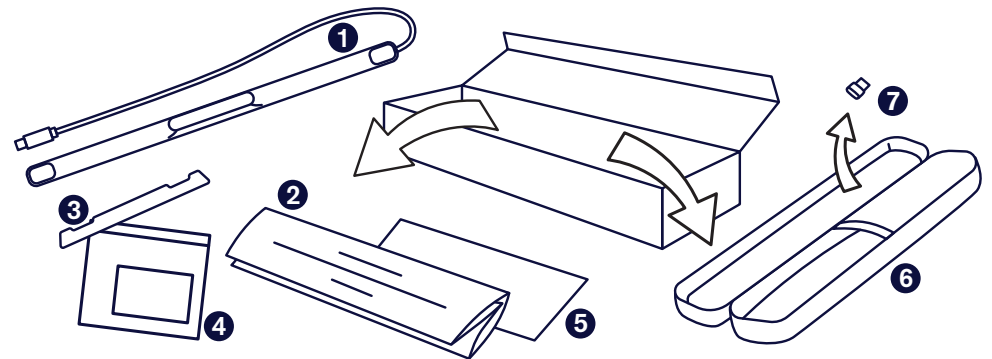


Software

Im Lieferumfang des PCEye 5 ist die Software „TD Control“ enthalten. Wenn Sie das Produktpaket Magic EyeFx erworben haben, finden Sie auf der Lizenzkarte weitere Informationen.

Das Gerät kennenlernen

- | | |
|---------------|---------------------------|
| ➊ Eyetracker | ➋ Anbringungsmarkierungen |
| ➌ USB-Stecker | ➍ Halterungsmagnete |

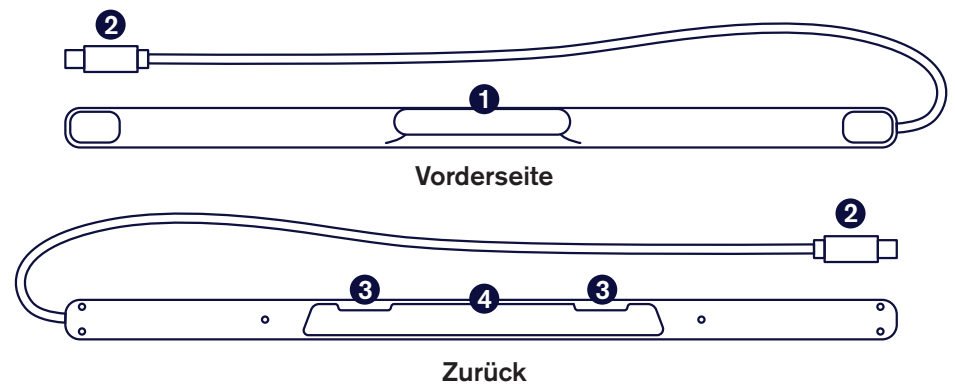

Wir helfen Ihnen gerne

Zusätzlicher Support

Community: <https://qrco.de/fbdede>

Technischen Support erhalten Sie von Ihrem Tobii Dynavox-Händler vor Ort.

Schulungsmaterialien

Benutzerhandbuch: <http://qrco.de/PCEyeManual>

Benutzerhandbuch von TD Control: <https://qrco.de/TDCmanual>

Lernkarten für Communicator 5: <https://qrco.de/C5Cards>

Lernkarten für TD Snap Core First: <https://qrco.de/TDSnapCards>

Lernkarten für TD Snap Text: <https://qrco.de/TextCards>

Hier finden Sie weitere Unterstützungsangebote für die Arbeit mit dem PCEye 5:


qrco.de/PCEyeHelp



Anleitung für die Einrichtung

Mit dieser Anleitung können Sie in drei Schritten die benötigte Software herunterladen und den PCEye 5 an Ihrem Computer montieren. Wenn Sie die Software ZUERST herunterladen, werden Sie von den Hinweisen auf dem Bildschirm Schritt für Schritt bei der Einrichtung und Nutzung des Geräts angeleitet.

Sie können den PCEye 5 auf einem Laptop oder einem Desktop-Computer verwenden.

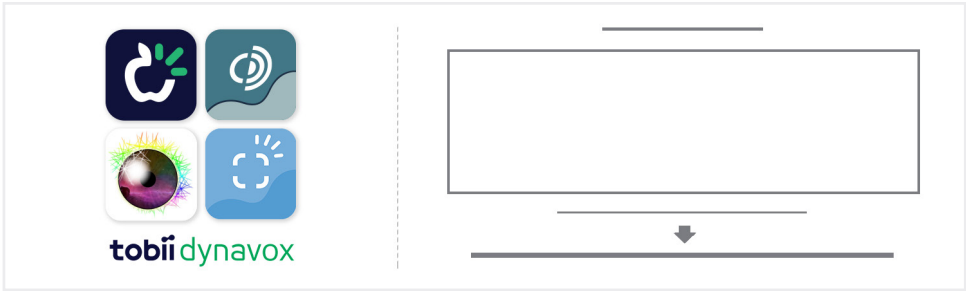

1. Schritt: Die Software für den PCEye 5 herunterladen
Gehen Sie auf <https://qrco.de/PCEyeCC> und laden Sie die Software für den PCEye 5 herunter.

2. Schritt: Den PCEye 5 montieren und kalibrieren
Wenn Sie den PCEye 5 mit der optional erhältlichen Halterung nutzen möchten, überspringen Sie diesen Schritt und entnehmen der im Lieferumfang enthaltenen Anleitung genauere Informationen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Gehen Sie zur Anleitung zurück, um sich genauer über die Software zu informieren.

3. Schritt: Software starten
Wenn Sie ein Softwarepaket erworben oder zusätzliche Lizenzkarten erhalten haben, befolgen Sie die Download- und Installationsanleitungen auf den jeweiligen Karten (siehe links).

Erste Schritte mit der Software „TD Control“

In Kombination mit dem PCEye 5 ermöglicht Ihnen TD Control den Zugriff auf Maus- und Tastaturfunktionen. Wenn Sie TD Control zum ersten Mal öffnen, gibt Ihnen die Kurzanleitung einen Überblick über die verschiedenen Aktionen.

Über das Feld „Informationen“ können Sie jederzeit zur Kurzanleitung zurückkehren.

Wenn Sie sie schließen möchten, wählen Sie „Kurzanleitung ausblenden“ aus.

Blickbereichsdarstellung (Gaze Trace) erkunden
Der Gaze Trace gibt Ihnen eine Rückmeldung, auf welchen Punkt des Bildschirms Sie blicken. Wenn Sie den Blick auf ein bestimmtes Objekt gerichtet halten, erscheint das Aktivierungsfeld. Wenn Sie den Blick darauf fixieren, öffnet sich das Menü „Interaktionen“:



Das Menü „Interaktionen“ erkunden
Über das Menü „Interaktionen“ erhalten Sie Zugriff auf die Funktionen der Tastatur und vor allem der Maus.

Genauere Beschreibungen zu den einzelnen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Das Off-Screen-Menü erkunden
Über das Off-Screen-Menü können Sie auf zusätzliche Funktionen wie z.B. durchgängige Klicks, die Einstellungen, die Pausefunktion zugreifen, usw.

Wenn Sie neu kalibrieren möchten, gehen Sie in das Off-Screen-Menü, wählen „Mehr“ und anschließend „Schnellkalibrierung“ aus.

Wenn die Steuerung bei der Erkundung von TD Control nicht präzise genug ist, können Sie eine Neukalibrierung vornehmen.



Hilfreiche Tipps für den Umgang mit TD Control

- Nutzen Sie die Pausefunktion, wenn Sie die Augen ausruhen möchten. **Pause**
- Das gewünschte Objekt muss nicht genau in der Mitte des Blickbereichs sein. **Ziel anpassen**
- Die Genauigkeit lässt sich mit „Ziel anpassen“ verbessern.
- Beim Scrollen erhöht sich die Scrollgeschwindigkeit umso mehr, desto weiter Sie Ihren Blick vom Scroll-Symbol entfernen. Sie können sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung scrollen.
- Wenn Sie in einem Textfeld schreiben möchten, bringen Sie den Blickbereich in das betreffende Feld und wählen „Tastatur“ aus. Es ist kein Linksklick erforderlich.