


Wie sichere ich mein iPad und dessen Inhalte?

Wer ein iPad besitzt, muss regelmäßig Backups machen.

Wer das vergisst und es passiert etwas mit dem iPad (zum Beispiel, dass der Code für den geführten Zugriff zu oft falsch eingegeben wird), dann ist alles weg und man muss von vorne beginnen.

Macht man allerdings regelmäßig Backups, kann man diese verwenden und das iPad wieder auf diesen Stand bringen bzw. vor dem Neu-aufsetzen retten!

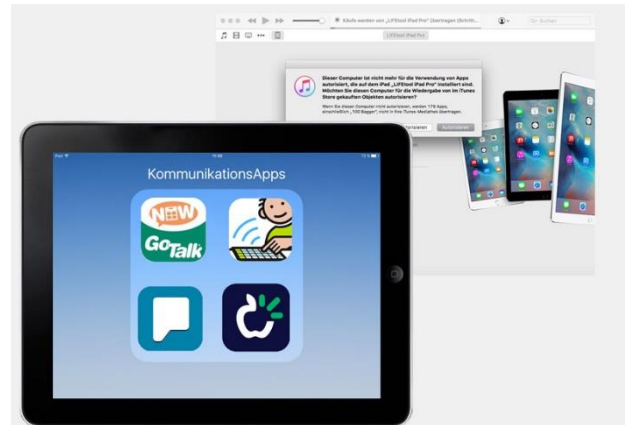

Allgemeine Tipps und Hinweise

Zu Anfang ein paar Tipps, wann Sie das iPad sichern sollten:

Wir empfehlen Ihnen, setzen Sie sich **eine monatliche Erinnerung** im Kalender, zur Sicherung des iPads!

Wir empfehlen dringend:

**Inhalte von Apps, in denen größere Änderungen gemacht werden
(zB GoTalk Now, MetaTalk, Predictable, TD Snap, BookCreator ...)**

!!neben einem Backup - regelmäßig auch extra zu sichern!!

**Es ist sehr schmerzlich, wenn diese tollen selbst erstellten Inhalte verloren sind
und NICHT mehr wiederhergestellt werden können ☹️**

**Die Apps aus dem AppStore können leicht nochmal heruntergeladen werden –
NICHT ABER DIE selbst erstellten INHALTE,
diese sind ohne Sicherung unwiederbringbar weg!**

Gesamtes iPad sichern




Um den gesamten Geräteinhalt zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Entweder per WLAN in die iCloud oder
2. über den Computer (sowohl Mac als auch Windows-PC) über **die Software iTunes**

Da bei der WLAN Sicherung nur einige Daten und NICHT die gesamten Apps gesichert werden, empfehlen wir Ihnen dringend, NUR die Sicherung über iTunes zu verwenden!


- Laden und installieren Sie diese bitte als erstes auf Ihrem Windows-PC oder auf Ihrem Mac die Software iTunes (zB <https://www.apple.com/at/itunes/>)
- Dann verbinden Sie das iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihren Mac oder PC.
- Anschließend müssen Sie Ihren Computer auch erlauben, auf das iPad zuzugreifen. Folgen Sie den Anweisungen am iPad und auf iTunes am PC/Mac (zB Sperrcode eingeben).

Wenn Sie gefragt werden, ob Sie ein **bestehendes Backup auf das iPad** spielen möchten oder ob Sie dieses iPad als neues iPad konfigurieren möchten, wählen Sie **"neues iPad"**, damit wird sofort ein Backup (=Sicherungskopie) von ihrem Gerät am PC/Mac erstellt.

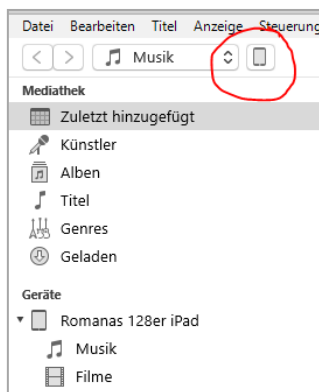

Werden Sie **nicht automatisch nach einem Backup** gefragt, dann klicken Sie in iTunes **oben links auf Ihr Gerät** (siehe Screenshot) dann öffnet sich das Menü für die Backups:

Hier wählen Sie **Backup jetzt erstellen** (Sicherung von iPad auf PC/Mac)

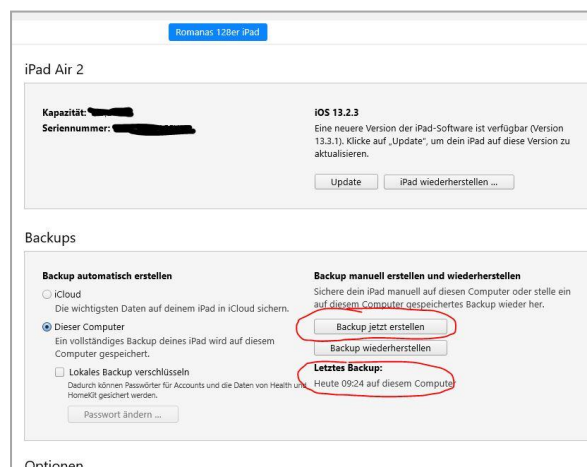

Hinweis: Führen Sie diese Mal durch, müssen Sie ID anmelden, um auch alle können.


Schritte zum ersten sich mit Ihrer Apple-Apps sichern zu

Wenn Sie prüfen möchten, ob wirklich ein Backup erstellt wurde: das sehen Sie unter dem Button "Backup wiederherstellen". Unter „**Letztes Backup**“ finden Sie das Datum der letzten Sicherung – hier sollte dann das aktuelle Datum und Uhrzeit stehen.

Vorgang für regelmäßiges Backup in Kürze:

- iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC/Mac verbinden
- iTunes sollte automatisch starten
- in iTunes oben links das verbundene iPad auswählen
- "Backup jetzt erstellen" wählen

Wenn Sie prüfen möchten, ob wirklich ein Backup erstellt wurde: das sehen Sie unter dem Button "Backup wiederherstellen".

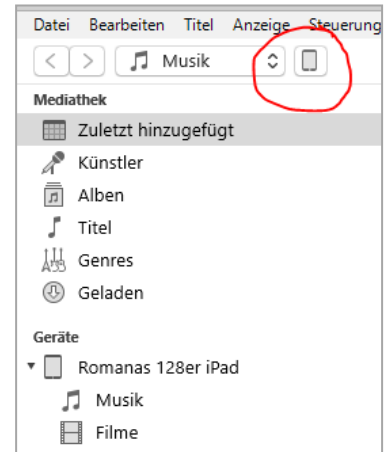

ACHTUNG: Es kann sein, dass die in der App GoTalk Now, MetaTalk oder TD Snap erstellten Kommunikationsbücher/-oberflächen in einem allgemeinen Backup NICHT mitgesichert werden!

Diese immer (!!) extra sichern, via Dropbox oder/und iTunes – siehe nachfolgende Anleitung!

Backup (Sicherungskopie) mit iTunes von PC auf das iPad zurück sichern



Sollte Ihr iPad deaktiviert worden sein und Sie möchten es wiederherstellen, oder möchten Sie die Daten eines kaputten iPads auf ein neues Gerät übertragen, benötigen Sie unbedingt ein Backup – eine Sicherungskopie des gesamten Gerätes – am besten via iTunes!

ACHTUNG: !!! Kein Backup = keine Sicherung = im Notfall alle Daten unwiederbringbar!!!

Um die Daten vom PC wieder auf Ihr iPad zurück zu sichern, verbinden Sie das iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihren PC/Mac.


Zuerst müssen Sie Ihrem PC/Mac auch erlauben, auf das iPad zuzugreifen. Hier bekommt eine Meldung am iPad, ob man diesem Computer vertrauen möchte, folgen Sie den Anweisungen am iPad und auf iTunes am PC (zB Sperrcode eingeben).

Sobald iTunes erkennt, dass ein iPad angeschlossen wurde, werden Sie eventuell gefragt,

→ ob Sie ein bestehendes Backup auf das iPad spielen möchten


→ oder dieses iPad als neues iPad konfigurieren möchten.

Wenn Sie nun die **Daten von Ihrem PC/Mac wieder auf das iPad zurück sichern** möchten, wählen Sie **"bestehende Backup"**, damit wird sofort das Backup (=Sicherungskopie) von Ihrem PC/Mac auf Ihr iPad zurück gespeichert.

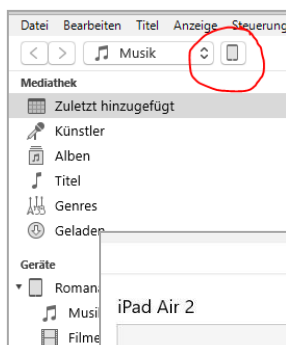

Werden Sie **nicht automatisch nach einem Backup** gefragt, dann klicken Sie in iTunes **oben links auf Ihr Gerät** (siehe Screenshot) dann öffnet sich das Menü für die Backups:

Hier wählen Sie **Backup wiederherstellen** beim Wiederherstellen der Daten vom PC/Mac auf das iPad – und schon geht's los!

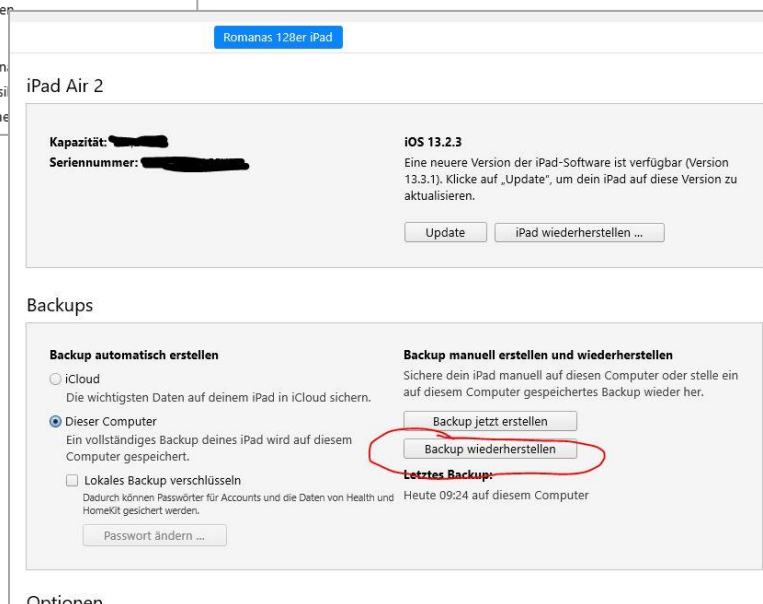

ACHTUNG: Es kann sein, dass die in der App GoTalk Now und MetaTalk erstellten Kommunikationsbücher/-oberflächen in einem allgemeinen Backup NICHT mitgesichert werden!

Diese immer (!! extra sichern, via Dropbox oder/und iTunes – siehe nachfolgende Anleitung!

GoTalk Now - Kommunikationsbücher sichern

Wenn Sie aber nun schon einige Kommunikationsbücher und Oberflächen erstellt haben, ist es sehr wichtig, diese alle auch regelmäßig zu sichern. Hierfür können wir Ihnen zwei Wege empfehlen:


- Sicherung über WLAN in die Dropbox
ODER
- Sicherung über den PC über iTunes

Sicherung GoTalkNow über die Dropbox

Kommunikationsbuch aus GoTalk Now in die Dropbox sichern

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPad mit dem Internet verbunden ist

- Öffnen Sie die App "GoTalk Now"
- Wählen Sie das Kommunikationsbuch aus, welches Sie sichern möchten
- Tippen Sie rechts unten auf die Wolke „Sichern“.
- Wählen Sie dann im Auswahlfenster "Über Dropbox" > "Sicherung zu Dropbox"
- Beim ersten Mal müssen Sie sich mit Ihren Dropbox-Zugangsdaten anmelden ("Dropbox Account verlinken"). Dann werden Ihnen die Ordner angezeigt.
- Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie Ihr Buch speichern möchten (ein Buch pro Ordner!) oder legen Sie einen neuen an.
- Tipp: Legen Sie für jedes neue Kommunikationsbuch einen neuen Ordner an, denn pro Ordner wird ein Kommunikationsbuch gespeichert.
- Nun ist Ihr Buch in der Dropbox gespeichert und kann geteilt oder jederzeit von dort wiederhergestellt werden.

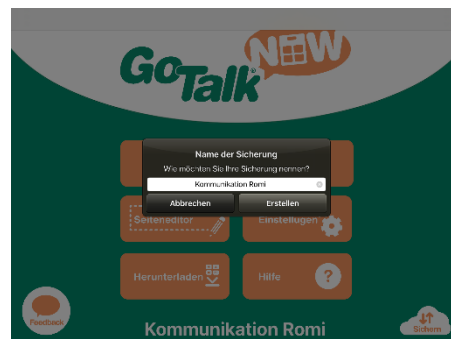





Bücher von der Dropbox wiederherstellen

- Legen Sie ein neues (leeres) Kommunikationsbuch an, in dem Sie das Buch aus der Dropbox wiederherstellen möchten.
- Tippen Sie in der Liste der Kommunikationsbücher auf den Pfeil neben dem neu angelegten Buch und wählen Sie "Sicherung" > "Über Dropbox" > "Wiederherstellen von Dropbox".
- Wählen Sie den Ordner aus, in dem sich das wiederherzustellende Buch befindet und tippen Sie auf "Wiederherstellen".
- Warten Sie bis das Buch wiederhergestellt ist - fertig ;)

Sicherung GoTalkNow über iTunes (Computer)

Kommunikationsbücher über die Software iTunes sichern:

- Schließen Sie das iPad mit dem USB-Kabel am Computer an
- Wenn iTunes nicht automatisch startet, starten Sie es bitte
- wählen Sie das iPad oben links aus
- Links wird Ihnen nun Ihr iPad angezeigt, wählen Sie den Menüpunkt "Dateifreigabe"
- Wenn Sie hier die App "GoTalk Now" anklicken, werden Ihnen alle Kommunikationsbücher Ihres iPads angezeigt
- Wählen Sie das zu sichernde Kommunikationsbuch aus und klicken Sie auf "Sichern unter ..."
- Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie ihr Kommunikationsbuch sichern möchten und speichern Sie dieses

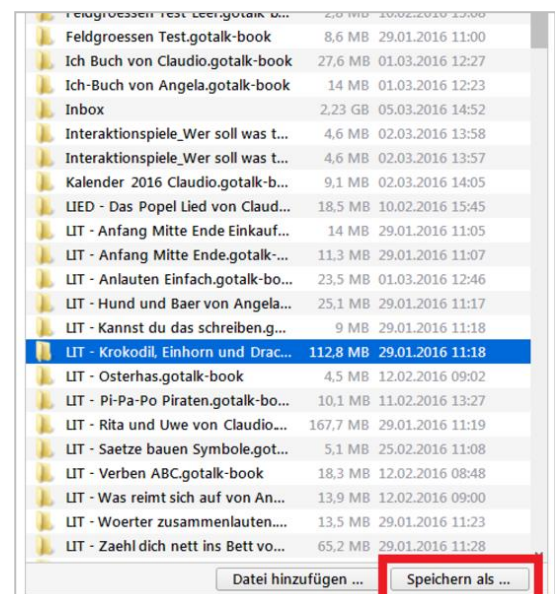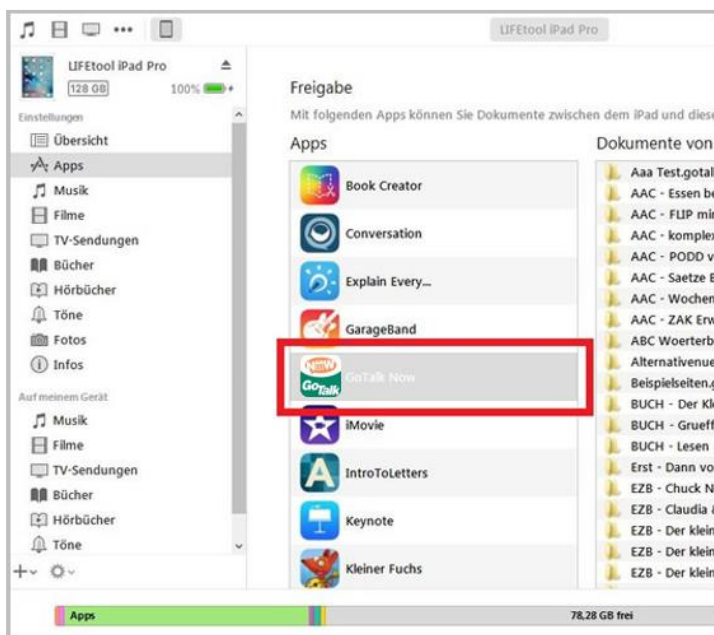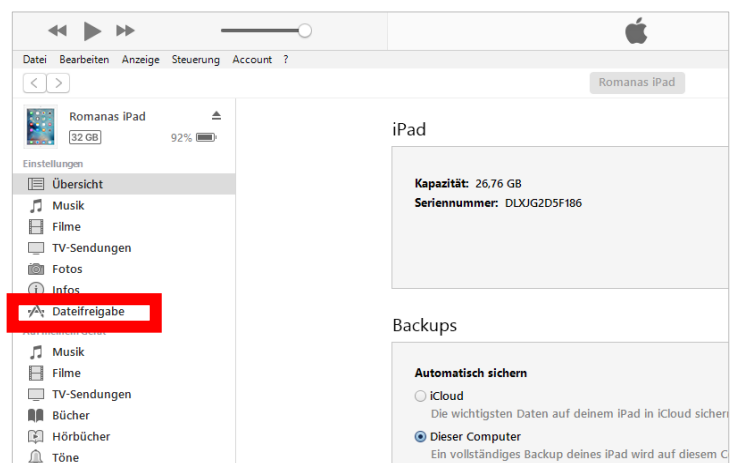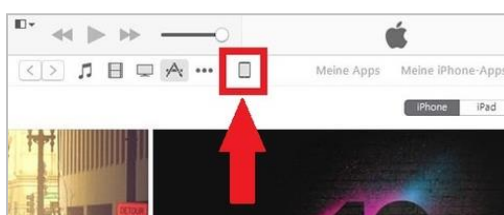

Kommunikationsbücher über die Software iTunes wieder auf Ihr iPad laden:

Erster Schritt – Buch komprimieren („zippen“)

- Gewünschtes Buch auf dem PC auswählen
- Rechtsklick darauf ausführen
- Es öffnet sich ein Untermenü, dort wählen Sie „Senden an“ und dann „ZIP-Komprimierten Ordner“
- Nun kann die komprimierte Datei auf das iPad übertragen werden (ZIP-Datei wird als Ordner mit Reisverschluss dargestellt)

zweiter Schritt – Buch aufs iPad übertragen

- schließen Sie ihr iPad am Computer an und starten Sie iTunes, sollte dies nicht automatisch passieren
- wählen Sie das iPad aus, klicken Sie auf den Menüpunkt "Dateifreigabe"
- wählen Sie "GoTalk Now" aus
- scrollen Sie ganz ans Ende ihrer Bücher am iPad, dort finden Sie den Button "Datei Hinzufügen", diesen klicken Sie an und
- wählen das hinzuzufügende Buch aus Ihrem Dateisystem aus und klicken Sie auf "OK"
- das Buch wird nun auf Ihrem iPad hinzugefügt



MetaTalk – Seiten oder Vokabulare sichern

Auch in MetaTalk DE ist es wichtig, die neu erstellten Seiten oder ganze Vokabulare zu sichern. Dies ist sehr gut im Handbuch beschrieben.

Das aktuelle Handbuch finden sie hier: <https://metatalk.app>


In aller Kürze aber die wichtigsten Schritte:

MetaTalk Vokabulare oder einzelne Seiten sichern:

- wählen Sie im Seitenmanager (oder im Vokabularmanager) die Seite (das Vokabular) aus, das Sie exportieren möchten
- tippen Sie auf das Symbol "Export".
- es öffnet sich ein Menü, bei dem Sie drei Möglichkeiten haben:
 - **Airdrop:** Transfer von iPad zu iPad
 - **Mail:** nur für Seiten - bei Vokabularen wird die Datei meist zu groß zu versenden
 - **Dropbox:** zum Sichern und Austausch von Seiten & Vokabularen
- Wählen Sie die Transfermethode, die Sie nutzen möchten.

Tipp:

Wenn Sie per Mail oder Dropbox sichern, können Sie die Dateien auf ihrem herkömmlichen Rechner oder auch auf einem externen Speichermedium (Festplatte, USB-Stick) in einem Ordner zusammenkopieren und so sichern. Bei Bedarf übertragen Sie die Dateien einfach dann per Mail oder Dropbox wieder zurück auf das iPad.

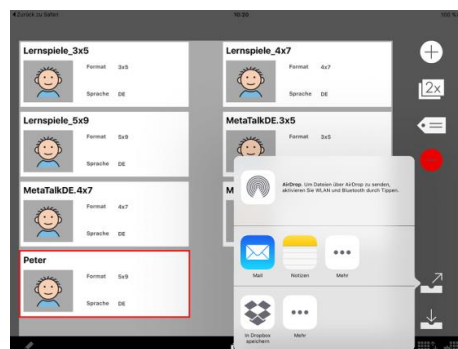

MetaTalk Vokabulare oder einzelne Seiten wiederherstellen:

Schritt 1:

- **Airdrop:** wird eine Datei per Airdrop auf das iPad geschickt, befindet sie sich gleich in MetaTalk (sh. Schritt 2)
- **Mail:** Wählen Sie den Anhang (Seite/Vokabular) im Mail per Tipp aus und wählen Sie "Öffnen in ..." > "MetaTalk"
- **Dropbox:** Wählen Sie in der Dropbox-App die Datei aus, die Sie öffnen möchten und tippen Sie auf das Quadrat-Pfeil-Symbol. Öffnen Sie die Datei in MetaTalk.

Schritt 2:


- öffnen Sie MetaTalk und hier den Seiten- bzw. den Vokabularmanager (je nachdem, ob sie eine neue Seite oder ein neues Vokabular importieren)
- beim Importieren-Symbol sehen Sie eine Zahl (je nachdem wie viele Seiten/Vokabulare Sie importiert haben). Tippen Sie darauf und wählen Sie das Vokabular/die Seite aus
- geben Sie der Seite einen Namen und speichern Sie diese. FERTIG :)

Tipp: Auch von der Homepage der Metacom-Symbole können Sie sich tolle fertige Vokabulare und Seiten herunterladen. Sie finden dies unter: www.metacom-symbole.de „Downloads > Vokabular zu MetaTalk“.



Predictable-Sicherung - Backup

Die Erstellung und Verwendung eines TherapyBox-Benutzerkontos ist sinnvoll – denn damit profitieren Sie von der automatischen Synchronisation und den automatischen Backups.

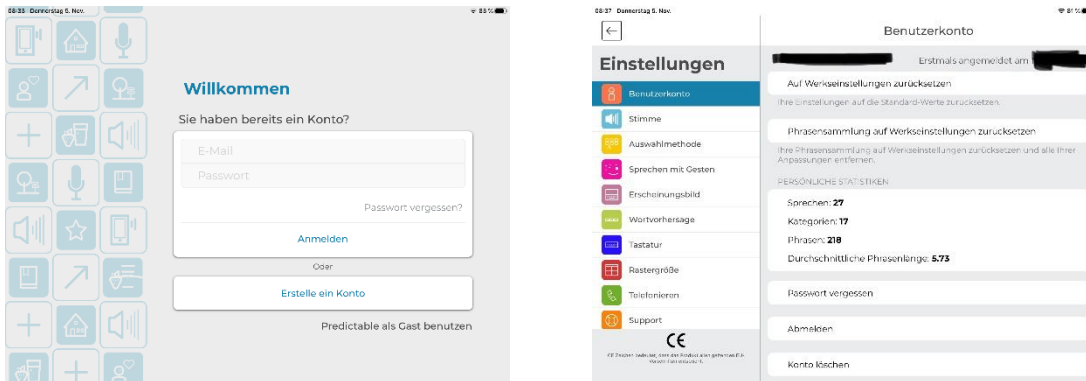

Die Erstellung eines Kontos erfolgt beim erstmaligen Start der App – kann aber auch später erfolgen.

Bei den LIFEpads der LIFEtool Solutions wird das Benutzerkonto automatisch für Sie mithilfe der Apple-ID angelegt.

Ist Ihr Gerät dann regelmäßig mit dem WLAN verbunden, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Die automatische Synchronisation wird im Hintergrund durchgeführt.

Damit sind alle Einstellungen und Personalisierungen in Ihrem Benutzerkonto gespeichert.



TD Snap – Benutzer und Seitensets sichern

Wenn Sie in der App TD Snap schon einiges individualisiert und Einstellungen angepasst haben, ist es sehr wichtig, das Seitenset oder gleich den ganzen Benutzer regelmäßig zu sichern. Hierfür können wir Ihnen zwei Wege empfehlen:

- Sicherung des gesamten Benutzers (Seitenset und Einstellungen, ...)
ODER
- Sicherung/Synchronisierung einzelner Seitensets



Sicherung des gesamten Benutzers

Sicherungsdateien für Benutzer enthalten die mit dem Benutzer verbundenen Seitensets und Einstellungen (zB Auswahlmethode, Stimmeneinstellungen, ...).


Aus unserer Erfahrung ist die Sicherung des gesamten Benutzers die beste und einfachste Möglichkeit alle Daten u. Einstellungen auf einmal zu sichern. Für eine schnelle Sicherung nach kleinen Änderungen am Seitenset eignet sich das Synchronisieren des Seitensets gut.

Bei den LIFEpads der LIFEtool Solutions wird das Benutzerkonto auf myTobiiDynavox automatisch für Sie mithilfe der Apple-ID angelegt.





Benutzersicherung auf myTobiiDynavox:

- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **bearbeiten**.
- Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
- Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
- Wählen Sie das Feld  **Sichern** neben dem Namen des Benutzers, den Sie sichern möchten.
- Wählen Sie **Auf myTobiiDynavox** sichern.
- Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto anzumelden
- Geben Sie für die Sicherungsdatei Ihres Benutzers einen Namen ein und wählen Sie dann **weiter**
- TIPP: es kann hilfreich sein, das Sicherungsdatum in den Dateinamen einzufügen (zB 2020_0229 für 29. Februar 2020)
- Wählen Sie **fertig**.

Einen Benutzer von myTobiiDynavox wiederherstellen

- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
- Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
- Wählen Sie **Neuer Benutzer**.
- Wählen Sie **Vorhandenen Benutzer wiederherstellen**.
- Wenn Sie im Moment nicht bei myTobiiDynavox angemeldet sind, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und wählen dann **Weiter**.
- Wählen Sie eine Sicherungsdatei für einen Benutzer aus der Liste aus und wählen **weiter**
- Fertig – der Benutzer ist nun am Gerät wiederhergestellt .

Seitensets auf myTobiiDynavox speichern bzw. synchronisieren

- Möchten Sie **nur einzelne Seitensets** eines Benutzers sichern, klappt das auch mit der Cloud von myTobiiDynavox sehr rasch und einfach. Ein so gespeichertes Seitenset kann auch anderen Nutzern freigegeben werden, nähere Informationen zum Teilen von Seitensets entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch von TD Snap.
- **Kopie des Seitensets auf myTobiiDynavox speichern:**
- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
- Wählen Sie das aktuelle Seitenset.
- Wählen Sie das Symbol  **Speichern** neben dem Seitenset, das Sie speichern möchten.
- Wählen Sie **Kopie auf myTobiiDynavox speichern**.
- Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich bei myTobiiDynavox anzumelden.
- Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Seitenset und (optional) eine Beschreibung ein und wählen Sie dann **speichern**.
- Eine Fortschrittsanzeige erscheint, die den Speichervorgang anzeigt.
- Wenn dieser abgeschlossen ist, wählen Sie **fertig**.
- **Ein Seitenset zur Synchronisation auf myTobiiDynavox einrichten:**
- Ihr Gerät ist mit dem WLAN verbunden.
- Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste
- Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für myTobiiDynavox einzugeben.
- Wählen Sie **Synchronisieren**.
- Das war alles! Ihr Seitenset ist nun mit Ihrem myTobiiDynavox-Konto synchron.
- **HINWEIS: Jedes Mal, wenn Sie Ihr Seitenset bearbeiten, müssen Sie das Feld „Synchronisieren“  in der oberen Menüleiste anwählen, um die Änderungen an die Cloud zu schicken. So bleibt Ihr Seitenset immer synchronisiert mit MyTobiiDynavox, dh sie haben immer eine aktuelle Version davon gesichert.**
- Auf myTobiiDynavox gespeicherte Seitenset-Dateien finden Sie nach Anmeldung mit Ihrem TobiiDynavox-Account auf www.myTobiiDynavox.com unter: Meine Produkte > TD Snap > Seitensets

