



# Alles was Sie zum Thema Hygiene wissen müssen !

Gesamtkonzept der Firma 37Grad GmbH.  
Empathie-Demenzpuppen und Roboter-Tiere





## AUFBEREITUNGSEMPFEHLUNGEN für Roboter-Tiere

**Grundsätzlich gilt: Händedesinfektion (Patient, Bewohner, Angehörige, Personal,...)  
 + Patientendefinierte Verwendung bei Keimträgern!**

- Kleinere Verunreinigungen können mittels der zum Produkt gehörigen Bürste ausgebürstet werden. Achten Sie auch auf die regelmäßige Reinigung der Bürste.
- Oberflächlichen Schmutz können Sie mit einem leicht alkoholisch getränktem Desinfektionstuch abwischen (z.B. Fa. Schülke Mikrocid Sensitive Wipes, Mikrocid Universal Wipes, Fa. Schumacher Cleanisept Wipes Maxi, Decosept Sensitive Wipes).
- Besprühen Sie das Fell mit einem speziellen Desinfektionsspray (Wasserstoffperoxid Basis) bzw. einem ungiftigen Spielzeugreiniger und beachten Sie die vorgegebenen Einwirkzeiten. Trocknen Sie das Fell stets nach jeder Reinigung vorsichtig mit einem Handtuch und vermeiden Sie gröbere Manipulationen im Bereich um Augen und Nase.

Eine desinfizierende Aufbereitung mittels **Kaltvernebelung** (Fa. hollu/Wasserstoffperoxid) oder mittels **Ozongenerator** (Fa. Klenz) ist unproblematisch möglich. Entfernen Sie bitte vor der Behandlung die Batterien aus dem Batteriefach und beachten Sie die Gebrauchsanweisung vom jeweiligen Hersteller.

„Aufgrund des weichen Fells mit Elektronik im Inneren ist die Reinigung sowie Desinfektion des Produkts begrenzt, aber möglich!“





37

GRAD

www.med37grad.com




so geht sauber. **hollu**

## WASCHANLEITUNG FÜR DEMENZ-EMPATHIE-PUPPEN

### Allgemeine Waschanleitung:

Die Demenz-Empathie-Puppen sind mit 60 °C (Feinwäsche bunt / Schonprogramm) in der Waschmaschine bei reduzierter Wäschemenge und Schleuderdrehzahl (max. 600 U/min) waschbar. Bei einer 6,5 kg Waschmaschine empfehlen wir 2 Puppen pro Waschgang. Die Verwendung eines Wäschesacks kann zusätzlich zur Schonung beitragen. Die Kleidung kann gemeinsam mit den Puppen gewaschen werden. Nicht Bügeln. Nicht trockenreinigen.

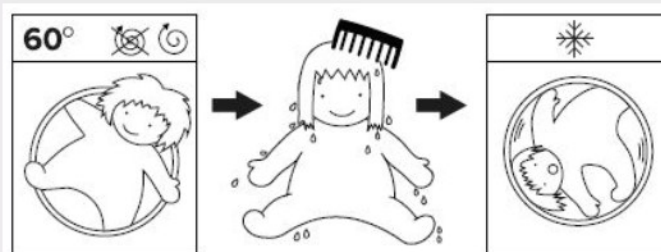

60°C

⊗

⊗

⊗

■

### Produktempfehlung für ein chemothermisches Desinfektionsverfahren:

Die Demenz-Empathie-Puppen sind geeignet für Desinfektionswaschverfahren. Wir empfehlen dafür folgende Produkte<sup>1</sup>:



**Händische Dosierung Pulver:**  
holludes 60 forte



Keine Chlorbleichlauge verwenden



**holluQUID Flüssigwaschsystem:**  
holluQUID 1.2 – Aktiv Bunt,  
holluQUID 1.3 – Aktiv Waschkraft,  
holluQUID 1.4 – Fleckentferner,  
holluQUID 1.5 – Komplexierung & Waschkraft,  
holluQUID 2.1 – Desinfektion



**Wäschetrockner:**  
Die Demenz-Empathie-Puppen Schontrocknen  
(max. 60 °C). Vorher die Haare kämmen.



**GRAD**

[www.med37grad.com](http://www.med37grad.com)

„Professionelle Hilfsmittel für die Pflege“



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie auch gerne telefonisch!

+43 (0) 699 10 86 2002



Selbstverständlich sind wir auch per Mail erreichbar!

[info@med37grad.com](mailto:info@med37grad.com)

Sie möchten lieber online stöbern?

[www.med37grad.com](http://www.med37grad.com)



Unsere gesamte Produktpalette sowie spezifische Produktbeschreibungen finden Sie auf unserer Webseite [www.med37grad.com](http://www.med37grad.com)



mit dem QR-Code direkt