



## AssistiveTouch-Einstellungen

Kein Verweilen außerhalb von Aktivitäten

- AssistiveTouch -> Verweilsteuerung = Ein
- Verweilsteuerung = Ein
- Bewegungstoleranz = 0%
- Geräte -> Tobii Dynavox Pilot: Glätten = 0%, Automatisch Ausblenden = Ein, 0,50 Sekunden, Sichtbarkeit = 0%
- Zeiger-Steuerung: Farbe = Keine, Größe = Minimum (Schieberegler ganz links)



## Tastenkombinationen

- P** Bildschirmfoto/Screenshot
- H** Ein-/Ausschalten Heatmap
- R** Bildschirmaufnahme starten/stoppen
- K** Cursor anzeigen
- L** Cursor ausblenden
- ↑↓** Erhöhung und Verringerung der Verweildauer

tobii dynavox



Sensory Guru

©2025



## Tipps zur Fehlerbehebung

Kein Eye-Tracking

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre TD Pilot - Basis eingeschaltet haben (Taste neben dem Partnerfenster)
2. Stellen Sie sicher, dass Sie Assistive Touch eingerichtet haben.

Ziele nicht treffen

Vielleicht eine Kalibrierung ausprobieren – Wechsel zur Co-Pilot-App, um eine Kalibrierung durchzuführen



## Eye FX 2 Level

- 1 Erstes Entdecken
- 2 Frühes Beobachten
- 3 Erkunden
- 4 Konkretes Entdecken
- 5 Gezielte Auswahl



Du musst nicht alle Aktivitäten in einem Level abschließen, bevor du weitermachst.

tobii dynavox



Sensory Guru

©2025



## Kernwörter



ich



mögen



fertig



du



nicht mögen



nochmal



## Notizen



## Eye FX 2 Hilfekarten

1. Schneiden Sie jede Karte aus.
2. Laminieren, um es robust zu machen.
3. Lochen durch das blaue Loch.
4. Schlüsselanhänger anbringen.

