


So erhalten Sie Sensory Eye FX 2 auf Ihrem TD Pilot

Wenn Ihr TD Pilot frisch aus der Verpackung kommt:

1. Suchen Sie die Self-Service-App auf Ihrem Home Bildschirm
2. Öffnen Sie die App und wählen Sie Sensory Eye FX 2 unter Tobii Dynavox Apps.

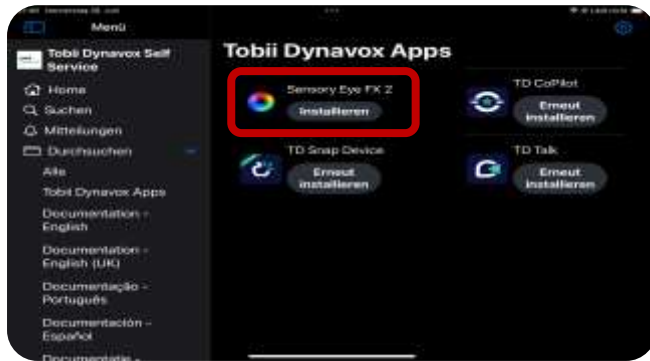

Sensory Eye FX 2 wird jetzt eine App auf Ihrem Home Bildschirm sein. Öffnen Sie Sensory Eye FX 2 und aktivieren Sie Ihren Lizenzcode.

Ich habe die Self Service App auf meinem TD Pilot:

Wenn Sie Ihr Gerät schon eine Weile haben und die Self-Service-App auf dem Home Bildschirm nicht sehen können, können Sie einfach den nachfolgenden Anweisungen folgen, um die App herunterzuladen und loszulegen.



Ich habe die Self Service App nicht auf meinem TD Pilot:



Ihr TD Pilot ist möglicherweise etwas älter und benötigt daher ein kleines Update, um auf Sensory Eye FX 2 zugreifen zu können. Sie müssen Ihren TD Pilot zurücksetzen und damit alle Daten löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup aller Apps erstellt haben, die Sie verwenden.

1. Wenn Sie bereits einen TD Snap-Benutzer haben, stellen Sie sicher, dass Sie auf mytobiidynavox.com ein Backup haben.
2. Öffnen Sie auf Ihrem TD Pilot
 - Einstellungen > Allgemein > iPad übertragen/zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen

Das TD Pilot wird jetzt zurückgesetzt. Sie müssen das TD Pilot einrichten. Während der Einrichtung werden Sie gefragt, ob Sie das Gerät bei Tobii Dynavox AB Entfernte Verwaltung registrieren möchten. Wählen Sie dies aus. Dies ermöglicht es uns, Ihnen Updates usw. zu senden.



Sobald Ihr TD Pilot eingerichtet ist, können Sie den Anweisungen auf der linken Seite folgen, um Sensory Eye FX 2 herunterzuladen.